

Výrobce : Cerkamed Wojciech Pawlowski
ul . E.Kwiatkowskiego 1
37 - 450 Stalowa Wola
POLAND

ALUSTAT gel GEL K ZASTAVENÍ KRVÁCENÍ

SLOŽENÍ:
chlorid hlinitý 25%

BALENÍ:
injekční stříkačka s aplikátory

POUŽITÍ:
Výrobek ALUSTAT je určen k zastavení mírného krvácení během zubního ošetření. Chlorid hlinitý obsažený ve výrobku působí na drobné cévy vazokonstrikčně, čímž zmenšuje otok a zmírňuje krvácení.

NÁVOD K POUŽITÍ:
Nasadte připojený aplikátor na stříkačku s výrobkem, aplikujte výrobek přímo v krvácející oblasti, ponechte je tam 30 sekund, potom vypláchněte čistou vodou. V případě potřeby všechny činnosti zopakujte.

KONTRAINDIKACE:
Nepoužívejte u pacientů přecitlivělých na některou složku výrobku.

UPOZORNĚNÍ:
Může způsobovat podráždění pokožky.
Dráždí sliznici ústní dutiny. Při zasažení okamžitě vypláchněte vodou.
Výrobek dráždí oči. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití nevyvolávejte zvracení. Vypijte velké množství vody. Vyhledejte lékařskou pomoc.

UCHOVÁVÁNÍ:

Pracovní postup



www.cerkamed.pl

Uchovávejte v původním obalu, při teplotě nižší než 25 °C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Použitý obal předejte k recyklaci nebo vraťte výrobci. Datum expirace je uvedeno na etiketě výrobku.

PŘÍPRAVEK JE URČEN POUZE K DENTÁLNÍMU POUŽITÍ