

NOVABONE®

Dental Putty

Pistole na kompule

Návod k použití

Indikace:


NovaBone Dental Putty pistole na kompule je určena pro použití pouze s NovaBone Dental Putty kompulemi. Kompule jsou dodávány zvlášť a obsahují syntetickou kostní náhradu.



(1)



(2)

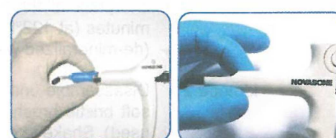


(3)



(4a) správně



(4b) nesprávně

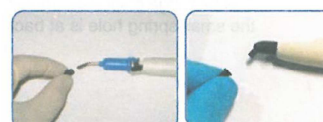

(5)

Návod k použití:

- 1) Vyjměte kompuli ze zásobníku nebo sáčku (mini).
- 2) Nechejte velkou černou gumovou zátku v kompuli. Neodstraňujte základní zátku.
- 3) Zatlačte kompuli do pistole, aby dosedla na své místo.
- 4) Srovnejte černý plastový píst a pružinu oproti ploché části na spodní straně rukojeti páky, podle šipky vytištěné na rukojeti. **POZNÁMKA:** Na obrázku 4b je znázorněna špatná pozice pístu a pružiny oproti rukojeti. V této pozici nebudou rukojeti pistole správně fungovat.
- 5) Odstraňte černý uzávěr ze špičky kompule.
- 6) Stlačujte rukojeti pomalým a stálým tlakem, abyste vytlačily syntetickou kostní náhradu.
- 7) Po použití vyjměte a zlikvidujte kompuli.

Sterilita:

Pistole na kompule je dodávána nesterilní a před použitím potřebuje sterilizaci. Pistole může být sterilizována v autoklávu. Pokyny pro čištění a sterilizaci jsou uvedeny na druhé straně tohoto návodu k použití.

Kontraindikace / Opatření / Výstrahy:

Viz NovaBone Dental Putty návod k použití, který se dodává spolu s kompulemi.

Pozor:

Produkt je určen pouze pro zubní lékaře.

Výrobce: NovaBone Products, LLC
13510 NW US Highway 441
Alachua, FL 32615
Tel.: (386) 462-7660
Fax: (386) 418-1636
www.novabone.com

Výhradní dovozce pro ČR i SR:

Hu-Fa Dental a.s., Moravní 909, 765 01 Otrokovice, ČR
Tel.: +420 577 926 226-9
Hu-Fa Dental s.r.o., Podjavorinskej č.1500, 022 01 Čadca, SR
Tel.: +421 41 433 10 16-17
www.hufa.cz

NOVABONE®

Dental Putty

Pistole na kompule

Instrukce pro čištění a sterilizaci

Čištění:

Po použití otřete zbytky materiálu a jiné nečistoty z povrchu pistole na kompule.

Postup 1:

Rozevřete rukojeti tak, aby bylo možné vyjmout černý píst s pružinou z komory pistole. Sundejte kovovou pružinu z pístu a umístěte všechny tři díly (pistol, píst a pružinu) do ultrazvukové čističky. Uzavřete a nechte čistit 16-20 minut (při 122 °F / 50°C, pokud jednotka obsahuje topné těleso). Vyjměte a důkladně opláchněte sterilní teplou vodou (může být použita destilovaná voda). Třepáním odstraňte přebytečnou vodu a postavte kolmo kvůli vysušení.

Postup 2:

Rozeberte pistol, dle výše uvedeného. Důkladně vyčistěte jednotlivé díly ručně měkkým kartáčkem a jemným čistícím prostředkem. Vyjměte a důkladně opláchněte sterilní teplou vodou (může být použita destilovaná voda). Třepáním odstraňte přebytečnou vodu a postavte kolmo kvůli vysušení.

Sterilizace:

Pistole na kompule by měla být před sterilizací suchá a vcelku (kompletně složená). Menším otvorem v pružině ji nasadte na užší konec černého pístu. Kvůli správnému složení a fungování pistole se ujistěte, že jste pružinu nasadili na píst jejím menším otvorem (viz Obr. 1 - správný postup).



Obr. 1

Rozevřete co nejvíce rukojeti pistole. Zasuňte píst s pružinou do komory pistole až na doraz. Pružina se tím posune k zadnímu konci pístu a zůstane na pístu mimo komoru pistole). Pomalu sevřete rukojeti k sobě tak, aby zadní část pístu dosedla v zadní rukojeti do místa k tomu určeného (viz Obr. 2,3,4 - správný postup).

Obr.
2,3,4



Pokud je píst nasazen správně, rukojeti se mohou volně pohybovat a nejsou zablockovány během používání. V případě, že píst není ve správné pozici, rukojeti budou vyžadovat nepřiměřenou sílu, aby mohly být sevřeny, což může vést ke zlomení rukojetí nebo pístu.

Sterilizace v autoklávu:

Pistole na kompule může být autoklávkována. Postupujte dle pokynů výrobce daného autoklávu, běžně 20 minut při 250°F / 121°C - 15 Psi.