

Výrobce : Cerkamed Wojciech Pawlowski
ul . E.Kwiatkowskiego 1
37 - 450 Stalowa Wola
POLAND

EUCALYPTOL

Přípravek k rozpouštění gutapěřči

SLOŽENÍ:

100% eukalyptový olej

BALENÍ:

Lahvička naplněná 10 ml přípravku a sada aplikačních pipet

Eucalyptol se získává z eukalyptového extraktu.

NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Kápněte 1-2 kapky přípravku do kanálku a počkejte 5 minut.
2. Odstraňte gutapěřču.
3. Je-li to nutné, použijte jiné dávkování přípravku.
4. Je-li gutapěřča suchá nebo křehká, použijte přípravek EUCALYPTOL opakovaně.
5. Postup opakujte, až dosáhnete požadovaného účinku.

UPOZORNĚNÍ:

Přípravek může dráždit ústní sliznici. V případě zasažení vypláchněte ústa vodou.

Přípravek dráždí oči. V případě zasažení ihned vypláchněte oči velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékařskou pomoc.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Při práci s výrobkem je nutné používat koferdam. Doporučujeme používat rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv.

Pracovní postup



www.cerkamed.pl

UCHOVÁVÁNÍ:

Uchovávejte v těsně uzavřeném obalu ve větrané místnosti při teplotě 2-25 °C.
Přípravek nevystavujte slunečnímu záření. Chraňte před zdroji zapálení.
Uchovávejte mimo dosah dětí.

PŘÍPRAVEK JE URČEN POUZE K DENTÁLNÍMU POUŽITÍ