

NÁVOD K POUŽITÍ

Dodavatel: Hu-Fa Dental
Moravni 909
Otrokovice
765 02

KYSELINA CITRONOVÁ 40%

Tekutina pro výplach kořenových kanálků

PRODUKT POUZE PRO DENTÁLNÍ POUŽITÍ

SLOŽENÍ: 40% roztok kyseliny citronové

BALENÍ:

Láhev 200 g

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Tekutina se používá během endodontického ošetření pro výplach kořenových kanálků.

Zlepšuje mechanické čištění kořenových kanálků.

Produkt odstraňuje smear vrstvu ze stěn kanálků, díky čemuž se otevírají dentinové tubuly.

APLIKACE

40% kyselina citronová není pro lidské tělo toxická.

Také se nejedná o látku nebezpečnou životnímu prostředí.

40% kyselina citronová působí na smear vrstvu a odstraňuje ji ze stěn kořenových kanálků, čímž dochází k otevření dentinových tubulů.

Umožňuje důkladné čištění dentinových tubulů od částeczek dřevě a následné snadné pronikání těsnicí hmoty.

Adaptér se zátkou pro nasátí tekutých přípravků do stříkačky

1. Odšroubujte uzávěr láhve.

2. Umístěte adaptér na hrdlo láhve a pevně stlačte.

3. Abyste mohli láhev použít, odstraňte modrou zátku, našroubujte konec injekční stříkačky na otvor adaptéru, obraťte láhev s přípravkem vzhůru nohama a nasajte tekutinu do stříkačky, zatímco držíte adaptér. Pak položte láhev na stůl ve vzpřímené poloze a opatrně odšroubujte injekční stříkačku od adaptéru. Doporučuje se používat stříkačku se závitem Luer Lock a gumovým pístem.

4. Po každém použití uzavřete otvor adaptéru modrou zátkou.

5. Při převozu odstraňte adaptér a láhev řádně uzavřete víčkem.

POKyny PRO POUŽITÍ

Nasajte přípravek do stříkačky, kterou umístěte takovým způsobem, aby tekutina proudila přímo na stěnu kanálku. Doporučuje se použít jehlu s bočním vstupem blízko špičky. Během vyplachování kanálku nepoužívejte silný proud tekutiny - mohlo by dojít k průniku tekutiny do periapikálních tkání a jejich následnému poškození. Po použití produktu doporučujeme vypláchnout kanálek fyziologickým roztokem. Doporučujeme použít ruber-dam. Předcházejte dlouhodobému kontaktu se sliznicí - může způsobit její podráždění. Jakmile je obal otevřen, datum expirace se nemění, i když je obsah po každém užití řádně zabezpečen. Prázdné obaly by měly být zlikvidovány zodpovědně.

VAROVÁNÍ

Produkt dráždí oči. V případě kontaktu s očima vypláchněte dostatečným množstvím vody. Při vyplachování udržujte víčko široce otevřené.

Předcházejte kontaktu s pokožkou - může dojít k podráždění. Doporučujeme používat ochranné brýle a rukavice. Nepoužívejte produkt u pacientů se zvýšenou citlivostí na jakoukoli složku přípravku.

Produkt podléhá kompletní biodegradaci.

SKLADOVÁNÍ

Składujte v uzavřeném původním obalu při teplotách do 25 °C.

Udržujte mimo dosah dětí.

PŘED POUŽITÍM PROTŘEPAT!!!

Datum poslední aktualizace : 18.12.2012

Kontakt na dodavatele : Ing. Milan Kříž - Falcon , Havlíčkova 37 , 602 00 Brno

www.dentalnmaterial.cz