

Data ostatniej aktualizacji: 29.01.2025/9

RUBBER-DAM LIQUID



CE



Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

CERKAMED Wojciech Pawłowski

37-450 Stalowa Wola, Poland

ul. Kwiatkowskiego 1

Tel./fax: + 48 15 842 35 85

www.cerkamed.com

MD



25°C

To maintain the high quality of our products and customer satisfaction, please send your opinions and comments to jakosc@cerkamed.pl

W trosce o wysoką jakość naszych wyrobów oraz zadowolenie klientów, prosimy o kierowanie swoich opinii i uwag na adres jakosc@cerkamed.pl

**PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD
VÝROBEK MOHOU POUŽÍVAT POUZE ZUBNÍ LÉKÁŘI**

SLOŽENÍ: uretanové pryskyřice, neorganické výplně

URČENÍ

Světlem vytvrzovaný tekutý kofferdam je určen k:

- ochraně dásní během stomatologických zákroků: bělení, leptání, mikroabrazie, pískování apod.

- utěsnění gumového kofferdamu

Hodí se pro metodu okluzního razítka.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Přiložený aplikátor musíte před zákrokem ponořit do lihu (etanolu) a následně nasadit na stříkačku.

Pro ochranu dásní během stomatologických zákroků:

Vyčistěte a osušte dásně. S pomocí vhodných nástrojů (např. rozvěrač tváří a rtů) znehybněte rty a jazyk, aby nedošlo ke kontaktu s přípravkem. Sejměte uzávěr stříkačky a nasadte přiložený jednorázový aplikátor. Aplikujte RUBBER-DAM LIQUID podél oblasti použití na šířku 4-6 mm a tloušťku asi 1,5-2 mm, a zároveň vizuálně kontrolujte množství nanášeného přípravku. Pokud je to možné, protlačte RUBBER-DAM LIQUID mezizubními prostory. Přípravek 20-30 sekund vytvrzujte pomocí polymerační lampy. Proces vytvrzování provádějte rovnoměrně vykonáváním skenujícího pohybu. Následně přistupte k stomatologickému zákroku. Po zakončení zákroku polymerovaný RUBBER-DAM LIQUID pomocí nástroje na jednom konci nadzvedněte a odstraňte.

Za účelem utěsnění gumového kofferdamu:

Izolujte pracovní prostor (zub/zuby/zubní lůžko) s pomocí gumového kofferdamu RUBBER-DAM.

Pro utěsnění gumového kofferdamu naneste vrstvu RUBBER-DAM LIQUID na hranici dásně a gumového kofferdamu. Přípravek 20-30 sekund vytvrzujte pomocí polymerační lampy. Proces vytvrzování provádějte rovnoměrně vykonáváním skenujícího pohybu. Následně přistupte k stomatologickému zákroku. Po zakončení zákroku polymerovaný RUBBER-DAM LIQUID pomocí nástroje na jednom konci nadzvedněte a odstraňte.

Okamžitě po použití stáhněte píst stříkačky a uzavřete obal originálním šroubovacím uzávěrem, aby nedocházelo k polymeraci přípravku.

Přípravek je určený k opakovanému použití, aplikátor však slouží jen k jednorázovému použití. Při opakovaném použití aplikátoru hrozí riziko sekundární kontaminace.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte přípravek u pacientů s přecitlivělostí na složky přípravku.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Nevytvrzený přípravek dráždí oči a kůži. V případě delšího kontaktu s kůží může působit senzitivně. V případě kontaktu s kůží okamžitě opláchněte vodou. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Po požití může působit škodlivě. Při požití nevyvolávejte zvracení, ústa vypláchněte vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě závažné události spojené s prostředkem je třeba ji nahlásit výrobci a příslušnému orgánu státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v originálním obalu při teplotě do 25°C. Chraňte proti působení slunečního záření. Po použití těsně uzavřete. Skladujte mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti je uvedena na obalu. Pokud je obsah balení po každém použití těsně uzavřen, nedochází ke změně doby jeho použitelnosti.

PREVOZ

Výrobce přípouští přepravu výrobku po dobu nepřekračující 10 dnů při teplotě nepřesahující 40°C. Krátkodobá přeprava v uvedeném rozsahu teplot neovlivňuje bezpečnost a účinnost výrobku po celou jeho dobu použitelnosti.

NAKLADÁNÍ S OBALY OD VÝROBKU

Použitý obal musíte odevzdat k likvidaci nebo vrátit výrobci.

OBAL

Stříkačka s obsahem 1,2 ml přípravku.

Datum poslední aktualizace: 29.01.2025/9