



Výrobce : Cerkamed Wojciech Pawlowski
ul . E.Kwiatkowskiego 1
37 - 450 Stalowa Wola
POLAND

ENDO - SOLUTION

ROZTOK K ROZŠÍŘENÍ KOŘENOVÝCH KANÁLKŮ

NÁVOD K POUŽITÍ:

K vysušení kořenového kanálku nakapejte 2-3 kapky roztoku ENDO-SOLution, zatímco na něm současně mechanicky pracujete po dobu 30 sekund. Vypláchněte fyziologickým solným roztokem. Několikrát opakujte. Doporučujeme používat ENDO-SOLution společně s chlornanem sodným (CHLORAXem).

UPOZORNĚNÍ:

Nepoužívejte u pacientů precitlivělých na složky výrobku. Buďte velmi opatrní při práci v kanálku blízko anatomického otvoru, neboť může dojít k perforaci kořene nástrojem. Uchovávejte mimo dosah dětí.

UCHOVÁVÁNÍ:

Uchovávejte v těsně uzavřeném obalu při pokojové teplotě (15-25°C).

Prázdné nebo nepoužité obaly předejte k recyklaci.

Datum expirace je uvedeno přímo na obale.

Nepoužívejte po datu expirace.

Po použití těsně uzavřete.

Dentalni
material
.cz