

Výrobce : Cerkamed Wojciech Pawlowski
ul . E.Kwiatkowskiego 1
37 - 450 Stalowa Wola
POLAND

ENDO-PREP gel PŘÍPRAVEK K ROZŠÍŘENÍ KOŘENOVÝCH KANÁLKŮ

SLOŽENÍ:

15% EDTA (kyselina ethylendiamintetraoctová), HEC, barvivo E131, čištěná voda, propandiol, polyethylenglykol

POUŽITÍ:

Přípravek se aplikuje při chemickém a mechanickém čištění a přípravě kořenových kanálků.

Použije-li se společně s chlornanem sodným, účinkuje jako bělidlo na změnu barvy zubů z důvodů nekrózy.

POPIS:

Přípravek obsahuje EDTA, která změkčuje tvrdou tkáň odstraněním vápenaté soli z kalcifikovaných kořenových kanálků. Umožňuje vyčistit a vytvarovat kořené kanálky rychleji a otevřít otvory k laterálním kanálkům. Díky lubrikantům přípravek usnadňuje zavedení nástroje do kořenového kanálku.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Izolujte ošetřovaný zub koferdamem. Vyplňte komoru zubu přípravkem nebo jej naneste přímo na kořenový nástroj. Mechanická práce na kanálku se provádí při současném vyplachování kanálku roztokem chlornanu sodného (např. Chloraxem).

UPOZORNĚNÍ!

Nedoporučujeme ponechávat přípravek v kanálku nebo komoře zubu mezi jednotlivými návštěvami zubaře, neboť to může vést k přílišnému změkčení dentinu.

UCHOVÁVÁNÍ:

Uchovávejte v těsně uzavřeném obalu, při teplotě 5-25 °C. Nevystavujte slunečnímu záření. Datum expirace je uvedeno přímo na obale.

Po otevření se datum expirace nemění, je-li nádoba po každém použití těsně uzavřena.

Použitý obal nebo látku s obalem vraťte výrobci nebo předejte autorizovanému odběrateli chemického odpadu.

PŘÍPRAVEK JE URČEN POUZE K DENTÁLNÍMU POUŽITÍ