

Výrobce : Cerkamed Wojciech Pawlowski
ul . E.Kwiatkowskiego 1
37 - 450 Stalowa Wola
POLAND

CALCIPAST

CALCIPAST

Pasta s hydroxidem vápenatým

BALENÍ:

2,1 g ve stříkačce

SLOŽENÍ:

hydroxid vápenatý (16%), síran barnatý (15%), hydroxylapatit (13%), propylenglykol

POUŽITÍ:

Výrobek CALCIPAST se používá při zubním ošetření jako materiál pro dočasnou výplň kořenového kanálku. Navíc lze výrobek CALCIPAST použít jako dočasnou výplň hlubokých kavit při přímém a nepřímém překrytí pulpy.

ÚČINEK:

Má remineralizační účinky na zubní tkáň díky vysokému obsahu hydroxidu vápenatého. Zlepšuje obnovu poškozených periapikálních tkání.
pH $\approx$ 12,5

NÁVOD K POUŽITÍ:

V kořenovém kanálku: přiloženým aplikátorem naneste pastu do kanálku, odstraňte přebytečnou pastu z kanálku a kavitu bezpečně uzavřete. V kavitě: naneste pastu na dno kavity, kavitu bezpečně uzavřete. Výplň ponechte v kavitě nebo v kořenovém kanálku po dobu jednoho týdne až 30 dnů.

UPOZORNĚNÍ:

Může způsobovat podráždění pokožky. Dráždí sliznici ústní dutiny. Při zasažení okamžitě vypláchněte vodou. Výrobek dráždí oči. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití nevyvolávejte zvracení. Vypijte velké množství vody. Vyhledejte lékařskou pomoc



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Při práci s výrobkem je nezbytné použít kofferdam. Používejte rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv.

KONTRAINDIKACE:

Nepoužívejte u pacientů přecitlivělých na složky výrobku.

UCHOVÁVÁNÍ:

Uchovávejte v těsně uzavřeném obalu, ve větrané místnosti, při teplotě nižší než 25°C. Nevystavujte slunečnímu záření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Datum expirace je uvedeno na etiketě výrobku.

PŘÍPRAVEK JE URČEN POUZE K DENTÁLNÍMU POUŽITÍ