

Výrobce : Cerkamed Wojciech Pawlowski  
ul . E.Kwiatkowskiego 1  
37 - 450 Stalowa Wola  
POLAND

## CALCIPAST FORTE

Pasta hydroxidu vápenatého s jodoformem a p-chlorofenolem

PŘED POUŽITÍM PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE

PRODUKT POUZE PRO DENTÁLNÍ POUŽITÍ

SLOŽENÍ:hydroxid vápenatý, jodoform, barium sulfát ( síran barnatý ), p-chlorofenol, kafr  
ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Produkt CALCIPAST FORTE se používá jako materiál pro dočasné výplně kořenových kanálků při ošetření zubů.

Zlepšuje obnovu poškozených periapikálních tkání, má vysušující vliv na výměšky v kořenových kanálkách.

Remineralizuje zubní sklovinu díky vysokému obsahu hydroxidu vápenatého. Výrobek zlepšuje obnovu poškozených periapikálních tkání. pH=8

POKYNY PRO POUŽITÍ

Umístěte přiložený aplikátor na injekční stříkačku s obsahem produktu.

Aplikujte přípravek do kořenového kanálku, odstraňte přebytek pasty z kanálku, bezpečně uzavřete dutinu.

Ponechte náplň v dutině nebo v kořenovém kanálku po dobu 1 týdne až 30 dnů.

Produkt je určený pro vícenásobné použití, ovšem s výjimkou aplikátoru, který je určen pouze k jednorázovému použití.

Častější použití aplikátoru může způsobit riziko infekce.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nepoužívejte CALCIPAST FORTE u pacientů se zvýšenou citlivostí na jakoukoli složku přípravku.

VAROVÁNÍ

Při polknutí zdraví škodlivý. Dráždí oči a pokožku.

Dráždí sliznici dutiny ústní. V případě kontaktu vypláchněte okamžitě dostatečným množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití vypijte dostatečné množství vody. Nevyvolávejte zvracení.

Vyhledejte lékařskou pomoc.

Při práci s produktem použijte rubber-dam. Je nezbytné použít ochranné rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v původním obalu při teplotě do 25 °C.

Udržujte mimo dosah dětí.

# Pracovní postup



[www.cerkamed.pl](http://www.cerkamed.pl)

Datum expirace je uvedeno na obale.

Jakmile je obal otevřen, datum expirace se nemění, i když je obsah po každém užití řádně zabezpečen.

Chraňte před slunečním svitem.

## ZACHÁZENÍ S OBALEM PRODUKTU

Prázdné obaly by měly být zlikvidovány zodpovědně.

## BALENÍ

Stříkačka s obsahem 2,1 g přípravku, jednorázové aplikátory