

## TOTALCEM

### NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

Samo leptací / samo adhezivní duálně tuhnoucí cement.

#### INDIKACE:

**TOTALCEM je trvalý pryskyřičný cement, který nevyžaduje leptání, primer a bond.** Samo tuhnoucí a světlem tuhnoucí. Systém "Automix" poskytuje rychlou, konzistentní a homogenní směs, která může být aplikována přímo do náhrad nebo zubní kavity.

**Vhodný pro fixaci korunek, můstků, čepů, inlayí a onlayí. Samoadhezivní na materiály: sklovina, dentin, kov, keramiku, zirkon, kompozita.**

#### VLASTNOSTI:

Vše v jednom – leptací složka + primer + bond + cement; vazebná síla na enamel: 20 MPa, na dentin: 15 MPa; duálně tuhnoucí (světlem a chemicky); extrémně tenká vrstva aplikace 10 mikrometrů; rentgenkontrastní 250% Al; může být použito na vitální zub; dlouhodobá barevná stálost; 2 odstíny k dispozici – A2 a Translucentní,

#### NÁVOD K POUŽITÍ:

- 1) Odstraňte dočasnou náhradu. **Poznámka:** Používejte pouze dočasné cementy, které neobsahují eugenol. Použitím dočasných materiálů obsahujících eugenol se totiž může zabránit polymeračnímu procesu produktu TOTALCEM.
- 2) Důkladně opláchněte.
- 3) Vzduchem vysušte preparaci – nepřesušte
- 4) Vyzkoušejte náhradu, abyste se ujistili, že dobře padne.
- 5) Před prvním použitím odvdůšněte stříkačku. Nasaďte míchací kanylu na stříkačku Automix.
- 6) **Vytlačení materiálu lze provést následovně:**
  - Inlay/Onlay** • Nasaďte dodanou intra-orální špičku na mísící kanylu a přímo vytlačte cement na celý požadovaný povrch. Jemně umístěte náhradu na preparaci, aby bylo umožněno cementu proudit ze všech stran.
  - Korunka** • Vytlačte cement přímo do náhrady, aby byl pokryt veškerý povrch. Vložte náhradu jemně na preparaci, aby cement vytekl ze všech okrajů.
  - Čep** • Nasaďte dodanou intra-orální XXF špičku na mísící kanylu. Vstříkněte cement do kanálku. Umístěte čep a mírně zavibrujte, aby se zamezilo možnosti tvorby vzduchových bublinek. Nechte cement pomalu proudit z kanálkového prostoru.
- 7) Je-li náhrada správně nasazena, odstraňte všechnen přebytečný cement. Přebytečný cement se nejlépe odstraňuje v gelovém stavu za pomoci pátradla. Gelového stavu může být dosaženo buď osvětlením přebytku po dobu 2 vteřin, nebo samo tuhnutím v délce 1,5-2 minuty po aplikaci. Pro dosažení co nejlepšího výsledku, nechejte náhradu či čep v klidu po dobu 1:30 minuty před svícením polymerační lampou.
- 8) **ČASOVÁNÍ:** • Pracovní doba je 2 minuty. • Čas tuhnutí v ústech je 3 minuty. • Polymerace LED jednotkou: 20 vteřin (viz doporučení výrobce). • Po osvětlení přebytečného cementu (2 vteřiny), vytvrdte světlem všechny povrchy včetně okrajů vždy po dobu 20 vteřin.
- 9) Použijte dokončovací pásky na proximální oblasti. Vyleštěte okraje disky, pohárky nebo špičkami.
- 10) Zkontrolujte okluzi (skus).

#### POZNÁMKA:

Kanyly Automix jsou určeny pouze k jednorázovému použití.

#### POZOR!

Neztuhlá met-akrylátová pryskyřice může způsobit kontaktní dermatitidu a poškození pulpy. Vyhněte se kontaktu s pokožkou, očima a měkkou tkání. Po kontaktu důkladně omyjte vodou.

#### SKLADOVÁNÍ:

Uchovávejte při teplotě do 24 °C (68 °F). Uchovejte v lednici pro maximální životnost. TOTALCEM se nedoporučuje používat po datu expirace vyznačeném na obalu.