

MD-Temp

Provizorní výplňový cement

Indikace:

Jako provizorní uzávěr kavity při pro výplně v dočasném i stálém chrupu během endodontického ošetření, pro překrytí léčebné, desinfekční nebo bělící vložky.

Kontraindikace:

Může dojít k alergickým reakcím u pacientů se známou přecitlivělostí na provizorní výplňové materiály nebo jejich složky. V případě reakce nepoužívat.

Způsob použití:

1. Vysušte dokonale preparovanou kavitu pomocí bavlněné peletky (nepřesušte).
2. Aplikujte odpovídající množství výplňového materiálu do připravené kavity pomocí patřičného nástroje.
3. Výplň vymodelujte odpovídajícím nástrojem a uzpůsobte ji skusovým poměrům pacienta.
4. Odstraňte přebytečný materiál a vytvořte peletkou okrajový uzávěr kavity.
5. Materiál tuhne 1 hodinu po aplikaci. Instruuje pacienta, aby po tuto dobu výplň nezatěžoval - zamezil tlaku na výplň či její abrazi.
6. Odstranění provizorní výplně lze pomocí použitím rotačního nástroje nebo příslušného ručního nástroje.

Upozornění:

Uzavřete nádobku ihned po každém použití.

Nemíchejte ani nekombinujte MD-Temp s jiným materiálem, přebytky nikdy nevracejte zpět do nádobky.

Skladování a expirace:

Uzavřenou dózu skladujte při pokojové teplotě na suchém místě.

Expirace 2 roky ode dne výroby - vyznačena na obalu

Výrobek je schválen pro prodej v zemích EU – CE-Certificate for MD, Annex II Directive for MD 93/42/EEC

Balení:

40g v uzavíratelné dóze

barva bílá nebo růžová

Výrobce:

META BIOMED Co., Ltd.

414-12, Mochoong-Dong, Cheongju City
Choong Chong Buk-Do 361-140, Korea

Dovozce:

JANDA-DENTAL s.r.o.

Osvoboditelů 1175, 440 01 Louny

Tel.: 415 653 201

Fax: 415 655 773

E-mail: info@janda-dental.cz