

Profylaktická pasta

Obsahuje: Obsahuje jedinečnou směs leštících a čistících látek. Profylaktická pasta je určena pouze pro profesionální použití a je určena k aplikaci při standardních hygienických procedurách v zubní ordinaci. Tento výrobek obsahuje fluorid v koncentraci 1,23 % fluoridových iontů.

Varování: Nadměrné požití fluoridu může způsobit nevolnost. Profylaktická pasta by se měla vykašlávat a NEMĚLA by se polykat. V případě těhotenství nebo kojení se před použitím poraďte s lékařem. Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě předávkování vyhledejte lékařskou pomoc nebo ihned kontaktujte toxikologické středisko.

Bezpečnostní opatření: Profylaktické pasty smí používat pouze osoby odborně vyškolené k provádění zubní profylaxe. Při použití použijte ochranné brýle a rukavice.

Doporučované aplikace:

Jemné: Jemné leštění a čištění. Doporučeno pro děti.

Střední: Doporučeno pro běžné leštění, čištění a odstraňování zubního plaku.

Hrubé: pro zubní kartáček, který je určen k čištění zubů: Středně silné až silné čištění a odstraňování zubního plaku.

X-hrubé: Pro odstranění silných skvrn a plaku.

Návod k použití:

Dávkování: Každý kelímek s jednotlivou dávkou obsahuje dostatečné množství profylaktické pasty pro jednu (1) profylaktickou proceduru.

Použijte jakoukoli komerčně dostupnou kombinaci profylaktického kolénka a gumového kalíšku. Pro naplnění kalíšku zatlačte čelní stranu kalíšku do pasty a zároveň používejte kolénko při nízkých otáčkách. Aby nedošlo k přehřátí povrchu zubu, udržujte v kalíšku dostatečné množství pasty po celou dobu procedury. Odvádějte sliny, abyste zabránili spolknutí a/nebo nadměrnému naředění pasty.

Skladování:

Skladujte výrobek na chladném a suchém místě. Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního světla.

Jakýkoli závažný incident, ke kterému dojde v souvislosti s tímto prostředkem, nahlase výrobci a příslušnému orgánu členského státu, kde je materiál používán.



keystone
industries

Keystone Industries
52 West King St.
Myerstown, PA 17067 USA
800.333.3131
keystoneindustries.com

EC REP

Keystone Europe BV
Batavenweg 7
5349 BC Oss Netherlands



Keystone Industries GmbH,
Stoekholzstr. 11, 78224 Slingen, Germany
+49 77 31 91 21 01

keystoneindustries.com/symbolglossary



Z400005 NATLAB-0442 Rev 3 10/2021

R^oOnly MD