



Riva coat

Světlem tuhnoucí ochranný materiál pro skloionomerní cementy
Návod na použití

Riva Coat chrání výplně ze skloionomerních cementů během prvních 24 hodin po jejich umístění před kontaminací slinami a vodou.

INDIKACE:

Výplně ze skloionomerních cementů, které po umístění vyžadují ošetření ochranným lakem.

KONTRAINDIKACE:

Ve vyjimečných případech může produkt způsobit podráždění kůže. V takovém případě přerušete ošetření a vyhledejte lékařskou pomoc.

PRACOVNÍ POSTUP:

1. Skloionomerní cement aplikujte podle návodu příslušného výrobce.
2. Jakmile materiál zatvrdne, naneste na celý povrch výplně Riva Coat ochranný lak.
3. Polymerizujte 20 sekund.
4. Lahvičku ihned po použití pečlivě uzavřete.

SKLADOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ:

Tento materiál reaguje na světlo. Otevřete lahvičku teprve těsně před aplikací.

Skladujte na tmném místě při teplotě 10° až 25°C.

Zpracovávejte při pokojové teplotě 20° až 25°C.

Doba expirace: 3 roky

UPOZORNĚNÍ:

Pouze pro použití ve stomatologii.

Chraňte před dětmi.

Pouze pro zevní použití.

Nepoužívejte po skončení data expirace.

Důležité: tento produkt může být používán pouze lékařem.

PRVNÍ POMOC:

Zasažení očí: důkladně vypláchněte vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc..

Zasažení kůže: zasažené místo setřete alkoholem, pak opláchněte čistou vodou.

Požítí: vypít velké množství vody nebo mléka. Při dalších potížích konzultovat s lékařem.

Vdechnutí: nejsou známy žádné symptomy.

BALENÍ:

5ml tekutiny v lahvičce

Výrobce

SDI Limited

Bayswater, Victoria 3153

Australia

www.sdi.com.au



Distributor pro ČR:

SCHAFFEROVÁ spol. s.r.o.

Andělská 29

779 00 Olomouc

Tel.:585 757 200 - 201

www.schafferova.cz

