

Conseal f, Conseal

NÁVOD K POUŽITÍ

Conseal f spojuje osvědčenou technologii těsnících materiálů spol. SDI s počátečním vývinem fluoridů a jejich dlouhodobým léčebným účinkem. Plnidlo u Conseal f je originální zejména směsí částic s velkým povrchem, které fluoridy snadno uvolňují. Conseal f je sealant nejnižší viskozitou. Tato vlastnost umožňuje rychlé a hluboké zatékání do rýh a jamek. Vynikající těsnicí vlastnosti a adheze ke stěnám vylučuje prostor pro růst bakterií. Adheze Conseal f se ještě zvyšuje nízkým smršťováním, které je charakteristické pro pryskyřice SDI.

Složení:

Conseal f (bílý): 93% multifunkční metakrylický ester; 7% anorganické plnivo

Conseal (čirý): 100% multifunkční metakrylický ester

Conseal (světle šedý): 91,5% multifunkční metakrylický ester; 8,5% anorganické plnivo

Leptadlo (tekutý gel): 37% kyselina fosforečná

Indikace: Conseal f a Conseal jsou určeny na spolehlivé utěsnění jamek a rýh

Postup:

Izolujte zub.

1. Leptání kyselinou.

a) Osušte povrch.

b) Naleptejte povrch 37% kyselinou fosforečnou Super etch LV nejméně po dobu 30 sekund, ale ne déle než 60 sekund.

2) Důkladně opláchněte vodou.

3) Dokonale vysušte.

4) Naneste Conseal f kartáčkem nebo stříkačkou.

5) Osvětlete Conseal f lampou po dobu 20 sekund.

Poznámka: suchý naleptaný povrch skloviny by měl být matně bílý. Pokud není nebo je znečištěn krví nebo slinami opakujte kroky 1-3.

POZOR: vždy se ujistěte, že objímka dávkovacího hrotu při dávkování Conseal f je pevně nasazena (našroubována) na stříkačku.

Poznámka: při prvním použití vytlačte malé množství gelu stranou, abyste se předem seznámili s jeho viskozitou.

Bezpečnostní pokyny:

Vyhnete se přímému kontaktu s tkáněmi a očima. V případě jakéhokoliv zasažení tkání, oplachujte velkým množstvím vody. V případě zasažení očí vyplachujte po dobu 15 min a vyhledejte lékařské ošetření.

Ukládejte mimo dosah dětí. Neužívejte vnitřně.

Skladujte při pokojové teplotě. Vždy pečlivě uzavřete.

Nepoužívejte po datu expirace.

Nevystavujte materiál přímému světlu.

Výrobce
SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia
www.sdi.com.au

 Schafferová

Distributor pro ČR:
SCHAFFEROVÁ spol. s r.o.
Andělská 29
779 00 Olomouc
Tel.: 585 757 200 - 201
www.schafferova.cz

PAK95043 G

Last Revised: 09-2011

CE
0297


10°-25°C
50°-77°F