

Návod k použití



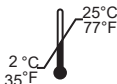
Vyrobeno v Austrálii
společností SDI Limited
3-15 Brunston Street
Bayswater, Victoria 3153
Australia

Australia 1 800 337 003
Austria 00800 0225 5734
Brazil 0800 770 1735
France 00800 0225 5734
Germany 0800 1005759
Italy 00800 0225 5734
Spain 00800 0225 5734
United Kingdom 00800 0225
5734 USA & Canada 1 800 222
5166 www.sdi.com.au

EC REP

SDI Germany GmbH
Hansestrasse 85
51149 Cologne
Germany
T+49 2203 9255 0

Rx

CE
0297

NÁVOD

Riva Star Aqua je přípravek nové generace bez amoniaku pro okamžitě zmiřnění citlivosti zubů.

POUŽITÍ

Odstranění přecitlivělosti zubních krčků.

KONTRAINDIKACE

- Nepoužívejte u pacientů podstupujících léčbu štítné žlázy, kteří mají v anamnéze alergii na chemické látky, jako jsou např. stříbro, fluorid, draslík a jód.
Poznámka: V případě pochybností se před použitím poraďte s lékařem nebo alergologem.

POSTUP:

- Pomocí nefluoridové profylaktické pasty v gumovém kalíšku vyčistíte ošetřovaný zub/zubů i sousední zuby.
- Vyhodnoťte stav zubů. Ošetřovat by se měly pouze zuby se zdravým dentinem a sklovinou.
- Izolujte ošetřovanou oblast pomocí vatových tamponů.
- Chraňte veškerou exponovanou daseň a rty vazelinou nebo kakaovým máslem a dbejte na to, aby nedošlo ke kontaminaci místa ošetření.
- Před otevřením uzávěru poklepejte dnem lahvičky na tvrdý povrch, aby se minimalizovalo vytékání tekutiny z hrotu kapátka.
- Riva Star Aqua Step 1:** Dávkujte jednu (1) kapku roztoku (**modrá** etiketa) na nesavou míchací podložku.
- Roztok pečlivě nanášejte pouze na místo ošetření, doporučuje se použít středně velký mikrokartáček, například Points (SDI Limited)...
- Riva Star Step 2:** Ihned poté naneste dvě (2) kapky roztoku (**zelená** etiketa) na novou nesavou míchací podložku.
- Na místo ošetření naneste dostatečné množství roztoku, doporučuje se použít středně velký mikrokartáček, například Points (SDI Limited). Stejný roztok aplikujte na všechny další povrchy zubů, které mohly přijít do kontaktu s roztokem Riva Star Aqua Step 1 (modrá etiketa). **Poznámka:** Ošetřovaný povrch se zpočátku jeví jako krémově bílý, aplikujte roztok Riva Star Step 2 (zelená etiketa), dokud se neodbarví.
- Osušte.
- Odstraňte z úst všechny použité ochranné a izolační materiály.
- Použité míchací podložky a kartáčky zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Skladujte na chladném místě (2°-25°C / 35°-77°F)

DÁVKOVÁNÍ

- Jedna (1) kapka přípravku Riva Star Aqua Step 1 a dvě (2) kapky přípravku Riva Star Step 2 mohou ošetřit až 5 zubů u jednoho pacienta.
- Omezte se na jednu (1) kapku Riva Star Aqua Step 1 a dvě (2) kapky Riva Star Step 2 na jednu návštěvu. V případě potřeby lze po 1 týdnu provést druhou aplikaci přípravku Riva Star Aqua.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Pouze pro odborné použití.
- Neprovádějte ošetření u těhotných a kojících žen.
- Pacient musí být před ošetřením informován o možném zbarvení zubu.
- Zabraňte kontaktu roztoku Riva Star Aqua Step 1 (modrá etiketa) s měkkými tkáněmi v ústech, s očima, kůží a oděvem. V případě náhodného kontaktu postupujte podle níže uvedené části „PRVNÍ POMOC“.
- Zabraňte kontaktu roztoku Riva Star Step 2 (zelená etiketa) s očima.
- Přípravkem neošetřujte zuby s měkkým dentinem, protože by mohlo dojít k zbarvení
- **Poznámka:** Pokud se vyskytnou zbarvená místa, lze zbarvení redukovat opatrným leštěním pemzovým práškem s kyselinou fosforečnou a následným překrytím samotvrdnoucím skloionomerním cementem (např. Riva Self Cure, SDI Limited).
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nepolykejte.
- Roztok Riva Star Aqua Step 1 (modrá etiketa) způsobuje zbarvení (viz „ŘEŠENÍ SKVRN“)
- Při manipulaci používejte rukavice a ochranu očí.
- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
- Upozornění: prodej pouze stomatologům nebo zubním lékařům
- Roztok Riva Star Step Aqua 1 (modrá etiketa) obsahuje 0,06 g/ml fluoridových iontů.
- Bezpečnostní list je k dispozici na www.sdi.com.au nebo kontaktujte zástupce firmy pro bezpečnost.

SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE

- Roztok z lahviček s modrou nebo zelenou etiketou nepoužívejte, dokud není připraven k použití.
- Uchovávejte na chladném a suchém místě při teplotě 2 až 25 °C (35 až 77°F).
- Používejte při pokojové teplotě 20 až 25 °C (68 - 77°F).
- Ihned po použití nasadte uzávěr na lahvičku a pevně ji uzavřete.

PRVNÍ POMOC

- **Při zasažení očí:** Držte víčka od sebe a oko vyplachujte tekoucí vodou. Pokračujte ve vyplachování podle doporučení toxikologického střediska nebo lékaře, minimálně však po dobu 15 minut. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.
- **Při potřísnění kůže a měkkých tkání úst:** Odstraňte kontaminovaný oděv, opláchněte oblast tekoucí vodou (v případě, že se vytvoří eschara, měla by vymizet do 24-48 hodin).
- **Při požití:** NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Podejte sklenici mléka nebo vody. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Výhradní dovozce pro Českou republiku

- **Při vdechnutí:** V případě postižení opusťte kontaminovanou oblast

ŘEŠENÍ SKVRN

- **Kůže:** V případě kontaktu pokožky s roztokem Riva Star Aqua Step 1 (modrá etiketa) aplikujte roztok Riva Star Step 2 (zelená etiketa) a jemně jej rozetřete. Skvrna pomalu vymizí. Pokud není aplikován roztok Riva Star Step 2, skvrna by měla po několika dnech postupně vymizet.
- **Oblečení:** Odstraňte kontaminovaný oděv, namočte jej přes noc do přípravku Napisan* (nebo jiného odstraňovače skvrn z textilii) a vyperte běžným způsobem.
- **Tvrdé povrchy:** Ihned použijte domácí chlorovou dezinfekci (chlornan sodný) a poté omyjte vodou. V případě odolných skvrn napusťte papírový ubrousek domácí chlorovou dezinfekcí a přiložte jej na zbarvené místo. Nechte působit přes noc a omyjte vodou.

Napisan* není registrovaná ochranná známka společnosti SDI Limited.

BALENÍ

Každá sada obsahuje:

- 1 x lahvička 1,5 ml Riva Star Aqua Step 1 (modrá etiketa).
- 1 x lahvička 3,0 ml Riva Star Step 2 (zelená etiketa).

Výrobek je chráněn US patenty.