

RIVA STAR

NÁVOD K POUŽITÍ (LAHVIČKA):

Riva Star je desenzitizér nové generace, který okamžitě zmírňuje citlivost zubů.

INDIKACE PRO POUŽITÍ:

Desenzibilizace hypersenzitivity cervikální oblasti zubu.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u pacientů podstupujících léčbu štítné žlázy, kteří mají v anamnéze alergii na chemické látky, jako jsou stříbro, fluorid, draslík, jód a amoniak. **Poznámka:** V případě pochybností se před použitím poraďte s lékařem nebo odborníkem na alergie.

POSTUP:

1. Použijte profylaktickou pastu neobsahující fluorid, která je umístěná v gumovém pohárku, a očistěte zuby, které se budou ošetřovat, a sousední zuby.
2. Proveďte posouzení stavu zubů. Ošetřit by se měly být pouze zuby se zdravým dentinem a sklovinou.
3. Osušte oblast, která se bude ošetřovat, a izolujte ji pomocí kofferdamu nebo světlem vytvrditelné gingivální bariéry (SDI Limited).
4. Všechny exponované gingivální tkáně a rty chraňte vazelínou / kakaovým máslem a dávejte pozor, aby nedošlo ke kontaminaci ošetřovaného místa. Pokud nepoužíváte kofferdam, oblast izolujte vatovými válečky.
5. Před otevřením napíchněte každou lahvičku na pracovním stole. Díky tomu můžete minimalizovat případné předčasné ukápnutí tekutiny.
6. **Riva Star Step 1:** Naneste jednu (1) kapku roztoku (**šedá** etiketa) na neabsorpční míchací podložku.
7. Roztok opatrně nanášejte pouze na ošetřované místo; doporučuje se středně velký mikrokartáček, například Points (SDI Limited).
8. **Riva Star Step 2:** Ihned poté naneste dvě (2) kapky roztoku (**zelená** etiketa) na nepoužitou neabsorpční míchací podložku.
9. Na ošetřované místo naneste velké množství roztoku; doporučuje se středně velký mikrokartáček, například Points (SDI Limited). Stejný roztok naneste na všechny ostatní povrchy zubů, které mohly přijít do kontaktu s roztokem ze šedé lahvičky. **Poznámka:** Ošetřovaný povrch zpočátku vypadá krémově bílý. Pokračujte v aplikaci roztoku Riva Star Step 2 (**zelená** etiketa), dokud nebude průzračný.
10. Proveďte vysušení.
11. Odstraňte všechny ochranné/izolační materiály použité v ústech.
12. Použité podložky a kartáčky zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

DÁVKOVÁNÍ:

- Jedna (1) kapka Riva Star Step 1 a dvě (2) kapky Riva Star Step 2 se mohou použít k ošetření až 5 zubů jednoho pacienta.
- Limit na jednu návštěvu je jedna (1) kapka Riva Star Step 1 a dvě (2) kapky Riva Star Step 2. V případě potřeby lze po 1 týdnu aplikovat druhou dávku Riva Star.

UPOZORNĚNÍ:

- Pouze pro profesionální použití.
- Léčbu neopakujte u těhotných nebo kojících žen.
- Kvůli možnému výskytu skvrn se doporučuje neošetřovat přední zuby.
- Zamezte kontaktu roztoku z Riva Star Step 1 (**šedá** etiketa) s měkkými tkáněmi v ústech, očima, kůží a oblečením. Pokud dojde k náhodnému kontaktu, postupujte podle sekce „PRVNÍ POMOC“ uvedené níže.
- Zamezte kontaktu roztoku z lahvičky Riva Star Step 2 (**zelená** etiketa) s očima.
- Neznecitlivujte zuby s měkkým dentinem, protože by mohlo dojít ke vzniku skvrn. **Poznámka:** Pokud k tomu dojde, lze místa, která obsahují skvrny, vyčistit přiměřeným leštěním pemzou impregnovanou kyselinou fosforečnou a poté zakrýt samovytvrzovacím skloionomerním cementem (jako je Riva Self-Cure, SDI Limited).
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Výrobek nepožívejte.

- Roztok Riva Star Step 1 (**šedá** etiketa) způsobí skvrny (viz „MANIPULACE SE SKVRNAMI“).
- Při manipulaci noste rukavice a ochranu očí.
- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
- Upozornění: Zákon omezuje prodej tohoto zařízení. Toto zařízení smí být prodáváno pouze zubním lékařem nebo na jeho příkaz."
- Roztok Riva Star Step 1 (**šedá** etiketa) obsahuje 0,06 g/ml fluoridových iontů.
- SDS (Bezpečnostní datové listy) jsou k dispozici na www.sdi.com.au nebo kontaktujte svého zástupce SDI.

SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE:

- Lahvičky skladujte ve svislé poloze v dodaném obalu.
- Uchovávejte při pokojové teplotě mezi 20 °C a 25 °C (68 °F a 77 °F).
- Výrobky neuchovávejte v chladničce
- Roztok z lahvičky se **šedou** ani **zelenou** etiketou nenanášejte, dokud nebude připraven k použití.
- Ihned po použití nasadte víčko zpět na lahvičku a pevně uzavřete.

PRVNÍ POMOC:

- **Oči (kontakt):** Roztáhněte oční víčka a oči kontinuálně proplachujte tekoucí vodou. Pokračujte ve vyplachování, dokud vám Toxikologické informační středisko (Austrálie, 131 126) nebo lékař neřeknou, abyste přestali, nebo po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.
- **Pokožka / měkká tkáň v ústech (kontakt):** Odstraňte kontaminovaný oděv, zasažené místo opláchněte tekoucí vodou (v případě, že se vytvoří strup, měl by zmizet do 24–48 hodin).
- **Požítí:** Pokud k němu dojde, NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Podejte sklenici mléka nebo vody. Pro radu se obraťte na Informační centrum pro jedy nebo na lékaře.
- **Vdechnutí:** Pokud k němu dojde, odneste/odvedte postiženou osobu z kontaminované oblasti.

MANIPULACE SE SKVRNAMI

- **Pokožka:** V případě kontaktu Riva Star Step 1 s pokožkou (šedá etiketa) postižené místo jemně potřete přípravkem Riva Star Step 2 (zelená etiketa). Skvrna pomalu zmizí. Pokud se ale Step 2 nepoužije, skvrna by měla po několika dnech postupně zmizet.
- **Oblečení:** Odstraňte kontaminovaný oděv a namočte ho přes noc do přípravku Napisan* (nebo jiného prostředku na odstraňování skvrn z textilu) a poté ho vyperte běžným způsobem.
- **Tvrdé povrchy:** Okamžitě aplikujte bělidlo k domácímu použití (chlornan sodný) a poté setřete vodou. V případě odolných skvrn napusťte papírový ubrousek bělidlem k domácímu použití a položte ho na postiženou oblast. Nechte působit přes noc a setřete vodou.

Napisan* není registrovanou ochrannou známkou společnosti SDI Limited.

BALENÍ:

Sada obsahuje

- 1 x Riva Star Step 1 (**šedá** etiketa) lahvička 1,5 ml
- 1 x Riva Star Step 2 (**zelená** etiketa) lahvička 3 ml

Výrobce
SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Austrálie
www.sdi.com.au



Distributor pro ČR:
Schafferová s.r.o.
Andělská 29
779 00 Olomouc
Tel.:585 757 200 - 201
www.schafferova.cz