

SDI

SUPER ETCH, SUPER ETCH LV

Návod k použití



super etch je 37% kyselina fosforečná k leptání skloviny a dentinu. **super etch** je ve stříkačkách, aby se dal snáze použít v těžko dosažitelných místech. Částice anorganického plnivá se dají beze zbytku opláchnout. **super etch LV** je určen pro sealenty. Má nízkou viskozitu a je určen pro leptání jamek a rýh. Průměr vyměnitelné koncovky je pouze 0,41 mm a dostanete se s ní i do těch nejmenších jamek a rýh, což je výhoda oproti konkurenčním produktům.

POSTUP:

Izolujte zub a vypreparujte kavitu. Důkladně opláchněte vodou! Vysušte dokonale povrch.

Upozornění: Vždy se ujistěte, že objímka dávkovacího hrotu při dávkování **super etch** je pevně nasazena (našroubována) na stříkačku.

Koncovku je možné libovolně ohnout, u **super etch** je již ohnutá z výroby. Přibližte konec na místo a pomalu vytlačte gel.

Poznámka: Při prvním použití vytlačte malé množství gelu stranou, abyste se předem seznámili s jeho viskozitou.

1. Naleptejte sklovinu po dobu 30 sekund, dentin po dobu 20 sekund.
2. Opláchněte důkladně vodou (5–10 sekund).
3. Odstraňte přebytečnou vodu.
4. Naneste bond, např. stae, nebo sealant na jamky a rýhy jako je conseal f, případně jiný materiál dle doporučení výrobce.

Bezpečnostní pokyny:

Vyhnete se přímému kontaktu s tkáněmi a očima. V případě jakéhokoliv zasažení tkání, oplachujte velkým množstvím vody. V případě zasažení očí vyplachujte po dobu 15 min a vyhledejte lékařské ošetření.

Ukládejte mimo dosah dětí. Neužívejte vnitřně. Skladujte při pokojové teplotě. Vždy pečlivě uzavírejte. Nepoužívejte po datu expirace. Nevystavujte materiál přímému světlu.



Vyrobeno v Austrálii
společností SDI Limited
3-15 Brunson Street
Bayswater, Victoria 3153
Australia


Australia 1 800 337 003
Austria 00800 0225 5734
Brazil 0800 770 1735
France 00800 0225 5734
Germany 0800 1005759
Italy 00800 0225 5734
Spain 00800 0225 5734
United Kingdom 00800 0225 5734
USA & Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au

EC REP

SDI Germany GmbH
Hansestrasse 85
51149 Cologne
Germany
T+49 2203 9255 0



Precautions

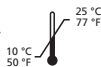

CE
0297

Výhradní dovozce pro Českou republiku



Schafferová

Váš spolehlivý partner