




EDENTA AG, Hauptstrasse 7, CH-9434 AU/SG – **Switzerland**
Tel.: +41 71 747 25 25 Fax: +41 71 747 25 50 e-mail: info@edenta.ch

EDENTA Etabl., Industriestr. 13, FL-9486 Schaanwald – **Liechtenstein**
Tel.: +423 375 20 50 Fax: +423 375 20 55 e-mail: info@edenta.com

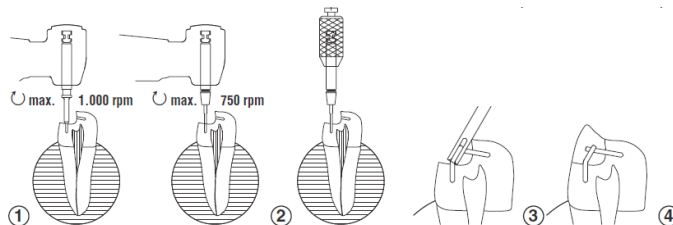

Návod k použití:

Retenční šroubovací čep pro dostavbu ulomených zubů, pro náhrady z amalgámu, kompozitu a korunky.

1. Vyberte si ve zdravé sklovině bez kazu vhodné místo k vrtání, vyvarujte se poškození pulpy a tkáně pokrývající kořen zubu. Pomocí frézy proveďte jedno navrtání až do mezní hloubky a frézu vyjměte. Maximální otáčky 1000 ot./min.
 2. Vložte retenční šroubovací čep do otvoru ve správném úhlu a našroubujte ho při otáčkách cca 750 ot./min. Když se čep dostane na konec vyvrtaného otvoru, automaticky se zlomí přesně na určeném místě. U těžko dostupných míst nebo v případě slabé skloviny doporučujeme zavádět čep ručně pomocí modrého nástroje v balení.
 3. Je-li k ukotvení zubní výplně potřeba více čepů, postup opakujte. V některých případech může být nutné čep pro určité konstrukce ohnout. Čep Reto-minipin nelze ohnout.
 4. Před nanesením kompozitní vrstvy doporučujeme pokrýt čep barvou zubu či bílou barvou.
- Díky čepům Retopin a Minipin lze použít opakovaně. Stačí do nich našroubovat nový čep z balení. Zbytek předchozí čepu musí být z dířku odstraněn, ven ho dostanete otáčením.

Bezpečnostní pokyny:

- V každém případě se vyhněte oblasti v blízkosti pulpy!
- PŘED použitím musí být nástroj sterilizován!
- Dodržujte obecná hygienická pravidla!
- Dodržujte přibližnou vzdálenost 1 mm od skloviny.
- Použijte vhodný nástroj pro ohýbání.
- V případě krytí kompozitem použijte krycí lak.

Poznámky/Skladování:

Skladujte v suchu, chraňte proti kontaminaci.

Chraňte před působením chemických látek, kyselin, před teplem a extrémními výkyvy teplot.

Sterilizace:

V autoklávu, při 134 °C / 274 °F, 2,1 bar, 5 minut.

Podrobná doporučení k použití jsou v souladu s normou DIN EN ISO 17664 www.edenta.com