

Anchorage Posts

Návod k použití

106832-2017-08-21



DIRECTA AB

P.O. Box 723, Finvids väg 8
SE-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Tel: +46 8 506 505 75

CE
2460

DIRECTA
directadental.com

Čepy se používají pro zajištění retence mrtvých zubů, kde byly kořenové kanálky endodonticky ošetřeny. Pozlacené čepy není možno jakkoliv zkracovat či tvarovat, došlo by k otěru ochranné zlaté vrstvy a toto by vedlo ke korozi čepů. Titanové nebo nerezové čepy tímto nejsou ovlivněny. Je velmi důležité, aby kořenový kanálek byl preparován reamerem do potřebné velikosti a tvaru dle použitého čepu. Při použití reameru začněte menším nástrojem než je požadovaný průměr a postupujte krok po kroku dokud není dosažen požadovaného průměru. Reamery jsou číslovány 1 - 6. Je třeba je používat v průměrných otáčkách a velmi opatrným posuvným pohybem. Nebudete-li dbát těchto upozornění, může dojít k zalomení nebo zaháknutí v kořenovém kanálku. Nikdy při aplikaci čepu nepoužívejte sílu, mohli byste kořen zlomit. Pro úpravu retence čepu použijte vhodný cement. Čepy je možno používat "Lege Artis" s profesionálním úsudkem. Čepy a reamery je možno sterilizovat všemi metodami. Sterilizace je doporučena mezi dvěma zákroky.