



EDENTA AG, Hauptstrasse 7, CH-9434 AU/SG – Switzerland
Tel.: +41 71 747 25 25 Fax: +41 71 747 25 50 e-mail: info@edenta.ch
EDENTA Etabl., Industriestr. 13, FL-9486 Schaanwald – Liechtenstein
Tel.: +423 375 20 50 Fax: +423 375 20 55 e-mail: info@edenta.com

Návod k použití pro endodontické nástroje:

Při ručním opracování použijte bezpečnostní řetízek pro zajištění kořenových nástrojů nebo pracujte s koferdamem. Při použití endodontických nástrojů pro ruční opracování v kolénku (giromatické kolénko) dodržujte pokyny výrobce.

Peeso, č. 183.15... a 183.19...:

Použití v zeleném kolénku při 800–1200 ot./min.

Gates, č. 180.15... a 180.19...:

Použití v zeleném kolénku při 450–800 ot./min.

Nervové jehly, č. 9107...:

Vložte jehlu do kořenového kanálku a otáčejte s ní o 180°–360° tak, abyste vyjmuli dřeň.

K-Reamer, č. 171...:

Otáčejte nástrojem o max. 90° po směru hodinových ručiček za současného dopředného tlaku.

K-Files, č. 173...:

Používejte pilovací pohyby současně s rotačními pohyby, otáčejte nástrojem o max. 45° po směru hodinových ručiček.

Hedström, č. 174...:

Abyste nástroje pro ruční opracování nezkrřivili, pohybujte jimi pouze vpřed a vzad.

Kořenové plniče, č. 178... a 178S...:

Použijte zelené kolénko. Naberte do spirálky (lentule) pečetidlo kořenového kanálku a umístěte ji co nehlouběji do kořenového kanálku, v tuto chvíli není násadec mikromotoru zapnutý. Otáčejte spirálkou při nízkých otáčkách (cca 800 ot./min.) a pomalu ji z kanálku vyjímajte. Pečetidlo zůstane v kanálku. U výrobku č. 178S..., plniče s bezpečnostní spirálkou, je vkládání nástroje do kořenového kanálku flexibilní.

Použití nástrojů v kolénku:

Při použití nástroje v kolénku vždy pozorně dodržujte pokyny výrobce. Při nesprávném postupu se může nástroj snadno zlomit.

Barevné značení nástrojů:

Nástroje pro ruční opracování mají barevné kódy pro rozeznání jejich velikosti a standardního použití. Nástroje jsou dále označeny symbolem a velikostí. U nervových jehel jsou dle velikosti barevně označeny plastové úchyty. Plniče se spirálkou mají barevný kroužek na kovovém dřívku.

Hygienická údržba a skladování nástrojů:

Před prvním použitím a okamžitě po použití v ústech pacienta nástroj vždy zcela ponořte do dezinfekčního a čisticího přípravku (přípravky musí být schváleny VAH/DGHM či FDA, musí na nich být jasné označení CE). (Vždy dodržujte pokyny výrobce ohledně míchacího poměru a doby působení dezinfekčního prostředku. Nepoužívejte dezinfekční prostředky s obsahem fenolu.) Opláchněte nástroj pod tekoucí vodou a zkontrolujte, zda na něm nezůstaly nečistoty. V případě potřeby nástroj znovu omyjte a vysušte ho.

Sterilizace:

Sterilizujte nástroje v autoklávu při 134 °C po dobu 5 minut nebo dle pokynů výrobce přístroje. Postup musí být v souladu s normou DIN EN 285 (obaly pro sterilní výrobky dle normy DIN EN ISO 11607/DIN EN 868-2ff). Dodržujte pokyny Ústavu Roberta Kocha (Hygienické požadavky ve stomatologii), platné právní předpisy a hygienické normy v příslušném státě.

Podrobná doporučení k použití jsou v souladu s normou DIN EN ISO 17664  www.edenta.com

Skladování:

Uchovávejte v suchu, chraňte proti kontaminaci.