



# Návod k použití

**REF 5970**

Obsah:

Fiber-Splint, 5 Clip&Splint aplikační spony

**Fiber-Splint, tenká sklo-vláknitá páska určená pro:**

- periodonticky uvolněné zuby
- post-traumatické uvolnění
- chirurgická reimplantace
- zesílení dočasných můstků
- ortodontická stabilizace a další

CE 0120



For professional  
use only

Made in Switzerland

**POLYDENTIA**<sup>SA</sup>  
Swiss Products for Fine Dentistry




6805 Mezzovico-Vira • Switzerland

Tel.: +41 (0)91 946 29 48

Fax: +41 (0)91 946 32 03

marketing@polydentia.ch

www.polydentia.ch/en/

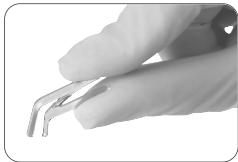

CZ

Dokonalá adaptace v mezizubních prostorách  
s použitím Clip&Splint aplikačních spon.




# Fiber-Splint



## Materiální a fundamentální aspekty pro dlahování zubů se sklo-vláknitými páskami

Na tento systém platí všeobecná pravidla dlahování zubů s použitím kompozita a leptací techniky. Mimo to, každý dlahovaný zub, musí mít dostatek skloviny pro leptání, včetně aproximálních povrchů. Jakákoliv mezizubní výplň nebo kavita zde již přítomná může být s opatrností překryta. Je třeba následující materiál: ruber dam, 37% leptací gel kyseliny fosforečné, bond sklovina-dentin (doporučujeme Fiber-Bond, nepoužívejte samoleptací činidla), zatékavé kompozitum, Fiber-Spline a naše Clip&Splint aplikační spony.

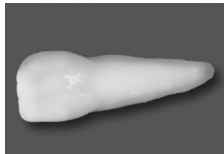

## Další indikace použití:

Výroba akutních restorací po extrakci jednotlivého periodonticky uvolněného předního zubu.


Post-traumatické dlahování pro stabilizaci zubu.






### Klinická technika

1. Po UZV vyčištění očistěte stabilizovaný zub leštící pastou bez obsahu fluoru. Umístěte ruber dam. Leptejte palatální/linguální a aproximální povrchy dotčeného zubu, poté opláchněte a osušte vzduchem. Na leptané povrchy aplikujte sklovina-dentin bond, mírně ofoukněte. V případě, že je stabilizovaný zub příliš uvolněný, nejdříve jej interproximálně zabezpečte bondem/kompozitem, aby držel na místě.

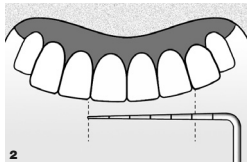


2. Nařežte 6 pásků Fiber-Splint potřebné délky.

3. Na skleněné podložce nasákněte první pásek bondem, ponechte bond vstřebat: zbylý bond otřete.

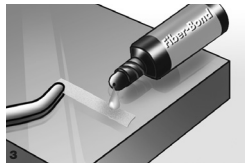

4. Na naleptaný a bondovaný povrch aplikujte první nasáknutý pásek a uchyťte na místo v mezizubním prostoru pomocí Clip&Splint aplikačních spon. Dbejte na to, aby mezi páskou a zubem nebyly žádné vzduchové bublinky.

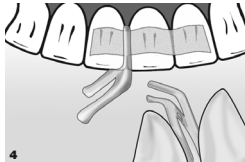



5. Konce pásku zatlačte proti zubu pinzetou a polymerujte 30-40 vteřin/zub. Stejně aplikujte zbylých 6 pásků a polymerujte (pro rychlejší aplikaci použijte Fiber-Splint ML Multi-Layer, skládající se ze 6ti vrstev Fiber-Splint již spojených dohromady nebo F-Splint-Aid, již napuštěné bondem). Na závěr můžete labiálně aplikovat malé kousky sklo-vláknitého materiálu, abyste zesílili mezizubní můstky.



6. Jakékoliv drsná místa vyhladte aplikací tenké vrstvy zatékavého kompozita. Polymerujte, dokončete a vyleštěte leštídlem na kompozita a diskem. Okolní oblasti fluoridujte a odstraňte ruber dam. Zkontrolujte okluzi.

**DŮLEŽITÉ:** Upozorněte pacienta na řádné čištění a profylaxi.

**Fiber-Splint:** aplikátor s páskou (4mm širokou), 5 Clip&Splint aplikačních spon REF 5970

**Fiber-Splint Ortho Evolution:** aplikátor s 60cm páskou (2 mm wide), 5 Clip&Splint aplikačních spon REF 5979

**Fiber-Splint ML Multi-Layer:** 6 vrstev sešitých dohromady: rychlejší, snadnější. aplikátor s 50 cm páskou (4 mm širokou), 5 Clip&Splint aplikačních spon REF 5971

**F-Splint-Aid:** Fiber-Splint ML Multi-Layer páska (4 mm široká, 12 cm dlouhá) impregnována Fiber-Bond + 5 Clip&Splint aplikačních spon REF 5972

**F-Splint-Aid Slim:** Fiber-Splint ML Multi-Layer páska (2 mm široká, 12 cm dlouhá) impregnována Fiber-Bond + 5 Clip&Splint aplikačních spon REF 5977

**Clip&Splint:** aplikační spony, 30 ks REF 5975CS

**Fiber-Bond:** 2 lahvičky 3 ml každá REF 5973

**POLYDENTIA** SA  
+ Swiss Products for Fine Dentistry



Made in Switzerland

 POLYDENTIA SA • Swiss Products for Fine Dentistry  
6805 Mezzovico-Vira • Switzerland

**Phone** +41 (0)91 946 29 48 • **Fax** +41 (0)91 946 32 03

**Web** [www.polydentia.ch/en/](http://www.polydentia.ch/en/) • **E-mail** [marketing@polydentia.ch](mailto:marketing@polydentia.ch)