

Návod na čištění a sterilizaci kroužků GARRISON

ZÁKLADNÍ PRINCIPY

- Všechny produkty společnosti Garrison Dental jsou baleny jako nesterilní a je třeba je před použitím dostatečně očistit a vysterilizovat.
- Ujistěte se, že matricový systém je používán a dezinfikován v souladu s návodem výrobce.
- Kroužky by měly být očištěny ihned po použití, aby se zabránilo ztvrdnutí materiálu na měkkém silikonu kroužků 3DX a 3D.

ČIŠTĚNÍ

- Před sterilizací odstraňte všechny viditelné nečistoty, které ulpěly na kroužcích po použití.
- Pro očištění použijte nylonový kartáček nebo obdobný měkký kartáček. Pro kroužky 3D500, 3D600 a 3DXR je velice podstatné zabránit poškození měkkého silikonu Soft-Face během čištění.
- Nepovinně můžete vložit kontaminované kroužky do přípravku IMS® Daily Clean*, dle instrukcí výrobce na maximálně 6 minut, abyste napomohli manuálnímu čištění.
- **Důležité: NEVYSTAVUJTE matricové kroužky roztokům obsahujícím chemikálie jako alkohol, aceton, keton, žíraviny nebo jiným agresivním chemickým látkám.**
- Nevkládejte kroužky do dezinfekčních roztoků pro dezinfekci nástrojů a vrtáčků. Tyto roztoky obsahují látky poškozující silikon.
- Nevkládejte kroužky do ultrazvukové dezinfekce.
- Vizuálně zkontrolujte produkt kvůli možnému poškození (rez či prasklinky). Vyřadte produkt, je-li poškozen. Pokud zůstávají zbytky nečistot po vyčištění, opakujte znovu uvedený postup.

STERILIZACE

- Sterilizujte produkt pouze v parním autoklávu a uchovávejte ve sterilizačních obalech opatřených certifikátem CE.
- Použijte jeden cyklus při 132 stupních Celsia a 210 kPa na 6 minut dle pokynů výrobce autoklávu, čas pro sušení 20-30 minut.
- Nepřesáhněte teplotu 137 stupňů Celsia.
- NEPOUŽÍVEJTE chemické sterilizační techniky – vede ke znehodnocení produktu.

