



Návod k použití: Ribbond® bondovací dlahovací páska



Original Ribbond, Ribbond-THM, Ribbond Ultra-THM, Ribbond-Triaxial

Obsah:

Ribbond starter kit obsahuje:

Ribbond® bondovací dlahovací páska, nůžky a příslušenství.
Ribbond nůžky jsou určeny pouze pro střihání Ribbond pásy.

Ribbond refill kit obsahuje:

Ribbond® bondovací dlahovací páska a příslušenství

Použití: Ribbond dlahuje dentální pryskyřice

Manipulace: Před aplikací pryskyřice se nedotýkejte Ribbond rukama nebo latexovými rukavicemi. Manipulujte s Ribbond pomocí kleští, pinzetou nebo bavlněnými rukavicemi.

Po aplikaci pryskyřice manipulujte s Ribbond jako s pryskyřicí (nepudrované nástroje nebo rukavice).

Bondování Ribbond na kompozitum: Navlhčete Ribbond nenaplněnou bondovací pryskyřicí. Vložte Ribbond do nevytvrzeného kompozita.

Bondování Ribbond k akrylátu: Navlhčete Ribbond volnou směsí tekutiny a prášku. Vložte Ribbond do nevytvrzeného akrylátu.

Leštění: Nelešti se. Pokryjte Ribbond naplněným kompozitem nebo akrylátem.

Pouze pro profesionální použití.

Ribbond® bondovací dlahovací páska

Made in the USA

U.S. Patent 9,138,298. Foreign Patents Pending
European Patent 0 513 236 CH/LI DE ES FR GB IT NL



Ribbond Inc.
1402 Third Ave. Suite 1030
Seattle, WA 98101 USA
Tele: 206-340-8870, Fax: 206-382-9354
www.ribbonbond.com



European Representative:
Sigma Dental Systems
Heideland 22
D-24976 Handewitt
Germany



Návod k použití: Ribbond® bondovací dlahovací páska



Original Ribbond, Ribbond-THM, Ribbond Ultra-THM, Ribbond-Triaxial

Obsah:

Ribbond starter kit obsahuje:

Ribbond® bondovací dlahovací páska, nůžky a příslušenství.
Ribbond nůžky jsou určeny pouze pro střihání Ribbond pásy.

Ribbond refill kit obsahuje:

Ribbond® bondovací dlahovací páska a příslušenství

Použití: Ribbond dlahuje dentální pryskyřice

Manipulace: Před aplikací pryskyřice se nedotýkejte Ribbond rukama nebo latexovými rukavicemi. Manipulujte s Ribbond pomocí kleští, pinzetou nebo bavlněnými rukavicemi.

Po aplikaci pryskyřice manipulujte s Ribbond jako s pryskyřicí (nepudrované nástroje nebo rukavice).

Bondování Ribbond na kompozitum: Navlhčete Ribbond nenaplněnou bondovací pryskyřicí. Vložte Ribbond do nevytvrzeného kompozita.

Bondování Ribbond k akrylátu: Navlhčete Ribbond volnou směsí tekutiny a prášku. Vložte Ribbond do nevytvrzeného akrylátu.

Leštění: Nelešti se. Pokryjte Ribbond naplněným kompozitem nebo akrylátem.

Pouze pro profesionální použití.

Ribbond® bondovací dlahovací páska

Made in the USA

U.S. Patent 9,138,298. Foreign Patents Pending
European Patent 0 513 236 CH/LI DE ES FR GB IT NL



Ribbond Inc.
1402 Third Ave. Suite 1030
Seattle, WA 98101 USA
Tele: 206-340-8870, Fax: 206-382-9354
www.ribbonbond.com



European Representative:
Sigma Dental Systems
Heideland 22
D-24976 Handewitt
Germany