

Endostar Endosizer Návod k čištění, dezinfekci a sterilizaci

Nástroj je dodáván nesterilní. Před prvním použitím a po každém dalším použití musí být vyčištěn, dezinfikován a sterilizován podle níže uvedených pokynů.

1. Doporučení

- Nástroje lze dezinfikovat jemnými dezinfekčními prostředky ve spreji nebo pění.
- Dezinfekční prostředky musí být vhodné pro dezinfekci nástrojů z plastů a nesmí obsahovat aldehydy, fenol, antikoroziční látky (zejména di- nebo trietanolaminy), oxidační činidla (peroxid vodíku, chlornan sodný nad 5 %) ani rozpouštědla.
- Pro vlastní bezpečnost používejte osobní ochranné prostředky, např. rukavice, ochranné brýle, masku nebo obličejový štít.

2. Upozornění

- Při používání chemických roztoků k namáčení vždy postupujte podle pokynů výrobce přípravku.
- Nadměrná koncentrace roztoku a příliš dlouhá doba namáčení (v rozporu s pokyny výrobce) mohou způsobit poškození nástroje.
- Nikdy nevystavujte nástroj teplotě vyšší než 142 °C (288 °F). Ujistěte se, že nástroj není v autoklávu umístěn příliš blízko stěn nebo dna parního sterilizátoru (riziko nadměrné teploty a deformace).

NÁVOD K ČIŠTĚNÍ, DEZINFEKCI A STERILIZACI NÁSTROJE

1. Dezinfekce Nástroj ihned po použití namočte nebo naneste dezinfekční přípravek pomocí rozprašovací trysky. Vyhněte se dlouhodobému namáčení.

2. Oplach Důkladně opláchněte pod tekoucí vodou z vodovodu. Voda by měla mít pokojovou teplotu.

3. Mytí Jemně očistěte všechny povrchy nástroje ponořením do vody s přidavkem detergentu. Používejte pouze měkké kartáčky z nylonu, polypropylenu nebo akrylu. Po vyčištění nástroj několikrát opláchněte v čisté vodě, nejlépe čerstvě převařené, dokud nezmizí pěna. K poslednímu oplachu použijte destilovanou vodu. Povrchy nástroje musí být viditelně čisté a bez skvrn.

4. Oplach Nástroj důkladně opláchněte demineralizovanou vodou. Voda by měla mít pokojovou teplotu.

5. Sušení Sušte pomocí **bezzlátkové utěrky**. Nástroj sušte, dokud nejsou patrné žádné stopy vlhkosti. Před balením musí být nástroje zcela suché.

6. Balení Umístěte nástroje do papírovo-fóliových sterilizačních sáčků vhodných pro parní sterilizaci.

7. Sterilizace Umístěte sáčky do sterilizátoru v souladu s pokyny výrobce sterilizátoru. Při sterilizaci více nástrojů v jednom cyklu autoklávu se ujistěte, že není překročeno maximální zatížení sterilizátoru. Doporučuje se parní sterilizace v autoklávu s použitím předvakuového

cyklu. Doporučené parametry sterilizace jsou: 134 °C po dobu nejméně 4 minut při přetlaku 2,1 bar nebo 121 °C po dobu nejméně 20 minut.

- Je nutné kontrolovat účinnost a kritéria přijetí sterilizačního procesu.
- Je třeba uchovávat záznamy o procesu a stanovit dobu použitelnosti v souladu s pokyny výrobce obalového materiálu.

8. Skladování Sterilně zabalený nástroj skladujte v dobře větrané místnosti, chráněné před vlhkostí, prachem, slunečním zářením a vysokou teplotou. Před použitím vizuálně zkontrolujte, zda nebyla porušena integrita balení.