

Účel použití

Absorpční papírové čepy jsou endodontické papírové čepy, které se používají během endodontické terapie k vysušení nebo odstranění cizích materiálů z kořenového kanálku zubu.

Pokyny k použití

Odstraňování vlhkosti, krve a jiných cizích látek z kořenového kanálku probíhá ve dvou fázích. Zubař musí při vyplňování kořenového kanálku dodržovat stanovený postup.

1. Před plněním kořenového kanálku gutaperčovými čepy je nutné ověřit, zda délka a velikost absorpčních papírových čepů odpovídají vytvarovanému kořenovému kanálku. Absorpční papírové čepy se musí vybrat tak, aby správně dosáhly do vrcholu kořenového kanálku.
2. Vybraný papírový čep se zasune do kořenového kanálku, aby se z něj odstranila krev nebo cizí látky a poté se kořenový kanálek trvale vyplní gutaperčovými čepy.

Tento postup je základní metoda. V závislosti na symptomech pacienta ovšem zubař může zvážit jiný postup za použití více absorpčních papírových čepů.

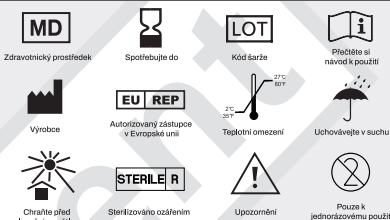
◆ Absorpční papírové čepy jsou určeny k jednorázovému použití. Nepoužívejte opakovaně.

Manipulace a skladování

1. Skladujte při pokojové teplotě. (2–27 °C)
2. Při přenášení s výrobkem neházejte.
3. Skladujte odděleně od jiných výrobků různých velikostí a typů.
4. Zlikvidujte jej jako zdravotnický odpad v souladu s místními předpisy.

Účel použití

1. Sterilní papírové čepy by měly mít stejnou velikost a tloušťku jako gutaperčové čepy.
2. Chraňte před vlhkem.
3. Jednorázové zdravotnické prostředky.
4. Po otevření obalu není zaručena sterilita.

Symbole**Trvanlivost**

4 roky od data výroby

Záruka

Společnost DiaDent Group International vymění produkt, u kterého se prokáže vada. Společnost DiaDent Group International nepřebírá odpovědnost za žádné škody nebo ztráty, přímé ani následné, vyplývající z použití nebo nemožnosti použití popsaného produktu. Odpovědností uživatele je před použitím určit, zda je produkt pro zamýšlené použití vhodný. Uživatel na sebe bere veškerá rizika a odpovědnost s tímto spojené. Pokud se během používání zařízení vyskytne jakýkoli závažný incident, je třeba jej nahlásit společnosti DiaDent Group International, příslušným orgánům a/nebo prodejci, u kterého byl výrobek zakoupen.

EU REP Autorizovaný zástupce v Evropské unii
DiaDent Europe B.V.
Antennestraat 70, 1322AS,
Almere, the Netherlands
Tel: 31 36 549 8607 FAX: 31 36 536 7317

■ DiaDent Group International
16, Osongsaeangmyeong 4-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu,
Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, 28161, Korea
Tel : 82-43-262-2315
Fax : 82-43-262-8658
www.diadent.co.kr
diadent@diadent.co.kr

☎ DiaDent Group International Inc.
#380-8210 Ross Street, Vancouver,
B.C. Canada, V5X 0L1
Tel : 1-604-451-8851
Fax : 1-604-451-8865
www.diadent.com
diadent@diadent.com

☎ DiaDent Europe B.V.
Antennestraat 70, 1322AS,
Almere, the Netherlands
Tel : 31-36-549-8607
Fax : 31-36-536-7317
www.diadent europe.com
diadent@diadent europe.com