

DOČASNÉ A STÁLÉ KORUNKY HU-FRIEDY

RESTORATIVNÍ
STOMATOLOGIE



NEREZOVÉ KORUNKY PRO DOČASNÉ A STÁLÉ MOLÁRY

Návod k použití

Nerezové korunky od Hu-Friedy jsou určeny k poskytnutí plného krytí jako odolnější provizorní ošetření pro dočasné moláry a splňují potřebu dlouhodobého provizorního krytí pro stálé moláry.

Pro minimalizaci nutnosti konturování a úprav jsou tyto nerezové korunky pro dočasné a stálé moláry předem okrajově upravené (prekrimpované), rozšířené a vytvarované.

Výběr a příprava korunky

1. Vyberte správnou velikost korunky. Změřte mezio-distální rozměr zubu v ústech pacienta. Poté změřte korunky v sadě, abyste určili odpovídající velikost.
2. Jakmile je identifikována vhodná velikost, vyzkoušejte přesné nasazení v ústech. Všimněte si okluzního vztahu mezi protějším zubem a vztahu k přilehlým zubům.
3. Pomocí sondy zkontrolujte případné otevřené okraje mezi preparací a korunkou. V případě potřeby korunku přetvarujte, abyste dosáhli lepšího okrajového uzávěru.
4. Pokud při nasazení korunky dochází k nadměrnému zbělení dásňové tkáně, je třeba korunku zkrátit. Pomocí nesmazatelného nebo voskového popisovače označte korunku podél kontury dásně. K zkrácení použijte nůžky na korunky a odstříhnete 1 mm pod značkou. Snažte se stříhat plynulým pohybem, abyste se vyhnuli vzniku ostrých kovových otřepů, které by mohly dráždit tkáň pacienta. Pokud vzniknou ostré oblasti, použijte k jejich odstranění brusný kámen a vyleštěte gumovým kotoučem. K přetvarování a okrajové úpravě korunky na zkrácených okrajích použijte konturovací kleště. Proveďte další zkoušku nasazení, abyste zajistili přesnost, správné kontakty a okluzi.
5. Proveďte další zkoušku nasazení, abyste zajistili přesnost, správný kontakt a zkontrolovali okluzi.
6. Při kontrole okluze si pečlivě všimněte jakýchkoli rozdílů ve vztahu mezi horní a dolní čelistí. Pokud je korunka plně nasazena a brání správné okluzi, může být nutná další redukce. Zub mírně dále zredukujte a korunku znovu vyzkoušejte, abyste potvrdili správnou okluzi.

Nasazení korunky

1. Izolujte preparovaný zub nasazením kofferdamu nebo použitím vatových válečků.
2. Preparaci omyjte a důkladně osušte.
3. Smíchejte cement a naplňte vybranou korunku dle pokynů výrobce cementu.
4. Nasaďte korunku. Doporučení: u mandibulárních (dolních) korunek začněte na linguální ploše a tlačte směrem k bukální ploše; u maxilárních (horních) korunek začněte na bukální ploše a tlačte směrem k linguální. To pomůže vytlačit zbytkový cement ven. Během finálního nasazování nepoužívejte nadměrnou sílu.
5. Během počátečního nasazování korunky ověřte správné zarovnání kontrolou vztahu s přilehlými a protějšními zuby. Když je správné zarovnání potvrzeno, instruujte pacienta, aby skousl do gázy nebo okluzní skusové tyčinky; tím zajistíte, že je korunka plně nasazena do správné okluze. Pokud používáte pomůcku pro nasazení korunky během cementace, dbejte na dosažení správné okluze. Nepoužívejte nadměrnou sílu, abyste se vyhnuli nasazení korunky pod úroveň správné okluze.
6. V určeném čase odstraňte přebytečný cement dle individuálních pokynů výrobce cementu. Odstranění cementu lze provést pomocí sondy, scaleru nebo exkavátoru. K odstranění cementu z interproximálních plošek a subgingiválních oblastí použijte zubní nit.

Nerezové korunky Hu-Friedy jsou vyrobeny ze slitiny nerezové oceli, která obsahuje elementární nikl a chrom. Je známo, že malé procento populace je na tyto kovy alergické. Pokud dojde k alergické reakci, doporučte pacientovi konzultaci s lékařem.

Tento produkt je určen pouze pro použití zubními profesionály. Tento produkt je na jedno použití (jednorázový); opakované použití je zakázáno. Potenciální rizika při opakovaném použití zahrnují:

- Zanesení mikrobů do těla v důsledku opakovaného použití předmětu, který mohl být kontaminován při prvním použití, což může vést k následnému zhoršení zdravotního stavu pacienta.
- Poranění měkkých tkání od jakýchkoli hrubých okrajů, pokud byla korunka dříve upravována.

Uchovávejte produkt při pokojové teplotě a mimo přímé sluneční světlo.

Pro doobjednání **dočasných a stálých korunek Hu-Friedy** volejte 1-800-Hu-Friedy.

Vyrobeno pro:
Hu-Friedy Mfg. Co.,
LLC: 3232 N. Rockwell St. Chicago, IL 60618 USA
Telefon: 1-800-Hu-Friedy (1-773-975-6100)
Web: Hu-Friedy.com



1-800-Hu-Friedy
Hu-Friedy.com

VYROBENO V KOREJI



N3342/1219