

**NSK**  
**b.clean**

Instructions for use

CE 0123

MD



**ALPRO MEDICAL GMBH**

Mooswiesenstr. 9  
78112 St. Georgen  
Germany



**NSK Europe GmbH**

Elly-Beinhorn-Str. 8  
65760 Eschborn  
Germany  
T +49 (0) 6196 77606-0

Čeština

Návod k použití

CZ

#### Zamýšlené použití

Roztok připravený k použití pro dekontaminaci a prevenci tvorby biofilmu v procedurálních vodovodech lékařských a stomatologických jednotek.

#### Zamýšlení uživatele

Použití pouze kvalifikovaným zdravotnickým personálem.

#### Popis

**b.clean** je řešení připravené k použití pro použití alespoň jednou týdně na zařízeních využívajících procesní vodu.

**b.clean** odstraňuje řasy a vápenité usazeniny a zabraňuje jejich vzniku, ke kterému dochází zejména po delší době nečinnosti a při ohřevu používané vody.

#### Rozsah účinnosti

Zkušební kritéria: znečištěné prostředí, pokojová teplota:

- baktericidní (EN 13623, zkušební organismy: *Klebsiella pneumoniae*, *Pseudomonas aeruginosa*) za 2 hodiny
- konzervace (EuAB 5.1.3, zkušební organismy: *Burkholderia cepacia*, *Enterococcus faecium*, *Legionella pneumophila*, *Pseudomonas aeruginosa*) po dobu 28 dnů

#### Složení

Ethylendiamintetraacetat, p-Ester kyseliny hydroxybenzoové, polyhexamethylenbiguanid.

Obsahuje zdroj fenylalaninu.

### **Použití**

Před aplikací (víkend, svátky nebo přes noc) naplňte dávkovací zásobník (nádrž) **b.clean** až po rysku.

Odstraňte z hadic veškeré nástroje. Dekontaminační systém používejte podle návodu k použití. Naplňte každé vedení procesní vody (hadice všech přístrojů) prostředkem **b.clean**, dokud nezačne vytékat z hadic a plničky pohárků (to se jasně pozná podle tyrkysové barvy). Následně vypněte ošetřovací jednotku.

Nechte **b.clean** působit ve vedeních procesní vody (minimálně 12 hodin), dokud nezačne ordinace znovu fungovat. Pro dlouhodobou dezinfekci se může **b.clean** používat až 3 měsíce.

Když je ošetřovací jednotka opět uvedena do provozu (zapnuta), proplachujte všechny zkumavky nástroje, dokud nevytéká čistá voda. Další pokyny podle specifikací výrobce (návod k obsluze).

### **Materiálová kompatibilita**

Nejsou známy žádné nekompatibilní materiály, pokud jsou používány k určenému účelu.

### **Hlášení o nežádoucí příhodou**

Závažné nežádoucí příhodou související s výrobkem musí být oznámeny výrobcí a příslušnému orgánu členského státu.

### **Podmínky skladování**

Skladovací teplota: od -10 °C do 30 °C

Chraňte před slunečním zářením.

Uchovávejte pouze v originálních nádobách.

### **Likvidace produktu**

Zbytky produktu je potřebné zlikvidovat jako produkt, který není nebezpečný, v souladu se směnicí 2008/98/ES o odpadech a s národními a místními předpisy. Nemíchejte s jinými odpadovými materiály.

### **Likvidace obalu**

Kontaminovaný obal je potřebné vhodným způsobem vyprázdnit a následně jej lze recyklovat.

**REF** BCL600: 6 x 1 L láhev