

Návod na obsluhu impulzní svářečky ISW 250

Obsluha svářečky musí být řádně seznámena s funkcí a užitím přístroje

- Důležité:** Tento návod obsahuje informace o práci na svářečce ISW 250 a její údržbě. Je ve vašem zájmu, aby obsluhující personál tyto instrukce dodržoval. Věnujte prosím pozornost návodu před prvním zapnutím a užitím přístroje!
- Všeobecně:** Svářečka ISW 250 je určena k uzavírání všech tepelně svařitelných obalů určených ke sterilizaci, tzn. kombinovaných obalů papír/fólie, papírových sáčků a polyamidových rolí.
Přístroje tohoto typu nejsou určeny pro větší a velké provozy cca nad 300 svárů denně!
Zde je třeba použít kontinuální svářečku.
- Expedice:** Každý přístroj je expedován v originálním balení. Před expedicí jsou jeho funkce přezkoušeny u prodávajícího. Před znehodnocením originálního obalu zkontrolujte pečlivě jeho obsah včetně příslušenství a karton uschovejte po dobu záruční lhůty pro případnou reklamaci.
- Instalace:** Přístroj může být instalován v každé běžné místnosti s pokojovou teplotou a běžnou vlhkostí. Neinstalujte jej v prašném a vlhkém prostředí.

Uvedení do provozu

- ✓ Zapojte přístroj do sítě (230 V)
- ✓ Ze sterilizační role uložené na držáku odviňte materiál potřebné délky, provedte svár a materiál odřízněte.
- ✓ Takto zhotovený sáček naplňte předměty, určenými ke sterilizaci.
- ✓ Proveďte druhý svár (uzavřete sáček)

Technická data:

Rozměr	220 × 420 × 300 mm
Počet a šíře svárů	1 × 8 mm
Svařovací délka	max. 250 mm
Příkon	870 W
Napětí	230 V, 50 Hz
Hmotnost	10 kg

Při provádění sváru postupujte takto:

- ✓ Pootočením kolečka „Welding time“ nastavte délku časového sepnutí 0 – 100
- ✓ Vložte obal mezi svařovací čelisti
- ✓ Ovládací páku na pravé straně přitáhněte směrem dolů; tím stisknete svařovací čelisti k sobě a provedete svár
- ✓ Pro odříznutí materiálu řezačkou mírně přitlačte na nůž a proveďte řez
- ✓ Vyčkejte světelné a zvukové signalizace, která vás upozorní na ukončení svářecího procesu
- ✓ Pohybem páky opačným směrem uvolněte čelisti a vyjměte materiál

Údržba:

Povrch svařovací lišty udržujte čistý. Teflonová páska se opotřebovává úměrně časovému použití a proto není předmětem záruky. Veškeré díly je nutno nahrazovat originálními náhradními díly, aby nedošlo ke snížení kvality sváru a bezpečnosti přístroje. Zásahy do přístroje včetně garančních oprav a výměn náhradních součástí musí být prováděny odborným servisem.

Servis:

Zajišťujeme záruční a pozáruční servis včetně preventivních prohlídek a revizí.

Optimálnost sváru je třeba vyzkoušet. Po provedení prvního sváru zkontrolujte jeho kvalitu.

Záruka:

Záruční lhůta je vyznačena na záručním a předávacím protokolu. V této lhůtě lze uznat záruku za předpokladu, že byl přístroj používán podle návodu a nebyly ze strany uživatele prováděny žádné úpravy nebo zásahy do vnitřní mechaniky a elektroniky.

Doporučení:

Po každých dvanácti měsících provozu je nutná servisní prohlídka pro zajištění spolehlivosti provedených svárů sterilizačních obalů. Každých dvanáct měsíců nebo po každé opravě je nutná elektorevize přístroje.

Technická data	IS 250
Typ svařování	Impulsní
Doba svařování	Volitelné bez omezení, manuálně ovládané
Šířka obalu	max. 250 mm
Zdroj napětí	230 V 50 / 60 Hz (EU)
Výkon	870 VA
Šířka sváru	8 mm
Délka sváru	250 mm
Hmotnost	8 kg
Rozměry (šířka x hloubka x výška)	420 x 300 x 220 mm

Tímto prohlašujeme, že svářečka

STERIKING IS 250

Splňuje požadavky následujících předpisů a souvisejících norem:

Nařízení o nízkém napětí **2006/95/EG**

EMC nařízení **2004/108/EG**

Harmonizované standardy
EN ISO 12100-1
EN ISO 12100-2
EN ISO 13857
EN ISO 61000-6-3
EN ISO 61000-6-1
EN 60204-1

Osoba odpovědná za technickou dokumentaci viz níže



Mira Santala
Technical Product Specialist

WIPAK OY, WIPAKTIE 2, P.O. Box 45, FIN – 15561 NASTOLA