



Vyrobeno v Belgii

Roam Technology NV - I.Z. Poort Genk 6835 - Geleenlaan 24 - 3600 Genk - Belgie
T: +32(0)89 44 00 42 - info@roamtechnology.com

KAVO

KaVo Dental GmbH - Bismarckring 39
88400 Biberach an der Riß - Německo - T: +497351560CE
1639

OXYGENAL 6 - 0.489.3451 (ref. Roam 103318)

Návod pro uživatele

KaVo a OXYGENAL 6 jsou buď registrované ochranné známky anebo ochranné známky společnosti KaVo Dental GmbH. Všechny další obchodní značky jsou vlastnictvím jejich příslušných majitelů. OXYGENAL 6 lze použít ve všech stomatologických jednotkách od KaVo Dental GmbH. OXYGENAL 6 není kompatibilní s jednotkami pro zubní ošetření, které nevyrábí KaVo Dental GmbH.

Technický servis společnosti KaVo

Máte-li jakékoli dotazy nebo stížnosti, prosím kontaktujte technický servis společnosti KaVo: +49 (0) 7351/56-2500 nebo service.treatmentunits@kavo.com

Zamýšlení uživatele a uživatelské prostředí

Profesionální uživatelé, jako jsou zubní lékaři a personál zubní ordinace ve zdravotnickém prostředí.

Obecné značky a symboly

MD Zdravotnický prostředek, označování zdravotnických prostředků

Postupujte podle elektronického návodu na použití

Skladujte ve svislé poloze

Skladovací teplota: +5 až +30 °C

Skladujte mimo dosah přímého slunečního záření

Uchovávejte v suchu

Dodržujte datum expirace

REF Referenční číslo

UDI Jedinečný identifikátor zdravotnického prostředku

Značka CE pro zdravotnický prostředek (1639 - číslo oznámeného subjektu)

Výrobce

LOT Výrobní šarže

Poznámka: Prosím, vezměte na vědomí průvodní dokumenty

Distributor

CH/REP Právní zástupce ve Švýcarsku

Doprava a skladování

Roztok přípravku OXYGENAL 6 by měl být uchováván v původní lahvi při teplotě mezi +5 a +30 °C. Uchovávejte mimo dosah slunečního záření. Uchovávejte v suchu a skladujte ve svislé poloze. Je-li přípravek skladován za vhodných podmínek, má trvanlivost dva roky. Uchovávejte lahev uzavřenou až do použití. Vzhledem ke konstrukci uzávěru určeného k uvolnění tlaku v lahvi se může zdát, že lahev prosakuje, pokud je skladována ve špatných podmínkách. Lahvičku lze po otevření používat až 4 měsíce.

Aktuálně platný zákon o obalech

Obaly likvidujte a recykluje vhodným způsobem v souladu s platným zákonem o obalech a využijte společnosti zabývající se nakládáním s odpady/recyklaží. Prázdnou lahev znovu nepoužívejte k jiným účelům. Opláchněte a zlikvidujte podle místních předpisů.

Varování**VAROVÁNÍ**

Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list. Ten lze získat prostřednictvím místního distributora. Nepoužívejte OXYGENAL 6, pokud je obal poškozen nebo byl vystaven nekompatibilním podmínkám skladování.

Způsobuje vážné podráždění očí. TOXICKÝ pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.



PRI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vymout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc. Kontakt s přípravkem OXYGENAL 6 může změnit barvu kůže. Při rozlítí okamžitě oťete.

POZNÁMKA

Všechny závažné příhody, které se vyskytnou v souvislosti se zdravotnickým prostředkem, musí být oznámeny výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel a/nebo pacient bydliště.



Návod na použití je součástí výrobku, musí být před použitím pečlivě přečten a musí být neustále přístupný. Zdravotnický prostředek může být používán pouze v souladu s určeným použitím, jiný typ použití není povolen.

UFI: XQVH-J0WJ-W00W-WERM

Popis produktu**Zamýšlený účel**

OXYGENAL 6 je určen k redukci bakterií a prevenci biofilmu ve vodovodních rozvodech stomatologických jednotek KaVo.

OXYGENAL 6 je určen pouze k použití v zubářských křeslech vyráběných společností KaVo Dental GmbH.

Dodržujte pokyny společnosti KaVo pro péči o konkrétní stomatologickou jednotku – ovládací závisí také na zvoleném vybavení. Pokyny společnosti KaVo a elektronické návody k použití stomatologických jednotek a jejich příslušenství (včetně OXYGENAL 6) lze stáhnout na www.kavo.com/download

Uživatel musí dodržovat návod k použití, protože nedodržení může ovlivnit bezpečnost a výkon zdravotnického prostředku.

Indikace

Přípravek OXYGENAL 6 není určen k použití u specifické populace pacientů, ale je určen jako bezpečnostní opatření stomatologických jednotek pro rizikům vznikajícím během péče o pacienta.

Kontraindikace

Přípravek OXYGENAL 6 se nesmí používat mimo zdravotnická zařízení.

Složení

Obsahuje peroxid vodíku (CAS 7722-84-1): 6 %