

Uživatelská příručka - lepicí pásy

Název výrobku: Lepicí pásy papírové pro fixaci sterilizačních plošných obalů (přířezy, archy) bez chemických indikátorů a s chemickými procesovými indikátory typ 1 dle ČSN EN ISO 11140-1

Postup při použití:

Lepicí pásy papírové jsou pásy v kotoučích po 50-ti běžných metrech v šířkách 19, 25 a 50 mm. Používají se k fixaci plošných obalových materiálů při balení obálkovou metodou (krepový papír, netkaná textilie a wrap).

Lepicí pásy se dodávají bez chemických indikátorů nebo s chemickými indikátory:


- pro parní sterilizaci zelené šikmé proužky, mění po sterilizaci barvu na hnědou až černou
- pro ethylenoxidovou sterilizaci s písmeny „gas“ v barvě tmavě červené, mění po sterilizaci barvu na zelenou
- pro horkovzdušnou sterilizaci lomené čáry ve tvaru šipky v zelené barvě, mění po sterilizaci barvu na černou (pokud je lepicí páska pro horkovzdušnou sterilizaci použita jako indikátor sterilizace, je nutno použít pásku v délce alespoň dvou značek šipek)
- pro plasmovou sterilizaci s fialovými body a čárkami, mění po sterilizaci barvu z fialové na růžovou

Na vnitřní straně cívky je vytištěn datum výroby. Datum expirace je 2 roky od tohoto datumu.

Lepicí pásy skladujte při teplotě +15 až +25°C při relativní vlhkosti 40 - 60%. Nutno chránit před přímým UV zářením.

pára


- pro krepové papíry
kat. číslo LP 1084

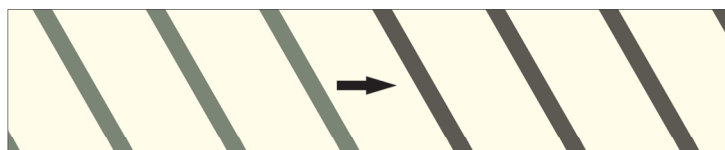


- pro netkanou textilií
kat. číslo LP 1083



- ethylenoxid
kat. číslo LP 1086

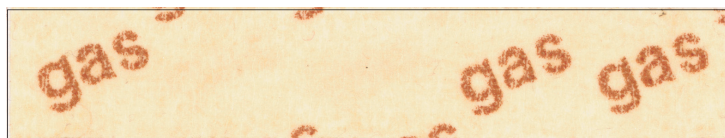

- horký vzduch
kat. číslo LP 890102

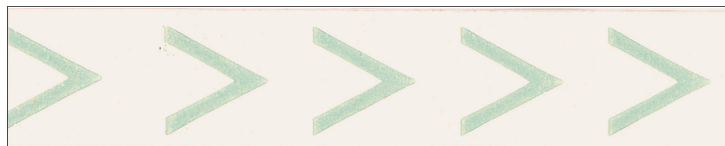

- plasma
kat. číslo LP 1082



Uvedené výrobky můžete objednávat na adrese:

UNIBAL s.r.o., Za Hřištěm 2567/10, 370 10 České Budějovice
tel.: 385 342 762, fax: 385 345 013, e-mail: unibal@unibal.cz

01/2018