

Návod k použití

PURE Helix test slouží jako kontrolní indikátor sterilizačního procesu pro autoklávy a parní sterilizátory třídy B a S. Ukazatele vyhovuje standardu ISO 11140-1 třídy 2.

1. Před použitím se ujistěte se, že Helix test včetně hadičky a tuby není poškozen, vše je suché a při pokojové teplotě.

2. Odšroubujte víčko z tuby.

3. Vezměte indikační proužek (obrázek 1) a přehněte jej ve středu textem směrem dovnitř (obrázek 2).

4. Vložte přeložený indikační papírek nejprve do víčka, které jste odšroubovali, a lehce zasuňte papírek až do konce víčka (obrázek 3).

5. Uzavírací víčko včetně papírku přišroubujte zpátky k tubě Helix testu (obrázek 4).

6. Vložte do autoklávy nebo parního sterilizátoru.

7. Spusťte sterilizační proces:
a) 134°C po dobu 3,5 min.
b) 121°C po dobu 15 min.

8. Po dokončení sterilizačního procesu vyndejte Helix test z autoklávy nebo parního sterilizátoru. Nechte test vychladnout, je-li tuba horká.

9. Opět odšroubujte uzávěr, vyjměte a zkontrolujte indikační proužek.

10. V případě, že indikátor ukazuje zelenou barvu (obrázek 5), lze předpokládat, že autokláv pracuje správně a sterilizuje úspěšně.

Indikační papírky jsou opatřeny přilnavou vrstvou tak, aby je bylo možné archivovat pro případnou kontrolu. Testovací souprava Helix Test by měla být po 250x použití opětovně vyměněna.

