

MELAcontrol

Instrukce pro uživatele

MELAcontrol je indikátor sterilizace a monitorovací systém sádky (test průniku páry), skládající se z testovací dutiny (spirálovitá část) a indikačního proužku.

Důležité: MELAcontrol je navržen na testování autoklávů třídy B (do objemu 1 sterilizační jednotky, tzn. do 60 l), tj. autoklávů, které pracují s frakcionovaným (pulsním) vákumem.

Postup:

1. Odšroubujte (bílý) vršek ze spirálovité části.
2. Vyjměte indikátorový proužek z balení.
3. Vsuňte indikátorový proužek do rýhy ve vršku, zasuňte ho, co nejvíce dovnitř.
4. Zashroubujte vršek do spirálovité části.

Jestli chcete použít MELAcontrol jako monitorovací systém sádky, pak umístěte spirálovitou část s vloženým indikátorovým proužkem do autoklávu a spusťte B program.

Jestli chcete použít MELAcontrol k prověření B vakuových sterilizátorů, nejprve spusťte sterilizační cyklus bez obsahu uvnitř. Pak vložte nový indikátorový proužek do spirálovité části, jak je popsáno nahoře a umístěte spirálu na tácek do prázdné sterilizační komory. Pak zpustíte Bowie - Dickův test s prázdným autoklávem.

Když je cyklus ukončený, vyjměte spirálu z autoklávu, a odšroubujte vršek zařízení. Nyní zkontrolujte indikátorový proužek. Jestli, že se ukáže úplná barevná změna, můžete považovat funkci sterilizátoru za dostatečnou.

Zhodnocení:

A



MELAcontrol

For use in small steam sterilisers 134–137 °C

Jestliže se změna proužku změní úplně viz. A, prokazuje to uspokojující průnik páry.

B



MELAcontrol

For use in small steam sterilisers 134–137 °C

Jestliže se barva indikátoru nezměnila úplně viz. B, prokazuje to nedostatečný průnik páry. V tomto případě zkontrolujte jestli autokláv neuniká.

Důležité:

Kvůli chemické struktuře substance indikátoru a kvůli výrobním postupům, není vždy barva indikace stejná. Rozsah zbarvení je od tmavě modré do světle fialové. Důležité však, že zbarvení je na celém povrchu stejné.

Před každým testem s MELAcontrol, vložte nový nepoužitý indikátorový proužek do držáku spirálovité části. Po 250 sádkách prosím vyměňte spirálovitou část. Při objednávce MELAcontrol obdržíte 250 indikačních proužků.