



ULTRAMAT 2

Vysokorychlostní amalgamátor

Návod k použití

Ultramat 2 je univerzální amalgamátor, který je, díky přesnému časování, určen pro všechny typy kapslovaných materiálů.

Indikace

Pro promíchávání všech výplňových materiálů v kapslích.

Obsah balení

- 1 x amalgamátor
- 1 x síťový kabel
- 1 x 3mm inbus klíč pro uvolnění přepravních šroubů

Nastavení napětí

Ultramat 2 se automaticky nastaví na rozličná napětí a může se tak používat pro napětí 120 a 240V, event. 50 a 60Hz.

Vybalení přístroje a odstranění transportního šroubu

Přístroj je pečlivě zabalen, aby se předešlo poškození během přepravy. Nejprve se přesvědčte, že karton obsahuje všechny části přístroje. Potom musí být opatrně vybalen, aby nedošlo k jeho poškrábání.

- Před použitím musí být odšroubován šroub na spodní straně přístroje, který sloužil k jeho zajištění během přepravy.**
- Postavte přístroj na bok, nejlépe na měkký povrch.**
- Odšroubujte proti směru hodinových ručiček transportní šroub přiloženým inbus klíčem.**
- Pak přístroj postavte na snadno přístupné místo s hladkým povrchem.**

Použití

Nastavení míchacího času

- Nejprve zapojte síťový kabel do přístroje, pak do zásuvky.
- Páčkový spínač na zadní straně Ultramatu 2 nastavte do polohy ON. Upozornění: míchací čas teď bude červenou číslicí svítit na přední straně přístroje.
- Zavřete kryt Ultramatu 2 a nastavte opakovaných zmáčknutím tlačítka „Increase time“ požadovaný čas míchání. Upozornění: čas („Timer“) je možné nastavit od 1 do 16 sekund.
- Páčkový spínač na zadní straně přístroje přepněte nejprve na OFF a pak ihned zpět na ON.
- Tímto krokem je uložen navolený čas míchání a pak se nasadí kapsle.

Nasazení kapsle:

- Otevřete kryt přístroje a kapsli nasadte vidličky (u amalgámů SDI před nasazením zatlačit na tvrdé podložce barevný píst dovnitř kapsle – dojde tak k aktivaci materiálu před mícháním). Upozornění: kapsle s přesahující koncovkou (např. Riva) se nasazují tak, že koncovka je na levé straně.
- Zavřete kryt.

Start/Stop

- Zmáčkněte tlačítko „Start/Stop“ a míchání začíná.
- Upozornění: pokud chcete míchání ukončit nebo přerušit, stačí nadzvednout kryt přístroje nebo znovu zmáčknout tlačítko „Start/Stop“. Na konci pracovního dne vypnout přístroj pomocí páčkového spínače na zadní straně.

Čištění přístroje

Povrch Ultramatu je možné očistit běžnými dentálními dezinfekčními prostředky jako např. Halogene (Chlor) nebo 70% etanol. Dezinfekční prostředek nastříkejte na měkký hadřík a otřete celý povrch přístroje.

Údržba:

- Míchací vidlička: pokud je výměna po nějakém čase nutná, obraťte se v takovém případě na svého prodejce SDI.
- Síťový kabel: nepřekrucujte ani nepřelamujte, kabel musí být vždy volně natažen.

Možné závady:

1. **Hlasitý zvuk během celého míchání:** zkontrolujte, jestli byly odstraněny transportní šrouby.
 2. **Kapsle nesedí dostatečně pevně:** ramena míchací vidličky mohou být vyhnutá, je nutné vidličku vyměnit. V tomto případě kontaktujte svého prodejce SDI.
 3. **Elektronické nebo mechanické poruchy:** kontaktujte svého prodejce SDI.
- Výměna vnitřní pojistky: výhradně použít jen 5 x 20mm, 0,5A H-pojistku/ 250V (PCB).

Záruční doba:

Výrobce SDI Ltd., garantuje 5letou záruční dobu pro původního kupce na vadné materiály nebo defekty, které jsou výsledkem špatného zpracování přístroje. Výrobce se zavazuje bezplatně opravit vady, které se vyskytly během garanční doby, nebo přístroj vyměnit za nový.

Tento postup vychází z toho, že přístroj bude posouzen firmou SDI a bude jednoznačně prokázáno, že vada vznikla i přes normální a řádné zacházení s přístrojem.

Podmínky záruční opravy:

- po obdržení přístroje okamžitě vyplňte přiloženou garanční kartu a tu pak zašlete spolu s kopií faktury zpět na SDI. Opomenutí této podmínky může vést k odmítnutí reklamace.
- je možné zaregistrovat garanční nárok na www.sdi.com.au/warranty.

a) Opravy přístroje během záruční doby může provádět pouze výrobce nebo osoby jím pověřené. V opačném případě není výrobce povinen uznat reklamaci v záruční době.

b) Při garanční opravě smějí být použity pouze originální díly SDI. Výrobce nepřebírá žádnou zodpovědnost za použití neoriginálních dílů.

c) Výrobce není povinen uznat reklamaci v případě nepřiměřeného nebo nedbalého používání přístroje nebo při zřejmé chybě při jeho čištění (např. zatečení vody do přístroje).

d) Výrobce nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené neopatrným používáním přístroje.

e) Při všech reklamačních řízeních uvádějte přesný název modelu přístroje, objednáací číslo a výrobní číslo.

Výrobce
SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia
www.sdi.com.au



Distributor pro ČR:
SCHAFFEROVÁ spol. s r.o.
Andělská 29
779 00 Olomouc
Tel.: 585 757 200 - 201
www.schafferova.cz



ABN 27 008 075 581



Caution:
(Refer to
accompanying
instructions)



High Voltage Inside: This
equipment operates from A.C
mains. Only authorized personnel
to open unit.

ULT31125 E