

Uživatelská příručka

Název výrobku: Chemický indikátor pro kontrolu účinnosti sterilizace
v parních sterilizátorech - pro balené předměty

Třída 4 dle ISO 11140-1

Katalogové číslo: W 2567

Použití výrobku:

Indikátorový proužek je určen pro kontrolu účinnosti sterilizace v parních sterilizátorech pro balené předměty - zdravotnické prostředky - pro sterilizační proces s parametry dle Vyhlášky č. 195/2005 Sb., bod II. 1.1. - sterilizace vlhkým teplem při parametrech 121 °C/20 min. nebo 134 °C/10 min. - viz citovaná vyhláška.

Postup při použití:

1. Indikátorový proužek vložte ke sterilizovanému zdravotnickému prostředku, umístěnému ve sterilizačním obalu (na síto ve sterilizačním kontejneru nebo do jiného druhu obalu - kombinované obaly apod.).
2. Barevná změna indikátoru: z purpurové na hnědou až černou - viz referenční bod.
3. V případě, že tomu tak není, je třeba materiál považovat za nesterilní a sterilizaci opakovat s novým indikátorovým proužkem.
4. Možné příčiny nesprávného zbarvení indikátoru jsou příliš krátká doba sterilizace, přehřátá pára nebo nízká teplota.
5. V případě potřeby zdvojené dokumentace (např. operační + pacient) použijte celý zdvojený indikátorový proužek. Pokud postačí jednoduchá dokumentace, rozdělte indikátorový proužek na dvě části - dva samostatné indikátory.
6. Údaje o sterilizačním procesu a případné poznámky lze psát na zadní stranu indikátorového proužku.
7. Při dodržení skladovacích podmínek, uvedených na obalu (5 - 30 °C, 35 - 50 % rel. vlhkosti) je zachována barevná změna indikátoru minimálně po dobu 6 měsíců po sterilizaci.
8. Indikátor neobsahuje těžké kovy.
9. Balení: 250 ks zdvojených, resp. 500 ks jednotlivých indikátorových proužků v papírové skládáče.

Před sterilizací



Referenční bod

Indikátor

Po sterilizaci



Uvedený výrobek můžete objednávat na adrese:

UNIBAL s.r.o., Za Hřištěm 2567/10, 370 10 České Budějovice

tel.: 385 342 762

fax: 385 345 013

e-mail: unibal@unibal.cz

10/2007