

LM

NÁVOD PRO ÚDRŽBU NÁSTROJŮ

1. Prvotní desinfekce

Znečištěné nástroje neponechávejte uschnout – co nejdříve je vložte do desinfekčního roztoku. Zvláště dbejte na správné dávkování a expoziční čas. Jestliže používáte tepelnou desinfekci, přeskočte kroky 1 – 2.

2. Oplachování

Nástroje řádně opláchněte pod teplou tekoucí vodou.

3. Čištění

Čistící jednotka/tepelná desinfekce.

Mytí v ruce: Teplou vodou odstraňte všechny viditelné nečistoty. Použijte měkký kartáček a mýdlo.

Ultrazvuková čistička: Pro uložení nástrojů použijte kazetu, abyste předešli jejich poškození.

4. Oplachování

Nástroje řádně opláchněte pod teplou tekoucí vodou.

5. Sušení

Nástroje před sterilizací vysušte.

6. Kontrola a ostření

Naostřete, opravte nebo, v případě nutnosti, vyměňte nástroje.

Poznámka: Nástroje LM Sharp Diamond neostřete.

7. Balení

Zkontrolované a očištěné nástroje zabalte pro sterilizaci.

8. Sterilizace

Autokláv: Umístěte čisté, suché a řádně zabalené nástroje do autoklávu.

Horkovzdušná sterilizace: Umístěte čisté, suché a řádně zabalené nástroje do horkovzdušného sterilizátoru. Neumisťujte je příliš blízko sebe; dbejte na dodržení teploty (max. 180°C).

Poznámka: LM extrakční nástroje max. 134°C.

DŮLEŽITÉ:

- pravidelně kontrolujte přístroje
- dodržujte návod k použití
- dbejte na správné dávkování a expoziční časy
- pro ochranu nástrojů a před poraněním používejte LM-Servo kazety