



EDENTA AG, Hauptstrasse 7, CH-9434 AU/SG – **Switzerland**
 Tel.: +41 71 747 25 25 Fax: + 41 71 747 25 50 e-mail: info@edenta.ch
EDENTA Etabl., Industriestr. 13, FL-9486 Schaanwald – **Liechtenstein**
 Tel.: +423 375 20 50 Fax: + 423 375 20 55 e-mail: info@edenta.com

Návod k použití

Výrobek: Profylaktická pasta v kelímku, 2 g

Klasifikace: Zdravotnický prostředek třídy 1

Profylaktická pasta v kelímku, 2g

Pro maximalizaci odstranění zubního plaku a kamene bez patrné abraze skloviny je v pastě obsažena směs abraziv v pečlivě zvoleném poměru. Pasta má dále tixotropní vlastnosti, díky nimž se snadno nanáší na kartáček či kalíšek a pasta se při otáčkách používaných v profylaxi nerozstříkuje.

INDIKACE

Používá se pro odstranění zubního plaku a kamene ze zubů pacienta.

PRACOVNÍ POSTUP

Profylaktická pasta je tixotropní, v případě potřeby můžete zvýšit její tekutost jemným promícháním špachtlí před použitím. Pro dosažení optimálních výsledků používejte profylaktický násadec v kombinaci s pryžovým kalíškem/kartáčkem se štětinami. Naplňte pryžový kalíšek/kartáček se štětinami pastou a pracujte při nízkých otáčkách na povrchu každého zubu. Dbejte na to, aby hrana kalíšku/kartáčku byla vždy pod hranicí gingiválního sulku. Pastu doplňujte do kalíšku dle potřeby.

Postup opakujte pro každý zub, dokud nebudou ošetřeny všechny exponované povrchy.

Pro odstranění přebytečné pasty z mezizubních prostor může být použita nevoskovaná zubní nit či mezizubní kartáček.

Odsávejte sliny, aby se profylaktická pasta nerozpustila a aby ji pacient nespolk.

Použitý kalíšek po ošetření vždy odstraňte.

Jedno balení profylaktické pasty Edenta AG obsahuje dostatek pasty na jedno (1) profylaktické ošetření.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Profylaktickou pastu Edenta AG může aplikovat jen personál speciálně vyškolený k provádění zubní profylaxe.

UPOZORNĚNÍ: Požití většího množství fluoridu může způsobit nevolnost.

Profylaktická pasta s fluoridem se musí vykašlat, nesmí se polknout.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v suchu a chladu (5–25 °C).

ČÍSLO ŠARŽE

Šarže představuje číselný kód pro jednoznačnou identifikaci šarže materiálu. Při jakékoli korespondenci prosím vždy uvádějte číslo šarže.

VÝROBEK BYL VYVINUT SPECIÁLNĚ PRO POUŽITÍ VE STOMATOLOGII