




EDENTA AG, Hauptstrasse 7, CH-9434 AU/SG – Switzerland
 Tel.: +41 71 747 25 25 Fax: +41 71 747 25 50 e-mail: info@edenta.ch
 EDENTA Etabl., Industriestr. 13, FL-9486 Schaanwald – Liechtenstein
 Tel.: +423 375 20 50 Fax: +423 375 20 55 e-mail: info@edenta.com

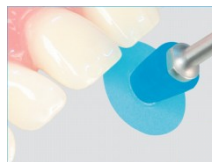

Návod k použití pro lešticí nástroje Flexi-Snap: ⓧ

1. Indikace / použití

Jednorázové lešticí kotoučky na konturování, konečnou úpravu, předleštění a doleštění do vysokého lesku kompozitních konstrukcí ve stomatologii.

Barevné označení určuje 4 různé hrubosti nástroje.

Zelená = hrubá, konturování
 Modrá = střední, konečná úprava
 Červená = jemná, předleštění
 Bílá = velmi jemná, vysoký lesk

Lešticí kotoučky Flexi-Snap používejte pouze k indikaci uvedené v návodu.

2. Pracovní postup

- Přebytky kompozit odbruste wolfram-karbidovým nástrojem či diamantem.
- Flexi-Snap používejte pouze s mandrelem 4038RA.
- Otáčky nastavte v rozmezí 10–12 000 ot./min. (max. rychlost mikromotoru je 15 000 ot./min.).
- Během preparace vždy používejte chladicí sprej (min. 50 ml/min.).
- Při leštění aplikujte mírní tlak, pracujte 10–20 s pro každou hrubost, postupujte od zelené, přes modrou, červenou až k bílé.
- Vyvarujte se kontaktu s měkkou tkání.

Upozornění:

Vysoké otáčky, příliš velký tlak nebo leštění bez chladicího spreje může kompozit přehřát a zničit lešticí nástroj Flexi-Snap, následkem toho může dojít k poranění. Vyvarujte se zaseknutí nebo ohnutí lešticího kotoučku Flexi-Snap.

3. Pokyny pro čištění

Lešticí kotoučky Flexi-Snap jsou určeny k jednorázovému použití. Nesmí se sterilizovat a po použití se musí vyhodit.

Mandrelly se dají použít opakovaně, po každém použití musí být následujícím způsobem ošetřeny:

- Mandrelly vyčistěte a vydezinfikujte. Dodržujte pokyny výrobce ohledně doby působení dezinfekce a koncentrace tekutiny.
- Mandrelly důkladně opláchněte pod tekoucí vodou a vysušte. Nikdy nenechávejte mandrelly dlouho vlhké ani je nesušte příliš dlouho.
- Mandrelly před použitím vizuálně zkontrolujte. Poničené mandrelly vyhodte, nesmí být znovu použity!
- Sterilizujte mandrelly v autoklávu (134 °C / 274 °F) a zkontrolujte, zda není na povrchu koroze. Korodované mandrelly dále nepoužívejte!

Podrobná doporučení k použití jsou v souladu s normou DIN EN ISO 17664 www.edenta.com