

Nastavitelný incisální stolek



Návod k použití

Obsah

1-Úvod.....	01
2-Obsah balení.....	01
3-Instalace.....	01
4-Návod k použití.....	01
5-Odstraňování problémů.....	02
6-Údržba a čištění.....	02
7-Technické specifikace.....	02
8-Symboly.....	03
9-Záruka a technická podpora.....	03
10-Autorizovaná technická podpora.....	04
11-Autorizovaný zástupce pro Evropu.....	04

1 Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali produkt Bio-Art.


Nastavitelný incizální stolek byl navržen společností Bio-Art pro použití v jeho artikulátorech ve specifických případech s technikou doporučenou každým profesionálem.

Je vyroben ze vstříkovaného hliníku a povrchově poniklován, což zajišťuje ochranu před oxidací a tvrdost.

2 Obsah balení

01 Nastavitelný incizální stolek se šroubem

01 Inbus klíč 2,5 mm a
návod k použití

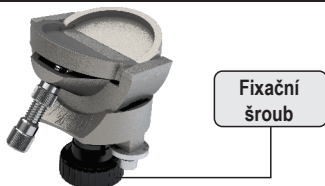

3 Instalace

Standardní (akrylátový) incizální stolek vyjměte z artikulátoru a do jeho pozice nainstalujte nastavitelný stolek, viz níže.



4 Návod k použití

Nastavitelný incizální stolek se používá s artikulátorem pro vyváženou okluzi zubů, což umožňuje nastavení předního vodítka přes jeho boční okraje a nastavitelnou předozadní rovinu.



Poznámka: Tato příručka obsahuje pouze základní a zjednodušené informace týkající se produktu, které nenahrazují správný kurz a školení. Nastavitelný incizální stolek je produkt určený k použití pouze speciálně kvalifikovanými odborníky v dané oblasti, kteří plně odpovídají za použitou techniku.

5 Odstraňování problémů

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Nestabilita při připojování nastavitelného incizálního stolku k artikulátoru.	Zbytky nebo nečistoty na spodním rámu nebo na nosné ploše stolku.	Před zajištěním stolku vždy očistěte nosnou plochu a spodní rám artikulátoru.
Problémy v pohybu otočných částí nastavitelného řezného stolu.	Poškozené šrouby nebo nahromadění zbytků na otočných částech.	Otočné části udržujte vždy čisté. Vyměňte poškozené šrouby a kontaktujte autorizovanou technickou podporu společnosti Bio-Art.

6 Údržba a čištění

1. K čištění používejte měkký kartáč a čistý hadřík navlhčený v 70% alkoholu a nepoužívejte rozpouštědla, čisticí prostředky ani chemikálie;
2. K čištění nepoužívejte kovové nebo ostré předměty, v případě potřeby použijte pouze plastovou stěrku;
3. Nevystavujte nastavitelný incizální stolek vysokým teplotám nebo nadměrné vlhkosti.
4. Při jakékoli údržbě vždy kontaktujte autorizovanou technickou podporu společnosti Bio-Art.

7 Technické specifikace

Hlavní materiály použité při výrobě nastavitelného řezacího stolku:

Stolek: hliník s eloxovaným povrchem, pružiny z uhlíkové oceli.

Zajišťovací šroub. Rukojeť mosazné vložky se vstřikováním PA;
 Pohyby bočních čelistí: maximálně 40 stupňů;
 Otočný pohyb na stole: 0 až 10 stupňů, 0 až 30 stupňů;

Váha: 50 g

8 Symboly

			
<i>Viz Návod k použití</i>	<i>Varování</i>	<i>Výrobní číslo</i>	<i>Číslo modelu</i>
			
<i>Autorizovaný zástupce pro Evropu</i>	<i>Datum výroby</i>	<i>Výrobce</i>	<i>Skladujte v suchu</i>
			
<i>Hodní strana</i>	<i>Křehké</i>	<i>Max. stohovatelnost</i>	

9 Záruka a technická podpora

BIO-ART Equipamentos Odontológicos Ltda. poskytuje na tento produkt záruku 1 (jeden) rok, počítáno od data nákupu. Záruka se vztahuje na všechny výrobní vady a je poskytována opravou zařízení podle následujících požadavků:

- Produkt byl používán správně podle pokynů popsanych v návodu k použití;
- K reklamaci je přiložena příslušná faktura a je zpracována v záruční době, následovaná zprávou popisující závadu a sériové číslo;
- Produkt je používán, přepravován a skladován opatrně;
- Náklady na dopravu (zpáteční) nese zákazník.

Omezení záruky:

- Přirozené opotřebení dílů;
- Zneužití, pád nebo nehody;
- Nesprávná přeprava;
- Opravy neoprávněnými osobami;
- Použití bez ohledu na vlastnosti a účely produktu;
- Opotřebení v důsledku vystavení nepříznivým podmínkám (vlhkost, chlad a intenzivní teplo);
- Poškození v důsledku nedostatečného čištění nebo údržby nesprávnými výrobky;

V případě dalších dotazů se obraťte na výrobce:



BIO-ART EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
Rua Teotônio Vilela, 120 - Jardim Tangará
CEP 13568-000 - São Carlos - SP - Brasil
Tel. +55 (16) 3371-6502
CNPJ 58.538.372/0001-56 - Insc. Estadual 637.034.447.113
www.bioart.com.br

10 Autorizovaná technická podpora

Kvůli vaší bezpečnosti musí technickou podporu pro tento produkt provádět autorizované osoby / společnosti. Vyhledejte autorizované servisní středisko na našem webu:

www.bioart.com.br

11 Autorizovaný zástupce pro Evropu



Obelis s.a.
Boulevard Général Wahis 53
1030 Brussels, BELGIUM
Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03
E-mail: mail@obelis.net



**Rua Teotônio Vilela, 120 - Jardim Tangará - CEP 13568-000
São Carlos (SP) - Brasil - Tel. +55 (16) 3371-6502
www.bioart.com.br - facebook.com/bioartequipamentos**
