


HYDRAULICKÝ LIS

Press

 NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ



NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

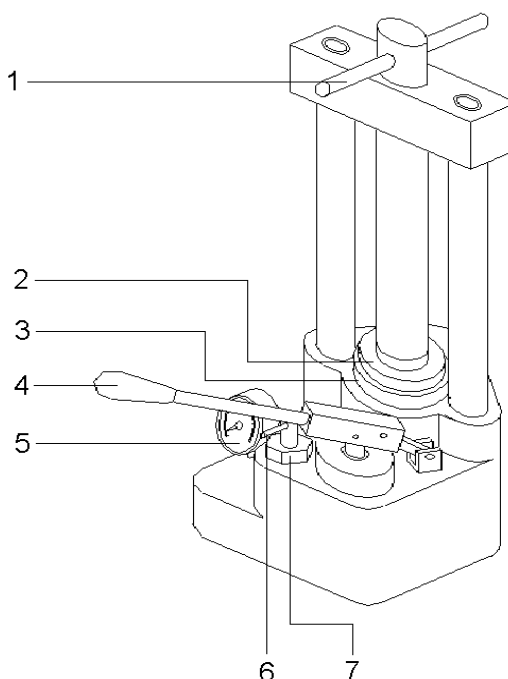

POS. 1:	PÁKOVÝ ŠROUB
POS. 2:	HORNÍ DESKA
POS. 3:	DOLNÍ DESKA
POS. 4:	PÁKA ČERPADLA
POS. 5:	MANOMETR
POS. 6:	PÁKA VENTILU
POS. 7:	VENTILOVÝ ŠROUB

Když je baňka připravena, otočte centrálním šroubem pomocí páky 1, abyste zvedli horní desku. Pro provedení této operace je nutné, aby lis NEBYL pod tlakem: otevřete ventil 6, abyste to zkontrolovali.

Vložte baňku a utáhněte ji mezi dvěma deskami pomocí páky 1.

Uzavřete ventil otočením páky 6 ve směru hodinových ručiček.

Použijte páku 4 k vytvoření tlaku: po několika pumpnutích se ručička manometru 5 pohne, dokud nebude dosažen pracovní tlak.

Správný tlak působící na baňky je 200 bar.

Nedoporučujeme používat tlak vyšší než 200 bar: příliš vysoká síla může baňky poškodit.

Konstrukce je těsná, proto není třeba doplňovat olej. Pokud však během přepravy došlo k úniku oleje, lze jej dolít do nádrže povolením šroubu ventilu 7.

Lze použít běžný hydraulický olej dostupný na trhu.



Doporučujeme udržovat lis vždy dobře čistý, aby se zabránilo vniknutí prachu nebo nečistot do hydraulického okruhu.

POZOR: V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPOUŽÍVEJTE TLAK VYŠŠÍ NEŽ 400 BAR!

Pro jakýkoli servisní úkon doporučujeme kontaktovat svého prodejce nebo kvalifikovaného opraváře.

HYDRAULICKÝ LIS SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

POS	CODE	DESCRIPTION
1	5701010	Základová deska
2	-	Šroub M5x70
3	-	Šroub M14x45
4	5701019	Pružina
5	5701020	Sedlo ventilu
6	5701021	Kolík
7	5701022	Kulička
8	5701018	Manometr
9	5701023	Ventil
10	5701024	Táhlo ventilu
11	NPOR2012	Těsnění OR 2012
12	5701025	Matice ventilu
13	NPOR112	Těsnění OR 112
14	5701014	Sloupek
15	5701015	Deska
16	-	Šroub M6x12
17	5701012	Šroub TPN 30
18	5701011	Příčný díl
19	-	Šroub M14x45
21	5701013	Pákový šroub
22	5701026	Knoflík
23	5701027	Páka čerpadla
24	5701028	Konec páky
25	5701029	Kroužek Benzing 4
26	5701030	Kolík
27	5701031	Spojovací táhlo
28	5701044	Píst čerpadla
29	-	Šroub M5x20
31	5701032	Podpěra
32	5701033	Matice
33	NPOR3137	Těsnění OR 3137
35	5701034	Těleso čerpadla
35P	5701002	Sestavené čerpadlo
36	5701035	Kulička
37	-	Šroub M6x8
38	5701036	Pružina
39	5701037	Těsnění UM 125
40	5701038	Ventil
41	5701039	Seeger I 12
42	5701040	Těsnění ½ Gas
43	5701016	Deska
44	5701017	Píst
45	NPOR3275	Těsnění OR 3275
46	5701041	Těsnění UM 7050
47	5701042	Matice ventilu
48	5701043	Distančník
49	NPOR3030	Těsnění OR 3030

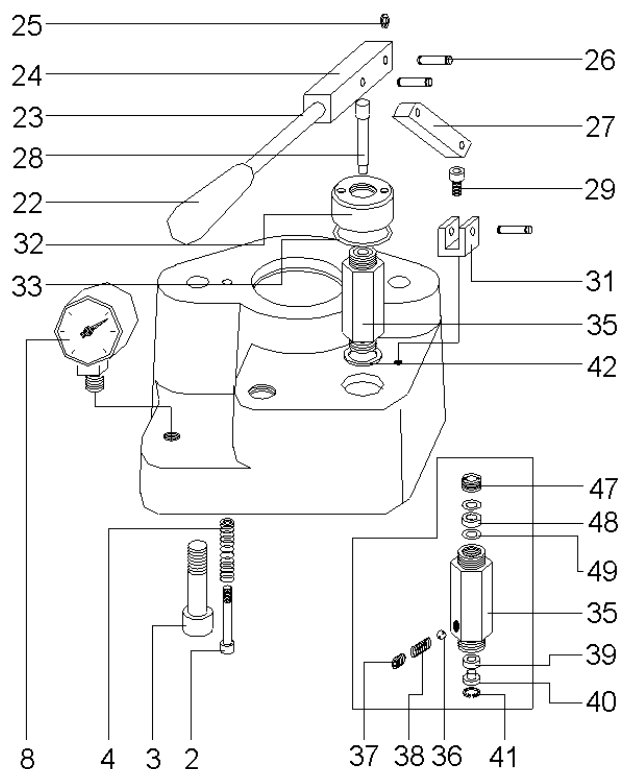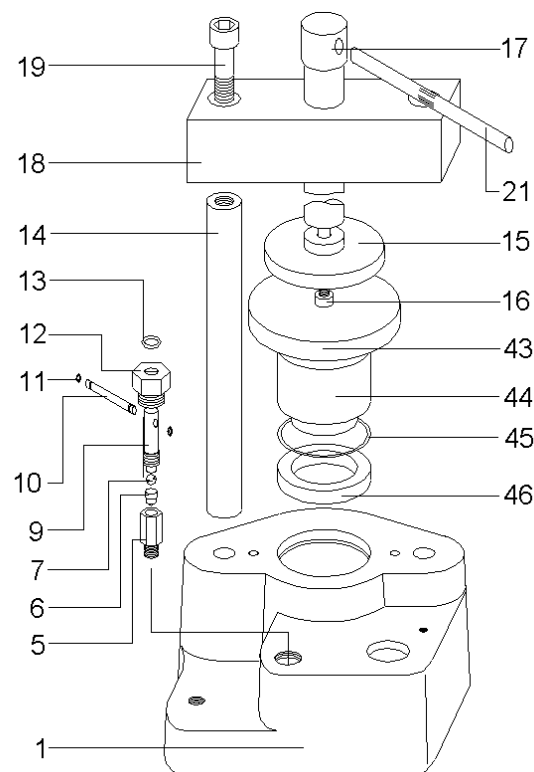

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

PRACOVNÍ TLAK	TLAK 200 BAR
MAX. TLAK	TLAK 400 BAR
PRACOVNÍ TLAKOVÁ SÍLA	75000 N
MAX. TLAKOVÁ SÍLA	150000 N
MAX. VZDÁLENOST MEZI DISKY	235 MM
KAPACITA BAŇEK	AŽ 3
VÝŠKA	480 MM
ŠÍŘKA	200 MM
HLOUBKA	190 MM
HMOTNOST	20 KG

TECHNICKÉ REFERENČNÍ PŘEDPISY A ZKUŠEBNÍ POSTUPY

Toto zařízení je sériově vyráběno společností Dentalfarm v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy, jak je stanoveno směrnicí 2006/42 ES o strojních zařízeních. Výrobek je označen značkou CE a je doplněn Prohlášením o shodě.

Pečlivá kontrola a úplné rutinní testování jsou prováděny jednotlivě na každém stroji.

LIKVIDACE A ODSTRANĚNÍ ODPADU

Tato jednotka není klasifikována jako AEE (elektrické a elektronické zařízení, jehož správná funkce závisí na elektrických proudech a elektromagnetických polích); proto se na ni směrnice 2002/96 ES nevztahuje.

DENTALFARM s.r.l.

Via Susa, 9/a - 10138 TORINO – ITALY

☎ (+39) 011/4346632 - 011/4346588

📠 011/ 4346366

E-mail: **info@dentalfarm.it**

www.dentalfarm.it