

# Ultradent SPECIAL



# 1 2026

8. 1. - 1. 3. 2026



*Vybělené zuby  
pomohou rozzářit  
váš svět*



25%  
sleva

## Opalescence® PF

### Bezpečné bělení bez rizika poškození zubů:

- Opalescence má pH 6,9
- Dlouhodobá výdrž vyběleného odstínu (až několik let)
- Zaručený bělicí výkon po celou dobu životnosti gelu = předvídatelná doba bělení a výsledky u většiny pacientů
- 20% vody chrání před dehydratací zubů a návratem k původnímu odstínu
- formula PF (fluorid sodný a dusičnan draselný) minimalizuje citlivost při a po bělení

Příchuť: máta, meloun, bez příchutě.

Doba bělicího cyklu: v průměru 5-10 aplikací.

1/3–1/2 stříkačky na 1 nosič

Noční bělení Opalescence® PF 10%

10 % karbamidu peroxidu

Doba 1 aplikace: 8-10 hodin/ noc

Denní bělení Opalescence® PF 16%

16 % karbamidu peroxidu

Doba 1 aplikace: 4-6 hodin/ den

Vybělené zuby s úžasně dlouhou výdrží odstínu (až několik let) – není třeba přebělovat každý měsíc!

#### Patient Kit

1x 1,2 ml stříkačka Opalescence® PF

1x 20 ml měřicí nádobka Opalescence 1x krabička na nosiče

1x kartička s instrukcemi

1.999 Kč

#### Doctor Kit

1x 1,2 ml stříkačka Opalescence® PF 2x 10 ml Soft Tip

1x 1,2 ml LC Bypass Gel Barrel 1x 20 ml měřicí nádobka Opalescence

1x krabička na nosiče 1x kartička s instrukcemi

2.199 Kč

Refill 40x 1,2 ml stříkačka Opalescence® PF

7.030 Kč

## TIP

Bělení doplňte Bělicí zubní pastou Opalescence Original nebo Opalescence Sensitivity Relief. Pro výrobu bělicího nosiče používejte fólie o tloušťce 0,9 mm, silnější fólie mohou být příčinou citlivosti zubů při bělení. Bělicí nosič MUSÍ MÍT rezervoáry! Bez nich je významně snížen účinek bělení a prodlužuje se celková doba bělení.



opalescence\_czech\_and\_slovakia

# Opalescence go

- jednoduše
- pohodlně
- s krátkou dobou aplikace

15%  
sleva

## Opalescence GO 6 % - univerzální nosič s 6% peroxidu vodíku okamžitě k použití

"Bělení za pochodu": bez otiskování, bez laboratorní práce,  
bez čekání na zhotovení bělicího nosiče.  
Nosičena jedno použití - se po nasazení přizpůsobí tvaru pacientova chrupu tak,  
že gel zůstává v nosiči a nevytéká.  
Profesionální vybělení zubů ve frontálním i distálním úseku chrupu.  
Dlouhodobá výdrž vyběleného odstínu (v průměru několik let).  
Formula PF (dusičnan draselný a fluoridy) snižují citlivost.  
20% vody snižuje dehydrataci v průběhu bělení a relaps k původnímu odstínu.  
Doba 1 aplikace: 60-90 minut/ den.  
Doba bělicího cyklu: 5-10 aplikací.

Vhodné i na oživení a prodloužení trvanlivosti odstínu po předchozím ordinacním bělení nebo po profesionálním čištění zubů.  
Vhodné i pro pacienty s rovnáčky.



**Pacient kit 2.140 Kč 2.510,-**  
(10× dolní + 10× horní nosič  
+ Opalescence zubní pasta 30 ml),  
příchuť: máta, meloun

**Mini kit 1.020 Kč 1.190,-**  
(4× dolní + 4× horní nosič)  
příchuť: máta

## Opalescence™ whitening toothpaste

### ZUBNÍ PASTA OPALESCENCE™ CHRÁNÍ ZUBY PŘED KAZEM A PIGMENTACÍ. SKVĚLE UDRŽÍ BÍLÝ ODSŮN. SKVĚLE CHUTNÁ.

- Jedinečná směs tri-oxidu křemičitého aktivně odstraňuje povrchové skvrny.
- Odstraněním povrchových skvrn zesvětlí zuby o dva odstíny jen za jeden měsíc\*.
- Bezpečná pro každodenní, dlouhodobé použití, vhodná pro celou rodinu.
- Výjimečně vstřebávání fluoridu sodného, pomáhá lépe chránit před kavitami a posiluje sklovinu.
- Sladidlo Xylitol pomáhá snižovat riziko zubního kazu.
- Nizkoabrazivní. 78 RDA zajišťuje maximální ochranu skloviny, dentinu a výplně<sup>1</sup>.
- Vhodná i pro nebělené zuby.
- Neobsahuje Triclosan ani oxid titaničitý.

**Bělicí zubní pasta Opalescence™ Original**  
4,8× větší absorpce fluoridů sklovinou (splňuje specifikace ADA)  
500401 100 ml **239 Kč 285,-**

**Bělicí zubní pasta Opalescence™ Sensitivity Relief**  
5% dusičnan draselný pro snížení citlivosti  
snižuje citlivost zubů – např. při a po bělení  
503470 100 ml **259 Kč 305,-**



**Tip:**

Chcete bělit a máte citlivé zuby?  
Začněte používat Bělicí zubní  
pastu Opalescence™  
již 14 dní před bělením.  
Pomůže vám snížit nebo  
odstranit citlivost.

# UltraEZ™

Desensitizing Gel

## STOP citlivosti zubů: s úsměvem i po ordinačním bělení

**Jedinečný gel pro rychlou úlevu při citlivosti zubů.**

Gel s 3% dusičnanu draselného a 0,25 % fluoridu sodného s postupným uvolňováním KNO<sub>3</sub>. Okamžitý účinek.

Nosiče naplněné gelem se v ústech přizpůsobí individuálnímu zubnímu oblouku pacienta. Dostupný i ve stříkačkách - plnění do individuálních nosičů.

**Použijte při citlivosti a obnažení zubních krčků:**

- při citlivosti na změny tepla a chladu
- při odstraňování zubního kamene
- před bělením (i 1/2 hodiny bezprostředně před bělením), v průběhu a po bělení

|                                                |          |         |
|------------------------------------------------|----------|---------|
| UltraEZ™ Combo Kit 10× horní a 10× dolní nosič | 2.040 Kč | 2.550,- |
| UltraEZ™ Mini Kit 4× horní a 4× dolní nosič    | 920 Kč   | 1.140,- |
| UltraEZ™ stříkačka; 4× 1,2 ml                  | 920 Kč   | 1.150,- |

**Tip:**

Použijte jako závěrečné ošetření při citlivosti po ordinačním bělení.

20%  
sleva



## UltraSeal XT hydro™

**Jediné hydrofilní pryskyřičné pečetadlo fisur a jamek.**

- tixotropní pečetadlo na bázi pryskyřice Bis-GMA s ideální viskozitou a tekutostí
- hydrofilní před polymerací - **nevadí vlhkost na okluzi**
- hydrofobní po polymeraci
- pokročilá adhezivní technologie - zvýšená retence
- **fluorescentní** - viditelné pod UV světlem při každé kontrole
- plnění 53 % - odolné vůči otěru
- uvolňuje/ propouští fluoridy
- radiopákní



Před aplikací

Po aplikaci

Fluorescentní pod UV světlem



Kit:  
1× 1,2 ml stříkačka UltraSeal XT hydro™  
1× 1,2 ml stříkačka Ultra-Etch™  
20× kanyla Blue Micro  
20× kanyla Inspirail Brush  
Barva: natural, opákní bílá

5.760 Kč 6.400,-


Refill: 4× 1,2 ml

4.050 Kč 4.500,-

\*Sleva platí při objednání dalších 2 produktů Ultradent.

10%  
sleva\*

bakterie způsobující zubní kaz

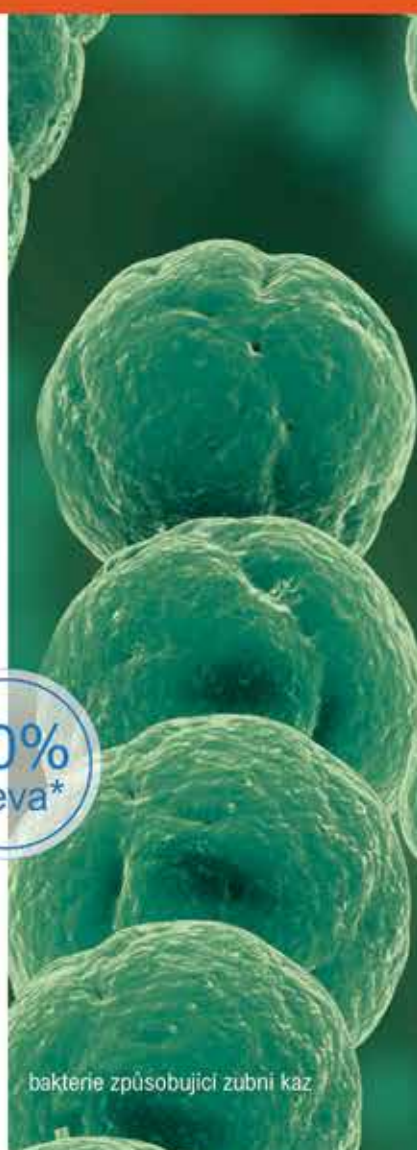

**Peak™ Universal Bond** – světlem tuhnoucí adhesivum s 0,2% chlorhexidinu

**Peak™ SE Primer** – samoleptací primer s pH 1,2

- Pro všechny dentální materiály (dentin, sklovina, kov, keramika, kompozit i **zirkon**).
- Nejvyšší pevnost vazby k dentinu (71,3MPa) a ke sklovině (51,7 MPa)
- Pro techniku Total-Etch, i Self-Etch.
- Nízký obsah plniva (7,5 %) a minimální tloušťka filmu 2µm
- Pro přímé i nepřímé rekonstrukce, bondování kořenových čepů a endodontických ošetření
- Etylalkohol jako rozpouštědlo

25%  
sleva

504553 Peak Universal Bond Refill 4× 1,2ml stříkačka  
504543 Peak Universal Bond 1× 4 ml lahvička 4 ml  
505135 Peak SE Primer 4× 1,2ml stříkačka

|          |         |
|----------|---------|
| 2.670 Kč | 3.560,- |
| 1.980 Kč | 2.630,- |
| 2.210 Kč | 2.940,- |



**ULTRA-ETCH™**

## Samolimitující leptadlo pro minimalizaci citlivosti

**Leptadlo s 35% kyselinou fosforečnou**

- samolimitující chemie leptá jen do hl. **1,9µm**
- penetruje do nejmenších fisur, ale nestéká na vertikálních površích
- neobsahuje polymery, nezanechává rezidua
- tixotropní, snadno proteče kanylou
- expirační doba **48 měsíců**

20%  
sleva

500685 Ultra-Etch Indispense 30 ml  
500163 Ultra-Etch Intro Kit 4× 1,2 ml + 20× kanyla  
500167 Ultra-Etch Econo kit 20× 1,2 ml + 40× kanyly  
500164 Ultra-Etch Refill 4× 1,2 ml  
500168 Ultra-Etch Refill 20× 1,2 ml

|          |         |
|----------|---------|
| 2.360 Kč | 2.950,- |
| 1.410 Kč | 1.760,- |
| 3.570 Kč | 4.460,- |
| 1.200 Kč | 1.500,- |
| 2.960 Kč | 3.700,- |



[bit.ly/ultra-etch](http://bit.ly/ultra-etch)

Více balení viz Ultradent katalog 2024 str. 58

Hu-Fa Výhradní dovozce v ČR a SR

*Nyní i v nových barevných variacích*



506539 VALO X Onyx Black  
506519 VALO X Twilight Blue  
506499 VALO X Nebula Green  
506498 VALO X Stardust Gray  
506497 VALO X Aurora Pink  
506496 VALO X Horizon Red  
506538 VALO X Galaxy Purple

Kit 506xxx: **52.690 Kč** 58.460,-

1 × VALO X LED COLOR lampa  
1 × externí difuzní čočka  
2 × nabíjecí baterie  
1 × nabíječka baterií  
1 × el. kabel pro napájení nabíječky  
nebo šňůrového adaptéru  
**(adaptér není součástí balení)**  
držáček na lampu  
1 × oranžový ochranný štítek proti  
modrému světlu  
1 × vzorkové balení ochranných návléků.  
**NEOBSAHUJE 4 × externí čočku.**

**VALO™ X**

Širokospektrální LED polymerační lampa.



**10%  
sleva**

Kit 505973: **60.190 Kč** 66.840,-

1 × VALO X LED lampa (klasická)  
**5 × externí čočka** (polymerační bodová  
polymerační ProxiBall  
diagnostická interproximální  
diagnostická transluminační  
diagnostická UV světlo)  
2 × nabíjecí baterie  
1 × nabíječka baterií  
1 × el. kabel pro napájení nabíječky  
nebo šňůrového adaptéru  
**1 × šňůrový adaptér**  
držáček na lampu  
1 × oranžový ochranný štítek proti  
modrému světlu  
1 × vzorkové balení ochranných návléků

- Průměr čočky 12,5 mm.
- Výkonné **speciální LED diody** (8 polymeračních, 4 pro bílé světlo).
- Rozsah vlnových délek 380–515 nm.
- Pro polymeraci všech dentálních materiálů včetně bulk- fill materiálů.
- Horní a spodní podsvětlené tlačítko s barevnou indikací režimu.
- Štíhlejší tělo z leteckého hliníku vysoce odolné proti poškození.
- Ergonomický design s plochou hlavičkou s výborným dosahem do všech částí úst.
- **Funkce Akcelerometr**-přepínání mezi polymeračními a/ nebo diagnostickými režimy pohybem zápěstí.
- Možnost jednoduše změnit napájení VALO X z bateriového na napájení ze sítě pomocí adaptéru, (adaptér **NENÍ** součástí balení).

## 2 polymerační a 2 diagnostické režimy

### Polymerační režim:

širokospektrální LED diody  
2 polymerační výkony:  
standard (1100 mW/cm<sup>2</sup>, 10 sekund),  
extra vysoký pulsní (2 200 mW/cm<sup>2</sup>,  
5 sekund 3 × puls s prodlevou)

### Diagnostické režimy:

UV světlo pro detekci fluorescenčních materiálů  
(např. pečetidla fisur, výplně, indikátory plaku aj.).  
Bílé světlo pro přesnější odečet barvy zubu, výplní, protetiky,  
určení odstínu při bělení aj.  
Kompatibilní s externími polymeračními a diagnostickými čočkami  
VALO X (**NEJSOU** součástí balení).

**10%  
sleva**

**ZÁRUKA  
5 LET!!**

## Tip:

Při polymeraci používejte  
ochranné návlěky VALO  
X/ VALO Grand: chráníte  
čočku polymerační lampy  
před znečištěním. Znečištěná  
nebo poškozená čočka = nižší  
polymerační výkon.

- Průměr čočky 12,5 mm.
- Výkonné **speciální LED diody** (8 polymeračních, 4 pro bílé světlo).
- Rozsah vlnových délek 380–515 nm.
- **Funkce Akcelerometr**-přepínání mezi polymeračními a/ nebo diagnostickými režimy pohybem zápěstí.
- Možnost jednoduše změnit napájení VALO X z bateriového na napájení ze sítě pomocí adaptéru (je součástí balení).

## 2 polymerační a 2 diagnostické režimy

### Polymerační režim:

širokospektrální LED diody  
2 polymerační výkony: standard (1100 mW/cm<sup>2</sup>, 10 sekund),  
extra vysoký pulsní (2 200 mW/cm<sup>2</sup>, 5 sekund 3 × puls s  
prodlevou).

### Diagnostické režimy:

UV světlo pro detekci fluorescenčních materiálů (např. pečetidla  
fisur, výplně, indikátory plaku aj.).  
Bílé světlo pro přesnější odečet barvy zubu, výplní, protetiky,  
určení odstínu při bělení aj.  
Externí polymerační a diagnostické čočky VALO X,  
(**JSOU** součástí balení - 5 ks celkem).

# PRO HLUBOKOU HEMOSTÁZU

## ViscoStat™

- viskózní **hemostatický** koagulační gel **s 20% síranu železitého**
- hloubková aktivní hemostáza během několika sekund pro středně silné krvácení
- brání kontaminaci sulkulární tekutinou během bondování
- velmi šetrný ke tkáním
- pro každodenní použití při operativních zákrocích, periodontálním ošetření, gingivektomii
- vynikající jako fixátor při pulpotomii – alternativa Formocresolu, šetrnější ke tkáním

|                                                                                                                         |          |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 500647 Indispense Kit: 1× 30 ml ViscoStat + 20× kanyla Metal Dento-Infusor Comfort Hub+<br>20× 1,2 ml prázdné stříkačky | 2.560 Kč | 2.840,- |
| 500645 Indispense: 1× 30 ml ViscoStat                                                                                   | 1.810 Kč | 2.010,- |
| 503093 Intro Kit: 4× 1,2 ml + 20 kanyla Metal Dento-Infusor Comfort Hub+                                                | 940 Kč   | 1.040,- |



## ViscoStat Clear™

- transparentní gel **pro slabé krvácení v estetických zónách**
- **nezabarvuje tkáň**, zůstává v sulku, nezanechává rezidua,
- nestéká

|                                                                                                                             |          |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 506409 Intro Kit: 4×1,2ml ViscoStat Clear + 20x kanyla Metal Dento-Infusor Comfort Hub                                      | 1.080 Kč | 1.200,- |
| 506407 Indispense Kit: 1×30 ml ViscoStat Clear + 20× kanyla Metal Dento-Infusor Comfort Hub +<br>20×1,2ml prázdné stříkačky | 2.960 Kč | 3.280,- |
| 506408 Indispense: 1×30 ml ViscoStat Clear                                                                                  | 2.080 Kč | 2.310,- |



## Astringedent X™

- **hemostatický roztok s 12,7 % síranu železnatého a subsulfátů**
- pro speciální případy těžkého krvácení (pro hemofiliky, pacienty s Coumadinem aj.)
- méně kyselý než jiné preparáty subsulfátů železa

|                                                         |          |         |
|---------------------------------------------------------|----------|---------|
| 500690 Astringedent X Indispense: 1× 30ml               | 1.760 Kč | 1.950,- |
| 500112 Astringedent X lahvička 30 ml                    | 1.810 Kč | 2.010,- |
| 505881 <b>Nové:</b> Astringedent X 20× 1,2 ml stříkačky | 3.860 Kč | 4.280,- |



## Kanyla Metal Dento-Infusor™ Comfort Hub:

- tupá, zahnutá kanyla s chomáčkem na kartáčku umožňuje jemně přitlačit do sulku
- precizní aplikace hemostatik, účinné odstraňování povrchového koagula.
- Důkladná a rychlé hemostáze bez poranění sulku. Vyvine vyšší tlak.
- **Kanyla Blue Mini Dento-Infusor™**
- je vhodnější při aplikacích k zabránění tvorby sulkulárních tekutin, při větším tlaku lehce pruží.

Použití: ViscoStat, ViscoStat Clear, Astringedent, Astringedent X

|                                      |          |         |
|--------------------------------------|----------|---------|
| 504954 kanyla MDI Comfort Hub 20 ks  | 560 Kč   | 620,-   |
| 504955 kanyla MDI Comfort Hub 100 ks | 2.420 Kč | 2.680,- |




**SLEVA  
10%**

Na všechny produkty  
z této stránky.

## Ultrapak™ **splétané vlákno**

- **Snadné zavedení**
- **Vynikající absorpce**
- **Bezkonkurenční retrakce**

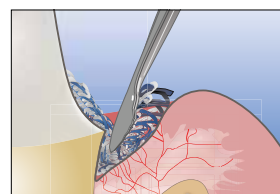

Vlákno ze 100% bavlny, propletené do tvaru uzavřeného tubulu se během zavádění stlačí, takže se dobře napěchuje do sulku. Poté díky řízené expanzi optimálně odtáhne tkáň.

|                                                                                      |          |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Balení:                                                                              |          |         |
| 509330 Ultrapak sada 4 ks - č.00, 0, 1, 2 + stojánek                                 | 2.260 Kč | 2.510,- |
| 509331 Ultrapak vlákno č.000 (černé)                                                 | 690 Kč   | 760,-   |
| 509332 Ultrapak vlákno č.00 (žluté)                                                  | 610 Kč   | 670,-   |
| 5093xx Ultrapak vlákno č. 0 (fialové), č.1 (modré),<br>č. 2 (zelené), č. 3 (červené) | 560 Kč   | 620,-   |



K dispozici v šesti  
univerzálních velikostech  
a bez adrenalinu

**RETRAKTOR TVÁŘÍ, RTŮ A JAZYKA**
**Umbrella™**

- Dobře rozevře rty pacienta, chrání jazyk.
- Umožní vám dobře vidět i v distálním úseku chrupu.
- Spolehlivě drží, zvyšuje bezpečnost ošetření.
- Pro pacienta je velmi pohodlný, netlačí ani při delším ošetření.

**Jak zvolit velikost Umbrelly?**

- Pokud pacient potřebuje velikost otiskovací lžice 2-3, zvolte Umbrellu Medium.
- Pokud pacient potřebuje velikost otiskovací lžice 4-6, zvolte Umbrellu Large.
- Pokud si neste velikostí jisti, zvolte Umbrellu Large.


**TIP**

Bezpečný při  
ordinačním bělení,  
nesklouzává,  
nepřekáží.



5. Zkontrolujte, zda jazyk pacienta pohodlně  
leží za chráničem, což zajišťuje snadný přístup.

**NEPOKLÁDEJTE** chránič jazyka na horní  
stranu jazyka pacienta.

Umbrella M/L, 40 ks | **2 970,-\*\***

**3 300,-**

Umbrella M/L, 20 kusů | **1 584,-\*\***

**1 760,-**

Umbrella M/L, 5 kusů | **432,-\*\***

**480,-**

**FLUORIDOVÝ LAK PRO DĚTI, Dospívající i Dospělé**
**Fluoridový lak Enamelast™**

- 5% fluoridu sodného (22 000ppm fluoridových iontů).
- Zvýšená retence.
- Dlouhodobé uvolňování a nadprůměrné vstřebávání fluoridových iontů.
- Hladká textura po aplikaci, na zubech téměř neviditelný.
- Nedávivé složení.
- Snadná a rychlá aplikace příjemná pro všechny typy pacientů.
- Příchutě: Walterberry, pomerančový krém, žvýkačka, chladivá máta a karamel, **bez příchutě**.
- **Jediný fluoridační lak vhodný i pro děti mladší 1 roku: chrání zuby dětí od samého začátku**

**TIP**

Výborný pro  
remineralizaci skloviny  
při počínajících kazech.



chladivá  
máta



karamel



pomerančový  
krém



žvýkačka



lesní ovoce  
pana Waltera



neutrální



blistr - 200x 0,4 ml | **12 888,-\*\***

**14 320,-**

blistr - 50x 0,4 ml | **3 663,-\*\***

**4 070,-**

stříkačky 20x 1,2 ml | **3 339,-\*\***

**3 710,-**

stříkačky Walterberry 2x 1,2 ml | **396,-\*\***

**440,-**

**K DLOUHODOBÉ SNÍŽENÍ CITLIVOSTI**
**Universal Dentin Sealant**

- Blokátor dentinových tubulů.
- Vytvoří dočasnou bariéru proti baktériím, kyselinám, cementům, pryskyřicím, aj.
- Rychlé použití: nanést a osušit, NEPOLYMERUJE SE.
- Dlouhodobý účinek (týdny až měsíce).

**Ideální k:**

- pokrytí citlivých kořenů po root planingu
- omezení postoperační citlivosti po výkonu
- po parodontologickém ošetření
- **pečetění citlivých krčků před bělením**

- Balení: kit 4x1,2ml stříkačka + 20 kanyl
- Expirační doba: 60 měsíců.



Před aplikací kyseliny  
fosforečné byl povrch ošetřen  
Universal Dentin Sealantem.



Na oba povrchy aplikována  
kyselina fosforečná na 20 sec.




refill - 4x 1,2 ml | obj. č. 500266 | **2 457,-\*\***

**2 730,-**

**KOMPLETNÍ SADA NA OPRAVU KERAMIKY,  
PRO INTRAORÁLNÍ I EXTRAORÁLNÍ POUŽITÍ**

**Porcelain Repair kit**

- **Porcelain Etch**: Pufrovaná 9% kyselina fluorovodíková.
- **Silane**: silan po leptání keramiky.
- Pro intraorální i extraorální leptání keramiky.
- Nestéká, nezabaruje kompozity ani pryskyřičné cementy.
- 90 sekund leptání, oplach, 60 sekund Ultradent® Silane.
- Vhodné i na lithium-disilikátovou protetiku (IPS e.max®).

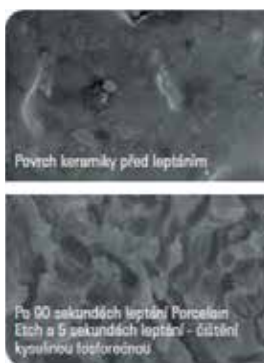

|                                                                                    |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Porcelain Repair Kit   obj. č. 501108   <b>6 804,-**</b>                           | <b>7 560,-</b> |
| Porcelain Etch Kit   obj. č. 500405   <b>3 321,-**</b>                             | <b>3 690,-</b> |
| Porcelain Etch + Silane - 2x 1,2 ml + 20 kanyl   obj. č. 501019   <b>1 737,-**</b> | <b>1 930,-</b> |
| Porcelain Etch refill - 2x 1,2 ml   obj. č. 500406   <b>1 242,-**</b>              | <b>1 380,-</b> |
| Silane refill - 2x 1,2 ml   obj. č. 500410   <b>990,-**</b>                        | <b>1 100,-</b> |

**ZVLHČOVACÍ PRYSKYŘICE PRO SNAŽŠÍ PRÁCI S KOMPOZITY**

**Composite Wetting Resin**

- Světlem tuhnoucí hydrofobní pryskyřice plněná ze 45%.
- Neobsahuje rozpouštědla.
- Uspodňuje modelaci tužších kompozit, zabraňuje lepení na nástroj.
- Nezeslabuje otěruvzdornost a pevnost kompozitu.
- **Extremně dlouhá expirační doba 40 měsíců.**

**TIP**

Nepoužívejte ke zvlhčení kompozitů bondy. Bondy jsou plněny z cca 7%, obsahují rozpouštědla a/nebo leptací složku a jejich použití ke zvlhčení vede k oslabení kompozitní výplně.



|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| 2x 1,2 ml   obj. č. 503059   <b>2 070,-**</b> | <b>2 300,-</b> |
|-----------------------------------------------|----------------|

**UNIVERZÁLNÍ KOMPOZIT - POUZE JEDEN ODSTÍN STAČÍ - UNIVERZÁLNÍ  
KOMPOZIT VŽDY, PRO KAŽDOU VÝPLŇ.**

**Transcend**

- Nanohybridní kompozit na bázi Bis – GMA,
- Naplněn z 60-61 % objemově (71 % váhově).
- Unikátní Ultradent´s RPM technologie-chameleon efekt s vynikajícími optickými a fyzikálními vlastnostmi.
- Odstín **Universal Body** splyne s okolním zubem/zuby. Umožňuje použít **pouze 1 odstín**. Přesně vyvážená translucence a opacita. Výborný pro rekonstrukce bělených zubů.
- Výborně leštitelný s dlouhodobou výdrží lesku.
- Fluorescence blíží se přirozenému zubu.
- Možnost dalších dentinových a skloviných odstínů (např. pro výplně tř. III a tř. IV)

**TIP**

Pro změkčení a lepší modelovatelnost jakéhokoli kompozitu použijte Composite Wetting Resin.



První kompozit, který se po vybělení zubů nemusí nahradit světlejším kompozitem. Splyne s odstínem okolních zubů. Jestliže pacient bude bělit bělícími gely Opalescence™, výplně se přizpůsobí světlejšímu odstínu.

|                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| stříkačka 4 g   <b>2 232,-**</b>                                  | <b>2 480,-</b>  |
| komple, 10 x 0,2g   <b>1 287,-**</b>                              | <b>1 430,-</b>  |
| Econo Kit stříkačky 4x4g, exp. 31.05.2026   <b>8 380,-**</b>      | <b>3 490,-*</b> |
| Intro Kit - stříkačky 7 x 4g, exp. 28.02.2026   <b>13 860,-**</b> | <b>4 990,-*</b> |

**PĚČETIDLO KOMPOZITNÍCH VÝPLNÍ**

**PermaSeal™**

- Světlem tuhnoucí metakrylátová neplněná pryskyřice.
- Váže se ke kompozitu a naleptané sklovině.
- Utěšňuje mikrospáry a nepravidelnosti kompozitních výplní.
- Zabraňuje mikroprůsakům, snižuje možnost zabarvení okrajů výplní.
- Chrání a revitalizuje provizorní pryskyřičné náhrady, vytváří vysoký lesk.
- Slouží ke zvlhčení Ribbond vláknů.



Před aplikací

Zpolymerovaný PermaSeal

**TIP**



|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| refill - 4x 1,2 ml   obj. č. 500631   <b>3 231,-**</b>  | <b>3 590,-</b> |
| mini kit 2x 1,2 ml   obj. č. 501013K   <b>2 106,-**</b> | <b>2 340,-</b> |

\* Nabídka platí do vyprodání zásob.

**DENTINOVÝ LINER A BÁZE**
**Ultra-Blend™ Plus**

- Světlem aktivovaný, RTG kontrastní liner s hydroxidem vápenatým v uretan-dimetakrylátové (UDMA) bázi.
- Dokonalý materiál pro překrytí dřene.
- Vynikající uvolňování kalcia.
- Nerozpustí se časem.
- Vysoce plněný.

**TIP**

Použijte k překrytí MTAFlow při překrytí pulpy před zhotovením výplně.



kit | obj. č. 500415 | **3 114,-\*\***

**3 460,-**

mini kit 2x1,2 ml + kanyly | obj. č. 501016 | **1 692,-\*\***

**1 880,-**

refill 4x 1,2 ml | obj. č. 500417 | **2 754,-\*\***

**3 060,-**

**KOMPOZIT PRO ESTETICKÉ NÁHRADY DÁSNÍ**
**PermaFlo™ Pink**

- Vynikající alternativa ke gingivoplastikám.
- Maskovací přípravek u výplní třídy V, kde je obnažená struktura kořene.
- Maskování ústupu dásně od korunky.



Rychle se šíří kazy u 3letého dítěte.



PermaFlo Pink: zamaskujte úbytek gingivy okolo cervikální výplně.



O jeden rok později.



Pink - 2x 1,2 ml | obj. č. 500963 | **2 673,-\*\***

**2 970,-**

**NEJZATĚKAVĚJŠÍ FLOW KOMPOZIT NA TRHU**
**PermaFlo™**

- První vrstva při zhotovení kompozitních výplní na dno kavity.
- Ideální pro **dostavby chrupu v pediatrii** a ošetření mikrokavit.
- Pro upevnění transparentních inlejí, onlejí a fazet, přímé fazety a výplně I.-V. třídy.
- Světlem tuhnoucí, radiopákní.
- Plněn z 68% nanočásticemi o velikosti 7 µm.



VYSOKÉ NAPLNĚNÍ  
VYSOKÁ TEKUTOST!



Dentin Opaquer - 2x 1,2 ml + 4 kanyly | obj. č. 501005 | **1 890,-\*\***

**2 100,-**

A1, A2, A3, B1, - 2 x 1,2 ml + 4 kanyly | **1 944,-\*\***

**2 160,-**

**KOMPOZIT PRO UTĚSNĚNÍ A SNADNOU INDIKACI VSTUPU DO ENDODONTICKY OŠETŘENÝCH KORENOVÝCH KANÁLKŮ**
**PermaFlo™ Purple**

- Flow kompozit fialové barvy.
- K zapečetění a identifikaci endodonticky ošetřených kanálků a/nebo dna pulpy.
- Brání mikroprůsakům.
- **Neprosvítá přes výplně.**



1. Ošetřený zaplněný kanálek.



2. Aplikace bondu.



3. Aplikace PermaFlo Purple.

**TIP**

K aplikaci použijte kanylu Micro 20ga (katalog UD str. 125).



Purple - 2x 1,2 ml + 4 kanyly | obj. č. 500962 | **2 637,-\*\***

**2 930,-**

**JEDNORÁZOVÉ MATRICE**
**Omni-Matrix™**

- Rychlé, bezpečné, hygienické.
- Snadné nasazení, snadné sundání.
- Lepší viditelnost v místě zákroku a větší pohodlí pacienta.
- Matrice s křídélky – lepší fixace pozice.
- Matrice bez křidélek – snadné zavedení klínku.
- Univerzální, úzké, s kovovým nebo s mylarovým páskem.

- Kovové matrice s křídélky/ bezkřídle: 48 ks v balení:
- oranžové – 6,5 x 0,025mm
- zelené – 6,5 x 0,038mm
- fialové – 5,2 x 0,038mm
- červené – 6 x 0,064mm



kovové - 48 ks | **3 042,-\*\***


**3 380,-**

## PROVIZORNÍ SVĚTLEM TUHNOUCÍ PRYSKYŘICE

### J-Temp™

- Radioopákní, světlem tuhnoucí, zatékavá provizorní pryskyřice na metakrylátové bázi.

#### KLINICKÉ INDIKACE: 4 V 1

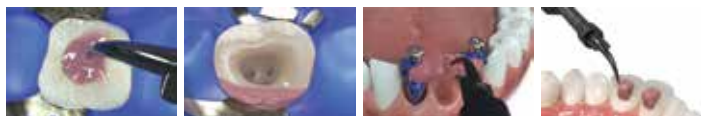

Dočasné výplně (endodontické, inlaye/onlaye, dostavba hrbolků, bělení walking bleach).

Doplnění zubní struktury pro upevnění koferdamové spony a jako bariéry proti endodontickým irigantům.

Dlahování mezi více kapkami implantátu při otiskcích k zamezení deformací otiskovacího materiálu.

Frontální nákusy a dočasné nákusné valy během ortodontické léčby, dočasné okluzní dostavby v ortodancii.



kit 4 x 1,2ml + 20 kanyl  
obj. č. 504897 | 1 377,-\*\*

1 530,-

## PROVIZORNÍ HYDROFILNÍ CEMENT BEZ EUGENOLU NA PRYSKYŘIČNÉ BÁZI

### UltraTemp™ REZ II FAST SET

- Dočasné střednědobé fixace protetiky na implantáty a protetiky s delší retencí (2-4 týdny).
- RTG kontrastní, fluorescentní pod UV světlem.
- Výborně těsní.
- Pohodlné dávkování složení „pasta-pasta“ duální stříkačkou s míchací kanylou.
- Nevhodný v kombinaci s peroxidovými přípravky!



UltraTemp REZ II Fast Set Kit | obj. č. 506061 | 2 772,-\*\*

3 080,-

## TĚSNĚNÍ A TMEL POD KOFFERDAM

### OraSeal™

- 1. zvyšuje ochranu před bakteriemi a průsaky při endodoncii
- 2. spolehlivě utěsňuje Dermadam i při protržení během výkonu, přilne pod slinami či kapalinami
- 3. vyblokuje podsekřiviny při otiskování
- 4. nutné utěsnění koferdamu při ordinacním bělení (jestliže se místo pryskyřičné gingivální bariéry používá koferdam)
- **Není třeba polymerovat, snadno jej odstraníte**



OraSeal kit | obj. č. 500352 | 1 755,-\*\*

1 950,-

OraSeal těsnění - 4x 1,2 ml | obj. č. 500351 | 1 404,-\*\*

1 560,-

OraSeal tmel - 4x 1,2 ml | obj. č. 500353 | 1 404,-\*\*

1 560,-

## POLYKARBOXYLÁTOVÝ PROVIZORNÍ CEMENT BEZ EUGENOLU

### UltraTemp™

- Hydrofilní, skvěle těsní, nepůsobuje citlivost.
- Lze jej snadno odstranit vodou před ztuhnutím.
- Pro 1–2 týdenní dočasnou fixaci náhrad - výborně drží, výborně se sundává, pahýly není třeba dlouze čistit.
- Pro uzavření kavity při **bělení nevitálních zubů metodou walking bleach** (neobsahuje pryskyřice).



1 x 5 ml + 20 kanyl | obj. č. 505916 | 2 772,-\*\*

3 080,-

## IZOLACE PŘI DENTÁLNÍCH VÝKONECH

### DermaDam™

- Koferdam k izolaci, nepudrovaný, vysoce odolný proti protržení.
- DermaDam medium 0,20mm 15x15cm, 36 ks
- DermaDam heavy 0,25mm 15x15cm, 36 ks



medium - 36 ks | obj. č. 500311 | 1 413,-\*\*

1 570,-

heavy - 36 ks | 1 860,- | obj. č. 500314

899,-\*

## ZAVÁDĚČ RETRAKČNÍHO VLÁKNA

### Fischers Ultrapak™ Packer

- Speciálně navržený pro zavádění pletených retrakčních vláken Ultrapak.
- Tenké vroubkované ostří zabrání sesmeknutí vlákna.
- Menší pravděpodobnost poranění měkkých tkání při zavádění vlákna.
  - provedení 45° k rukojeti – nejčastěji používané
  - provedení 90° k rukojeti
- 2 velikosti
- **Balení:**
  - Fischer's Ultrapak Packer malý 45°
  - Fischer's Ultrapak Packer střední 45°
  - Fischer's Ultrapak Packer malý 90°
  - Fischer's Ultrapak Packer střední 90°



1 ks | 2 079,-\*\*

2 310,-

1 ks, střední 90° | 2 310,- | obj. č. 500172

899,-\*

\* Nabídka platí do vyprodání zásob.