




DENTÁLNÍ PROGRAM 2018 · 2019

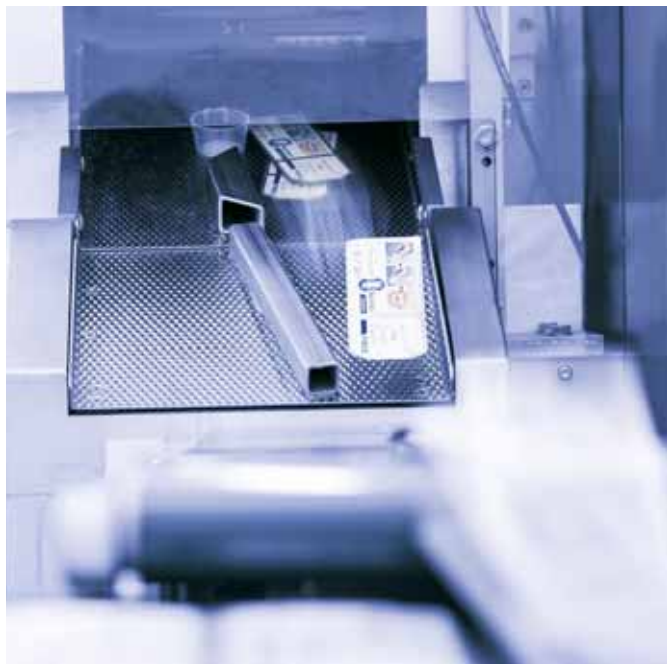

VÍTEJTE U DENTALISTY!

Vážení zákazníci a obchodní partneři,

Protože jsme společnost zabývající se výzkumem v dentálním průmyslu, jste naším cílem právě, a především, Vy a Vaše očekávání stran našich produktů. Nezáleží na tom, zda jsou určeny pro použití v zubní ordinaci nebo v laboratoři – co se počítá, je snadné zpracování, spolehlivost, individualita a samozřejmě prvotřídní kvalita. Toto všechno jsou charakteristické vlastnosti našich značkových produktů – pro každodenní klinické použití i digitální pracovní postupy. VOCO nabízí kvalitu pro všechny oblasti Vaší praxe, od maximální biologické kompatibility u výplňových materiálů a problémy řešících kořenových čepů po progresivní kompozitní bločky pro CAD / CAM použití a moderní 3D tiskárny.

Přečtěte si další informace o našem rozmanitém portfoliu pro preventivní, záchovnou, protetickou a digitální stomatologii. Seznamte se s našimi produkty pro následující oblasti

- Orální péče
- Přímé výplně
- Nepřímé výplně a
- Přístroje · Další produkty

a objevte standardy prvotřídní kvality od společnosti VOCO.

Budete-li mít jakékoli dotazy nebo budete potřebovat více informací, prosíme, neváhejte kontaktovat svého dentálního konzultanta VOCO. Samozřejmě Vám rádi pomůžeme i v našem oddělení Služeb zákazníkům (kontaktujte jej emailem na service@voco.de).

Informace o produktech, návody k použití, vědecké informace, zprávy o klinických případech a mnoho dalšího naleznete také na www.voco.dental.

Vaše VOCO GmbH

PÉČE O DUTINU ÚSTNÍ

Profesionální čištění

CleanJoy	7
----------	---

Pečetidla fisur

Grandio Seal	8
Fissurit FX	9
Fissurit F	9
Fissurit	9

Profylaxe

Bifluorid 10	10
Remin Pro	11
Remin Pro forte	11

Prostředky snižující citlivost

VOCO Profluorid Varnish	12
Admira Protect	13

Bělení

Perfect Bleach	14
Perfect Bleach Office+	15

Profylaktická sada

Profylaktická sada	16
--------------------	----

PŘÍMÉ MATERIÁLY

Podkládací materiály

Calcimol	18
Calcimol LC	18
Calcicur	18
Ionoseal	19
Amalgam Liner	19

Bondy

Futurabond U	20
Futurabond M+	21
Futurabond M	21
Futurabond DC	22
Futurabond NR	22
Solobond M	23
Solobond Plus	23
Vococid	23

Výplňové materiály (ORMOCER®s)

Admira Fusion	25
Admira Fusion Flow	26
Admira Fusion x-tra	27
Admira Fusion x-base	28
Admira Bond	28

Výplňové materiály (Kompozita)

GrandioSO	29
GrandioSO Flow	30
GrandioSO Heavy Flow	31
GrandioSO x-tra NOVINKA	32
GrandTEC	33
Grandio	34
Grandio Flow	35
Amaris	36
Amaris Flow	36
Amaris Gingiva	37

FinalTouch	37
x-tra base	38
x-tra fil	39
Alfacomp LC	39
Arabesk	40
Arabesk Flow	40
Polofil Supra	41

Výplňové materiály (Kompomery)

Twinky Star	41
Twinky Star Flow	41

Výplňové materiály (Skoionomerní materiály)

Ionolux	43
IonoStar Plus	44
IonoStar Molar	44
VOCO Ionofil Molar AC	45
VOCO Ionofil Molar AC Quick	45
VOCO Ionofil Molar	45
Aqua Ionofil Plus	46
Easy Glaze	46

NEPŘÍMÉ MATERIÁLY

CAD / CAM materiál

Grandio blocs · Grandio disc NOVINKA	48
V-Print ortho NOVINKA	49
V-Print SG NOVINKA	49
V-Print model NOVINKA	49

Upevňovací materiály

Bifix SE	51
Bifix QM	51
Meron Plus	52
Meron Plus AC	52
Meron Plus QM NOVINKA	52
Meron (Aplikační kapsle)	53
Meron	53
Aqua Meron	54
Ceramic Bond	54
Quick Up	55
BrackFix NOVINKA	56

Dostavby korunek

Rebilda Post GT	57
Rebilda Post	58
Rebilda Post System	58
Rebilda DC	59
Rebilda LC	59
Grandio Core Dual Cure	60
Rebilda Form	60

Provizoria

Structur 3	61
Structur 2	62
Provizorní sada NOVINKA	62
Structur Premium	63
Bifix Temp	63
Provicol QM	64
Provicol QM Plus	64
Provicol C	64
Provicol	64

Clip Flow	65
Clip	65
Clip F	65

Podkládání protéz

Ufi Gel hard C	66
Ufi Gel hard	66
Ufi Gel SC	67
Ufi Gel P	67

Otisky

V-Posil Putty Fast	68
V-Posil Heavy Soft Fast	68
V-Posil Mono Fast NOVINKA	68
V-Posil Light Fast	69
V-Posil X-Light Fast	69
V-Posil Adhesive	69
Registrado X-tra	70
Registrado Clear	70
Registrado Scan	70
Fit Test C & B	71
Individo Lux	71
Profibase	71

Opravy

Cimara	72
--------	----

PŘÍSTROJE · DALŠÍ PRODUKTY

3D tisk

SolFlex 350	74
SolFlex 650	74
SolFlex 170	75
OtoFlash	75

Přístroje

VOCO Dynamic Dispenser	76
Caps Warmer NOVINKA	76
Celalux 3	77
GIC Mixer NOVINKA	77

Jiné

Curvy	78
Caries Marker	78
Pele Tim	79
Block Out Gel LC	79
Dimanto	80
SiC (karborundové) brousky	80

Čištění

Traypurol tabs	81
Traypurol	81

Malé přístroje

Caps Dispenser	82
Dispenser	82
QuickMix Dispenser	82
AC Applicator	82
AC Activator	82
Zásobník na aplikační štětečky	82

Jednorázové pomůcky

Jednorázové pomůcky	83
---------------------	----

PIKTOGRAMY

Následující piktogramy Vám umožní rychle nalézt ten správný produkt a učinit tak první vyhodnocení během několika sekund, což Vám umožňuje získat velice rychle i celkový přehled.



Složení materiálu

Jak plniva, tak i pryskyřičná matrix tohoto výrobku jsou založeny čistě na oxidu křemičitém.



Složení materiálu

Tento produkt je založen na nanohybridní technologii.



Tuhnutí materiálu

Tento produkt tuhne vlivem působení světla nebo tuhne samovolně, chemicky. Pro podrobné informace, prosíme, nahlédněte do návodu k použití.



Tuhnutí materiálu

Tento produkt tuhne samovolně, chemicky. Pro podrobné informace, prosíme, nahlédněte do návodu k použití.



Tuhnutí materiálu

Tento produkt tuhne vlivem působení světla. Uvedená doba představuje průměrnou délku tuhnutí. Pro podrobné informace, prosíme, nahlédněte do návodu k použití.



Způsob použití

Před nanášením tohoto materiálu na zub není nutná přípravná úprava povrchu zubu. Pro podrobné informace, prosíme, nahlédněte do návodu k použití.



Způsob použití

Před použitím adhezivního systému (bondu) je nezbytné samostatné naleptání povrchu zubu. Pro podrobné informace, prosíme, nahlédněte do návodu k použití.



Způsob použití

Před použitím adhezivního systému (bondu) není nutné samostatné leptání povrchu zubu. Pro podrobné informace, prosíme, nahlédněte do návodu k použití.



Indikace

Svými indikacemi je tento produkt vhodný pro výplně kavit uvedených tříd. Pro podrobné informace, prosíme, nahlédněte do návodu k použití.



Objemové smršťování

U produktu dochází během tuhnutí k objemovému smršťování v uvedených procentech.



Obsah plniv

Produkt má stanovený obsah plniv, který je uveden v procentech hmotnosti.



Tvrdost materiálu

Tento produkt disponuje uvedenou tvrdostí dle Shorea A.



Rentgen kontrastnost

Po skončení práce je tento materiál vysoce rentgen kontrastní. Uvedená hodnota udává rentgen kontrastnost v procentech při srovnání s hliníkem.



Pokyny pro práci

Tento materiál je vhodný pro zhotovování výplní technikou bulk-fill o maximální tloušťce vrstvy 4 mm. Pro podrobné informace, prosíme, nahlédněte do návodu k použití.



Indikace

Tento produkt je možné použít k provizorním typům ošetření. Pro podrobné informace, prosíme, nahlédněte do návodu k použití.



Obsah fluoridu

Produkt obsahuje uvedené množství fluoridů. Pro podrobné informace, prosíme, nahlédněte do návodu k použití.



Pokyny pro práci

Tento produkt nevyžaduje v případě úplného vytvrzení dodatečné leštění. Pro podrobné informace, prosíme, nahlédněte do návodu k použití.



Kompatibilita materiálu

Tento produkt je možné použít s uvedenými materiály. Pro podrobné informace, prosíme, nahlédněte do návodu k použití.



Použití materiálu

Tento materiál je k dispozici v neodtékajících, neodkapávajících stříkačkách NDT®.



CAD / CAM

Tento produkt je vhodný pro použití v digitální stomatologii. Pro podrobné informace, prosíme, nahlédněte do návodu k použití.



Informace o době životnosti v ústech

Tento produkt vydrží v ústech minimálně po uvedenou dobu.



Informace o době zpracování

Uvedena je maximální doba zpracování mimo úst pacienta pro daný produkt.



Označení pro sledování procesu

Toto zařízení již je vybaveno, nebo jej lze vybavit, senzory pro kontrolu procesu tisku.



Informace k materiálu

Tento produkt využívá patentované technologie Flex-Vat pro menší odlupování a menší nároky na pomocné struktury.



Označení vlnové délky

Tento materiál lze vytvrdit světlem pomocí UV-LED světelného zdroje s vyobrazenou vlnovou délkou.



Formát komunikačních dat

Tento produkt zpracovává data v uvedeném formátu.

Péče o dutinu ústní

Ochrana. Péče. Zachování.

Zdravé zuby jsou cenným aktivem a jejich dlouhodobé zachování je společným cílem spolupráce mezi námi, Vámi a Vašimi pacienty. K jeho úspěšnému dosažení významně přispívají i výrobky VOCO. Fluoridové laky vhodné pro nejrůznější indikace. Pečetidla fisur nabízející vysoký obsah plniv dokonce i ve spojení s transparentností. Okamžitě účinkující desenzibilizační prostředky. Čisticí pasty s různou abrazivitou. Nezávisle na tom jaký výrobek si vyberete, vždy učiníte správné rozhodnutí. Pro bělení nadále nabízíme ucelené sady, které jsou přesvědčivé ve způsobu použití i ve výsledku bělení – a to jak pro ordinaci, tak i domácí použití.



Péče o dutinu ústní

Čištění					
Strana	Obsahuje fluorid	Hodnoty RDA	Příchuť	Balení	Zvláštní vlastnosti
7	CleanJoy	700 ppm	hrubá (195), střední (127), jemná (16)	mátová	SingleDose, tuba
					xylitol, barevné odílení „jako u semaforu“

Pečetidla fisur					
Strana	% hmotnosti	opákní	transparentní		
8	Grandio Seal	70 % hmotnosti	•		
9	Fissurit FX	55 % hmotnosti	•		
9	Fissurit F	neurčeno	•		
9	Fissurit	neurčeno		•	

Fluoridace · Desenzibilizace					
Strana	fluoridace	desenzibilizace	Obsah fluoridu	balení	příchuť
10	Bifluorid 10	•	22,600 ppm	SingleDose, lahvička	nevyrazná
11	Remin Pro	•	1,450 ppm	tuba	mátová, melounová, jahodová
11	Remin Pro forte	•	1,450 ppm	tuba	zázvor
12	VOCO Profluorid Varnish	•	22,600 ppm	SingleDose, tuba, kartuše	mátová, melounová, karamelová, třešňová, příchuť žvýkačky
13	Admira Protect	•	•	SingleDose, lahvička	nevyrazná

Bělení					
Strana	Peroxid karbamidu	Peroxid vodíku	domácí	ordinační	
14	Perfect Bleach	10 % / 16 %	odpovídá 3,5 % / 6 %	•	•
15	Perfect Bleach Office+		35 %		•

CleanJoy®

Čistící a lešticí zubní pasta s obsahem fluoridu ve třech úrovních účinnosti

Nyní k dostání také v balení

SingleDose

Indikace

Odstraňování měkkého a tvrdého povrchového plaku

Odstraňování vnějších diskolorací (např. skvrn od kávy, čaje nebo tabáku)

Leštění povrchu zubů v rámci odborného čištění zubů, před bělením nebo po odstranění ortodontických aparátů

Čištění a leštění výplní a náhrad v rámci odborného čištění zubů

Odstraňování zbytků provizorních upevňovacích materiálů před definitivním upevňováním náhrad (cementováním)


Přednosti

- Stabilní, homogenní konzistence
- Neodstříkuje (2.000 - 3.000 otáček / min)
- Bez parabenů
- K dostání ve třech úrovních abrazivnosti – lze ji individuálně uzpůsobit každé situaci
- Hodnoty RDA (měřeno v souladu s DIN EN ISO 11609)
 - hrubá (červená) RDA = 195
 - střední (žlutá) RDA = 127
 - jemná (zelená) RDA = 16
- Systém kódování podobný semaforu: jednoduše se používá a nedochází k záměnám
- Zelená lešticí pasta má velmi nízkou míru abraze a je proto vhodná také pro péči o implantáty
- Použití možné s jakýmikoli nástroji (malý kartáček, kalíšek atd.)
- Obsahuje fluorid (700 ppm) a xylitol (tlumivý účinek na metabolismus bakterií)
- Příjemná jemně mátová příchut'

Přednosti balení *SingleDose*

- Jednoduché, rychlé a hygienické
- Nejsou nutné další pomůcky
- Nevylíže se v žádné poloze

Použití

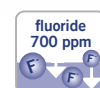

REF 2092	Tuba 100 g hrubá (červená)
REF 2091	Tuba 100 g střední (žlutá)
REF 2090	Tuba 100 g jemná (zelená)
REF 2089	Tuba 4 x 100 g jemná (zelená)
REF 2098	<i>SingleDose</i> 200 x 2 g hrubá (červená)
REF 2097	<i>SingleDose</i> 200 x 2 g střední (žlutá)
REF 2096	<i>SingleDose</i> 200 x 2 g jemná (zelená)

Grandio® Seal

Světlem tuhnoucí nanohybridní pečtidlo fisur



Indikace

Pečetění / vyplnění prohlubní a fisur

Pečetění / potažení poškozených sklovinných povrchů

Překrytí predilekčních míst kazů během ortodontické léčby

Pečetění dočasných zubů

Přednosti

- Optimální zatékavost díky využití nano plniva
- Nejvyšší obsah plniva ve své třídě, 70 % hmotnosti
- Vynikající fyzikální vlastnosti
 - nízká abraze
 - vysoká pevnost v ohybu
 - extrémně nízké hodnoty smrštění
- Výborné vlastnosti pro zpracování
- Optimální zvlhčení
- Perfektní okrajová adaptace
- Ideální pro pečetění kompozitních nebo skloionomerních výplní (ochranná vrstva proti vlhkosti)

Grandio® Seal v NDT® stříkačce

- NDT® je technologie neodkapávajících stříkaček
- Určená pouze pro výborně zatékavé materiály
- Umožňuje přesné dávkování i nanášení
- Bez zbytečných ztrát materiálu

Klinický případ



20 sekund
vytvrzení světlem



Zdroj: Dr. Marcelo Balsamo, São Paulo / Brazílie

Fissurit® FX

Světlem tuhnoucí pečetidlo fisur s fluoridem a vysokým obsahem plnidla, bílé

Indikace

Preventivní pečetení fisur a okluzních ploch

Pečetení hlubokých fisur

Výplně malých kavit

Přednosti

- Větší odolnost proti abrazi díky 55 % obsahu plnidla
- Rychlá a jednoduchá přímá aplikace ze stříkaček s ohybatelnými ocelovými kanyly
- Optimální zatékové vlastnosti
- Vysoká stálost a dobrá přilnavost ke sklovině
- Perfektní okrajová adaptace
- Postupné uvolňování fluoridů
- Díky bílé barvě dobře viditelný



REF 1181	Stříkačky 2 × 2,5 g, příslušenství
REF 2145	Aplikační kanyly typu 40, 100 ks

Fissurit® F

Světlem tuhnoucí pečetidlo fisur s fluoridem, bílé

Indikace

Preventivní pečetení prohlubní, fisur a okluzních ploch

Potažení poškozených sklovinných povrchů

Kotvení ortodontických aparátů

Pečetení kompozitních a cementových výplní (ochrana před vlhkostí)

Výplně malých kavit

Opravy malých defektů na kompozitních a amalgámových výplních

Přednosti

- Rychlé a přímé nanášení z neodkapávající NDT® stříkačky
- Díky bílé barvě při nanášení dobře viditelný
- Výborné zatékové vlastnosti a nízká viskozita
- Vysoká stabilita a dobrá přilnavost ke sklovině
- Perfektní okrajová adaptace
- Postupné uvolňování fluoridů



REF 1180	Lahvička 2 × 3 ml
REF 1292	Stříkačky 2 × 2 g, příslušenství
REF 1293	Sada stříkaček 5 × 2 g, Vococid gel stříkačka 5 ml, Vococid tekutina 2 × 3 ml, příslušenství
REF 2145	Aplikační kanyly typu 40, 100 ks

Fissurit®

Světlem tuhnoucí pečetidlo fisur, transparentní

Indikace

Viz Fissurit F

Přednosti

- Transparentní
- Vysoká stabilita a dobrá přilnavost ke sklovině
- Mnohaletá klinická zkušenost



REF 1082	Lahvička 2 × 3 ml
----------	-------------------

Bifluorid 10®

Fluoridový lak proti hypersenzitivitě



Indikace

Ošetření hypersenzitivity zahrnuje

- Krčkové oblasti a okraje korunek
- Citlivost po profesionálním čištění a odstraňování zubního kamene
- Povrchy zubů po preparaci a / nebo obroušení
- Abradované okluzní plošky a zuby zatížené sponami
- Po úrazech skloviny (např. zlomeniny, odštípnutí)
- Pečetění okrajů kavit po umístění výplně, zvláště v případech, kde se použila leptací technika
- Ochrana / podložka dentinu pod amalgámové výplně

Přednosti

- Okamžité znecitlivění
- Vznik ochranné vrstvy proti tepelnému a mechanickému působení
- Transparentní – nezbarvuje zuby
- Speciální základ laku prodlužuje délku působení a hloubku fluoridace
- Ekonomické a jednoduché – vysoký účinek, nízká cena, rychlé nanášení
- Rychle zasychá
- Neobsahuje kalafunu
- Obsahuje 5 % fluoridu sodného (odpovídá 22.600 ppm fluoridu) a 5 % fluoridu vápenatého

Bifluorid 10® v praktickém balení *SingleDose*

- Jednoduché, rychlé a hygienické
- Nejsou nutné další pomůcky
- Nevylíje se v žádné poloze

REF 1615	Lahvička 4 g, Solvent lahvička 10 ml
REF 1616	Lahvička 10 g
REF 1617	Lahvička 3 × 10 g, Solvent lahvička 10 ml, Pele Tím No. 1
REF 1618	<i>SingleDose</i> 50 ks, příslušenství
REF 1619	<i>SingleDose</i> 200 ks, příslušenství
REF 1032	Solvent lahvička 10 ml
REF 2338	Držák na jednorázové dentální štětečky a Micro Tím, 5 ks
REF 2249	Micro Tím, jemné aplikační štětečky, 100 ks
REF 2252	Pele Tím, No. 1, 3.000 × ø 4 mm



Fluoridace pomocí Bifluorid 10 po profesionálním čištění

Remin Pro®

Ochranná péče o chrup s fluoridem a hydroxyapatitem



Indikace

Po bělení

Po profesionálním čištění

Prevence a potlačení zvýšené citlivosti

V průběhu ortodontické léčby

Přednosti

- Obsahuje fluorid (1.450 ppm), hydroxyapatit a xylitol
- Působí na vyváženost mikroflóry v dutině ústní a chrání tak zuby před nebezpečným působením kyselin
- Posiluje zuby po bělení a profesionálním čištění
- Kariostatický účinek díky obsahu xylitolu
- Vyrábí se ve třech aromatických příchutích (melounu, máty a jahody)
- Vhodný pro každodenní domácí použití



REF 2003	Tuby 12 × 40 g melounu
REF 2004	Tuby 12 × 40 g máty
REF 2005	Tuby 12 × 40 g jahody
REF 2006	Tuby 12 × 40 g mixed
REF 2007	Tuby 3 × 40 g mixed

Remin Pro® forte

Ochranná péče o chrup s fluoridem a hydroxyapatitem

Indikace

Po bělení

Po profesionálním čištění

Prevence a potlačení zvýšené citlivosti

V průběhu ortodontické léčby

Přednosti

- Obsahuje fluorid (1.450 ppm), hydroxyapatit a xylitol
 - výplně s minerální vyvážeností
 - neutralizace kyselin z plaku
- S vysoce kvalitními výtažky ze zázvoru a kurkumy
 - antibakteriální a protizánětlivé účinky
- Komplexní podpora zdraví dutiny ústní
 - prevence a kontrola hypersenzitivity
 - podporuje hojení a regeneraci zánětlivé sliznice



REF 2008	Tuba 40 g zázvor
REF 2014	Tuba 12 × 40 g zázvor

Profesionální čištění

Pečidla fisur

Profylaxe

Prostředky snižující citlivost

Bělení

Profylaktická sada

VOCO Profluorid® Varnish

Lak pro desenzibilizaci zubů obsahující fluoridy (5 % NaF)



Novinka:
příchuť žvýkačky



Indikace

Ošetření hypersenzitivních zubů

Pečetení dentinových kanálků, např. po preparacích kavit nebo citlivých kořenových oblastí

Přednosti

- Snadno se nanáší na vlhký povrch zubu
- Estetický lak v barvě zubu
- Rychlá desenzibilizace a uvolňování fluoridu (5 % NaF $\triangleq$ 22.600 ppm fluoridu)
- K dostání v pěti příjemných příchutích: melounu, máty, třešně, karamelu a žvýkačky
- Úsporné nanášení v tenkých vrstvách, s vysokým účinkem
- Ideální pro ošetření krčkových oblastí po profesionálním čištění a odstraňování zubního kamene

Přednosti balení SingleDose

- Jednoduché, rychlé a hygienické
- Nejsou nutné další pomůcky
- Nevylíže se v žádné poloze

Přednosti balení v kartuši

- Vícečetné použití s jednorázovou kanylou
- Dokonale přesné nanášení
- Extrémně snadné nanášení do aproximálních oblastí
- Kompletní aplikace fluoridu během jediného kroku

Použití



Tuba		
Příchuť	10 ml	50 ml
Melounu	REF 1267	REF 1272
Karamelu	REF 2232	–
Třešně	REF 2233	–
Máty	REF 2234	–
Příchuť	4 x 10 ml	
Melounu	REF 2971	
SingleDose		
Příchuť	50 x 0,40 ml	200 x 0,40 ml
Melounu	REF 1269	REF 1271
Karamelu	REF 2226	REF 2229
Třešně	REF 2227	REF 2230
Máty	REF 2228	REF 2231
Žvýkačky	REF 2238	REF 2239
Příchuť	48 x 0,40 ml	50 x 0,25 ml
Melounu	–	REF 1268
Mixed*	REF 2225	–
Kartuše		
Příchuť	5 x 1,70 ml	
Melounu	REF 2235	
REF 2167 Aplikační kanyly typu 43, 100 ks		
*(12 x v příchuti melounu, karamelu, třešně, máty)		

Admira® Protect

Světlem tuhnoucí ochranný lak na ORMOCER®ové bazi pro desenzibilizaci



Indikace

Ošetření hypersenzitivního dentinu

Ošetření krčkových oblastí a okrajů korunek

Ošetření krčkových oblastí po profesionálním čištění a odstraňování zubního kamene


Přednosti

- Biokompatibilní
- Dlouhodobé odstranění hypersenzitivity
- Spolehlivá přilnavost
- Vysoká ochrana před abrazí díky speciálním plnidlům
- Postupné uvolňování fluoridů

Admira® Protect v praktickém balení *SingleDose*

- Jednoduché, rychlé a hygienické
- Nejsou nutné další pomůcky
- Nevylíje se v žádné poloze

Použití

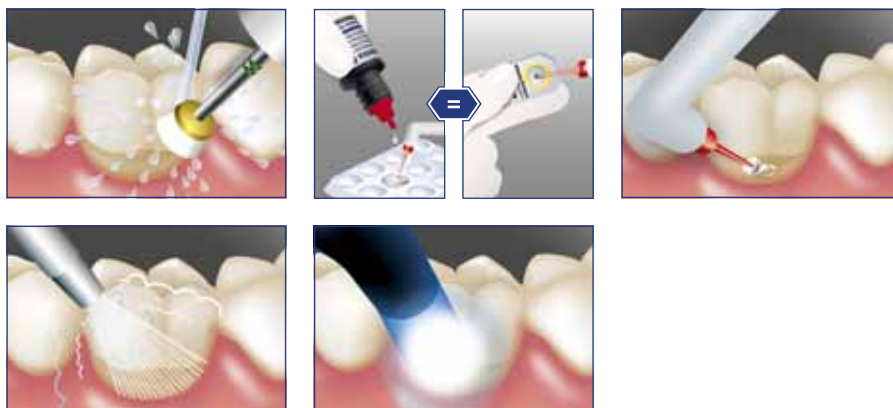

REF 1650	Lahvička 4,5 ml, příslušenství
REF 1651	<i>SingleDose</i> 50 ks, příslušenství
REF 1652	<i>SingleDose</i> 200 ks, příslušenství
REF 2338	Držák na jednorázové dentální štětečky a Micro Tím, 5 ks
REF 2249	Micro Tím, jemné aplikační štětečky, 100 ks

Perfect Bleach®

Gel k bělení diskolorovaných zubů (10 % / 16 % peroxid karbamidu)



Indikace

Jemné a trvalé bělení vitálních i nevitálních zubů, např. zbarvených užíváním léků, fluorózou, jídlem, následkem úrazu, věkem atd.

Přednosti

- Jednoduché použití
- Šetrný k hmotě zubu a stávajícím výplnám
- Výsledek bělení se projeví již po krátké době
- Příjemná mátová příchut'
- V atraktivní etuji

Mini sada

Atraktivní etuje obsahuje čtyři stříkačky bělicího gelu, úložný box a graficky zpracovaný návod k použití.

Zvláště vhodné pro

- Zubní lékaře, kteří mají na výrobu lžic smlouvu s externí laboratoří
- Pacienty, kteří již vlastní lžici pro bělení

Sada

Sada obsahuje šest stříkaček bělicího gelu, úložný box, jednu stříkačku vykrývacího gelu Block Out Gel LC, materiál na dva nosiče a graficky zpracovaný návod k použití.

Zvláště vhodné pro

- Zubní lékaře, kteří vyrábí lžice na bělicí gel ve své ordinaci

3.5 %
H₂O₂

6 %
H₂O₂

Perfect Bleach® 10 %

- REF 1658 Mini sada stříkačky 4 × 2,4 ml s 10 % peroxidem karbamidu, úložný box, etuje
- REF 1660 Sada stříkačky 6 × 2,4 ml s 10 % peroxidem karbamidu, Block Out Gel LC stříkačka 1,2 ml, 2 folie, úložný box, etuje, vzorník odstínů, příslušenství
- REF 1662 Stříkačky 3 × 2,4 ml s 10 % peroxidem karbamidu

Perfect Bleach® 16 %

- REF 1659 Mini sada stříkačky 4 × 2,4 ml s 16 % peroxidem karbamidu, úložný box, etuje
- REF 1664 Sada stříkačky 6 × 2,4 ml s 16 % peroxidem karbamidu, Block Out Gel LC stříkačka 1,2 ml, 2 folie, úložný box, etuje, vzorník odstínů, příslušenství
- REF 1665 Stříkačky 3 × 2,4 ml s 16 % peroxidem karbamidu

Perfect Bleach® Office+

Gel k bělení diskolorovaných zubů

Indikace

Perfect Bleach Office+ je vhodný k bělení jednotlivých nebo více diskolorovaných, vitálních či nevitálních zubů. Úspěšnost bělení závisí na přirozeném odstínu zubu, i na intenzitě a příčině diskolorace. Bělení je účinné v případě diskolorace organického původu, která má obecně následující příčiny:

- Diskolorace v důsledku úrazu
- Diskolorace způsobené medikamenty (např. tetracyklin)

Diskolorace anorganického původu, jako způsobené složkami amalgámu (stříbro) nelze vybělit, protože se jedná o umělé náhrady

Přednosti

- 35 % koncentrace peroxidu vodíku pro bezpečné a rychlé bělení diskolorací
- Dobrý kontrast se zubem a LC Dam díky červenému zbarvení materiálu
- Lze jej použít k vnitřnímu i vnějšímu bělení
- Perfect Bleach Office+ v pohodlných stříkačkách QuickMix
 - aktivuje se pouze potřebné množství gelu
 - nedochází k chybám při míchání a gel je vždy čerstvý
- Ochrana gingivy na bázi kompozita (LC Dam)
- Bez bolestivého tepelného působení světlem vytvrzované ochrany gingivy

Klinický případ



Okrajová zřetelně viditelná diskolorace v zubu 11 s klinicky dokonalou kořenovou výplní



Palatinální pohled s nasazenou ochranou dásní LC Dam



Nanášení bělicího gelu do kavity dodanou jemnou kanylou



Důkladné oplachování a odsávání bělicího gelu



Těsná obturace kavity skloionomerním materiálem



Esteticky přesvědčivý výsledek

Zdroj: Dierk Thalmann, Cuxhaven / Německo



35 %
H₂O₂

auto
mix

REF 1672	Sada v QuickMix stříkačkách 2 × 4 ml, LC Dam stříkačka 2 × 2 g, příslušenství
REF 1673	QuickMix stříkačka 4 ml, příslušenství
REF 1655	LC Dam stříkačka 2 g, příslušenství
REF 2194	Míchací hroty typu 14, 50 ks
REF 2195	Míchací hroty typu 15 (intraorální hroty typu 1), 50 ks
REF 2146	Aplikační kanyly typu 41, 100 ks



Přímé materiály

Stálost. Estetika. Úspornost.

Záchovná stomatologie vyžaduje Vaše zkušenosti zubního lékaře ve spojení s naprosto spolehlivými a vysoce kvalitními výplňovými materiály. Pro zhotovování přímých výplní Vám VOCO nabízí celou řadu tříd materiálů pro nejrůznější indikace. Je ale jedna věc, kterou mají všechny naše výplňové materiály společnou: naše kompozita, kompomery, ORMOCER®y a skloionomerní materiály, stejně jako linery, vazebné materiály a pásy vyztužené skleněnými vlákny zaručují, že výsledky charakterizuje stálost a odolnost. Navíc, pacienti hledají individuální řešení, která učiní jejich úsměv zářivým. Naše výrobky, které se snadno a rychle používají, pomáhají tomu, aby byla Vaše výplňová ošetření předvídatelná, plánovatelná i estetická.



Calcimol

Samo-tuhnoucí rtg-kontrastní pasta s obsahem hydroxidu vápenatého

Indikace

Nepřímé krytí zubní dřeně
Podložka pod všechny výplňové materiály

Přednosti

- Účinná ochrana zubní dřeně
- Jednoduchá aplikace
- Přiměřená doba zpracování
- Krátká doba tuhnutí
- Obsahuje 26 % hydroxidu vápenatého
- Rentgen kontrastní
- Podporuje obnovu terciárního dentinu



REF 1097 Tuby 2 ks, báze / katalyzátor

Calcimol LC

Světlem tuhnoucí rentgen kontrastní pasta s obsahem hydroxidu vápenatého

Indikace

Nepřímé krytí dřeně
Podložka pod všechny výplňové materiály

Přednosti

- Efektivní ochrana dřeně
- Jednosložkový materiál k okamžitému použití
- Časově úsporné světelné vytvrzování a přímé nanášení z neodkapávající NDT® stříkačky
- Vysoká míra odolnosti vůči kyselinám, ochrana použití techniky total-etch
- Podporuje tvorbu terciárního dentinu



REF 1047 Tuby 2 × 5 g
REF 1307 Stříkačky 2 × 2,5 g, příslušenství
REF 2146 Aplikační kanyly typu 41, 100 ks



Calcicur®

Okamžitě aplikovatelná pasta na bázi hydroxidu vápenatého

Indikace

Nepřímé krytí při ošetření počínajícího kazu
Přímé krytí, je-li dřeň obnažená nebo provádí-li se pulpotomie
Podkládání zabraňující vystavení působení kyselin při použití cementů
Na provizorní výplně kořenových kanálků

Přednosti

- Vhodný pod jakoukoli podložku nebo výplňový materiál
- Připraven k okamžitému použití
- Antimikrobiální účinek díky hodnotě pH (12,5)
- 45 % obsah hydroxidu vápenatého
- Rentgen kontrastní
- Podporuje tvorbu terciárního dentinu
- Účinná ochrana dřeně



REF 1093 Stříkačka 2,5 g, příslušenství
REF 1096 Stříkačka 3 × 2,5 g, příslušenství
REF 2131 Aplikační kanyly typu 47, 30 ks

Ionoseal®

Světlem tuhnoucí jednosložkový skloionomerní kompozitní cement pro podložky



Indikace

Podložky pod všechny druhy výplňových materiálů

Rozsáhlé pečetění fisur

Ošetření menších lézí

Přednosti

- Jednosložkový materiál k okamžitému použití
- Časově úsporný: vytvrzení světlem během několika sekund
- Rychlá a hygienická aplikace
- Vysoká pevnost v tlaku (226 MPa)
- Postupné uvolňování fluoridu působí proti vzniku sekundárního zubního kazu
- Vysoká biokompatibilita
- Rentgen kontrastní



REF 1126	Tuby 2 × 4 g
REF 1326	Stříkačky 3 × 2,5 g, příslušenství
REF 2146	Aplikační kanyly typu 41, 100 ks

Amalgam Liner

Pohotová tekutá izolační podložka s obsahem stříbra pod amalgámové výplně

Indikace

Ochrana dentinu / podložka pod amalgámové výplně

Pečetění amalgámových výplní bezprostředně po zhotovení

Přednosti

- Účinná ochrana zubní dřeně
- Izolace před chemickými a bakteriálními vlivy
- Snižuje riziko vzniku netěsností a tvorby sekundárního zubního kazu
- Váže zbytkovou rtuť



REF 1024	Sada lahvička 4,5 g s prostředkem Solvent
REF 1026	Lahvička 9 g
REF 1032	Solvent lahvička 10 ml

Futurabond® U

Duálně tuhnoucí univerzální adhezivum



Indikace

Přímé a nepřímé výplně za použití světlem tuhnoucích, duálně tuhnoucích nebo samovolně tuhnoucích dostavbových nebo upevňovacích kompozit metakrylátového základu
Intraorální opravy výplní, keramických fazet a celokeramických náhrad bez dodatečného použití primeru

Ošetření hypersenzitivních zubních krčků

Ochranný lak pro výplně zhotovené ze skloionomerního cementu

Pečetění kavit před zhotovováním amalgámových výplní nebo před provizorním upevňováním

Upevňování kořenových čepů pomocí duálně tuhnoucích nebo samovolně tuhnoucích upevňovacích kompozit



Přednosti

- Jeden bond na všechno! Jakákoli další adheziva jsou pro ordinaci zbytečná!
- Samo-leptací technika, technika selektivního leptání nebo technika total-etch – zcela svobodně na výběru lékaře
- Vynikající univerzálnost použití
 - pro přímé a nepřímé výplně
 - plně kompatibilní se všemi světlem, duálně nebo samovolně tuhnoucími kompozity na bázi metakrylátů bez doplňkového aktivátoru duálního tuhnutí
 - spolehlivá přilnavost k různým materiálům, jako jsou kovy, keramika na bázi oxidu zirkoničitého nebo oxidu hlinitého, stejně jako silikátová keramika, bez dodatečného použití primeru
 - ošetření hypersenzitivních zubních krčků
 - ochranný lak pro výplně zhotovené ze skloionomerního cementu, atd.
- Nanáší se v jedné vrstvě – celková doba zpracování pouhých 35 sekund
- Vynikající přilnavost ve srovnání s jinými univerzálními, samoleptacími adhezivy nebo adhezivy pro techniku total-etch
- Tolerantní vůči vlhkosti
- Není nutné skladování v chladničce

Futurabond® U v praktickém balení SingleDose

- Jednoduché, rychlé a hygienické
- Nejsou nutné další pomůcky
- Nevylíže se v žádné poloze

Je to tak snadné! Prostě zmáčknout a bondovat!

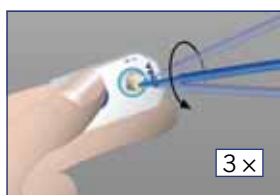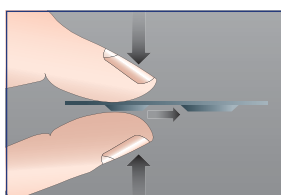

REF 1571	SingleDose 50 ks, příslušenství
REF 1572	SingleDose 200 ks, příslušenství
REF 1574	SingleDose zkušební balení (SingleDose 20 ks, Vococid gel stříkačka 2 ml, příslušenství)
REF 2246	Endo Tim, aplikační štětečky, k použití do kořenových kanálků, 50 ks
REF 2247	Single Tim, aplikační štětečky, 100 ks

Futurabond® M+

Univerzální adhezivum

Indikace

Přímé a nepřímé výplně z jakéhokoli světlem tuhnoucího výplňového materiálu na bázi metakrylátu, dostavbového materiálu nebo upevňovacího kompozita

Intraorální opravy výplní, keramických fazet a celokeramických náhrad bez dalšího nanášení primeru

Ošetření hypersenzitivních krčků zubů

Ochranný lak pro výplně ze skloionomerních cementů

Pečetění kavit před zhotovováním amalgámových výplní nebo před provizorním upevňováním náhrady

V kombinaci s Futurabond® M+ DCA (s aktivátorem duálního tuhnutí)

Přímé a nepřímé výplně z jakéhokoli samovolně nebo duálně tuhnoucího výplňového materiálu na bázi metakrylátu, dostavbového materiálu nebo upevňovacího kompozita

Upevňování kořenových čepů pomocí duálně nebo samovolně tuhoucích kompozit

Přednosti

- Lze jej použít spolu s nebo bez leptání kyselinou fosforečnou
- Je výborně vhodný pro přímé a nepřímé výplně
- Bezpečná adheze k různým materiálům, jako jsou kovy, keramika na bázi oxidu zirkoničitého nebo oxidu hlinitého, či silikátová keramika, a to bez dodatečného použití primeru
- Nanáší se v jedné vrstvě – celková doba zpracování je pouhých 35 sekund

Futurabond® M

Světlem tuhnoucí jednosložkový samo-leptací bond posílený nanoplňiv

Indikace

Přímé výplně kavit všech tříd, vhodný pro všechny světlem tuhnoucí výplňové materiály

Přednosti

- Vynikající adheze na dentin i sklovinu
- Snadné a rychlé nanášení – jedna vrstva, jedno vytvrzování
- Univerzální pro všechny světlem tuhnoucí výplňové materiály
- Ideální pro použití u dětských pacientů



REF 1515	Lahvička 5 ml, příslušenství
REF 1516	Lahvička 3 x 5 ml
REF 1518	Futurabond M+ DCA – lahvička 2 ml
REF 2246	Endo Tim, aplikační štětečky, k použití do kořenových kanálků, 50 ks
REF 2247	Single Tim, aplikační štětečky, 100 ks
REF 2315	Míchací paletky, 20 ks



REF 1350	Lahvička 5 ml, příslušenství
REF 1351	Lahvička 3 x 5 ml
REF 2247	Single Tim, aplikační štětečky, 100 ks
REF 2315	Míchací paletky, 20 ks

Futurabond® DC

Duálně tuhnoucí samo-leptací bond posílený nanoplňivý



Indikace

Přímé samo nebo duálně tuhnoucí kompozitní výplně a dostavby pahýlů korunek

Přímé světlem tuhnoucí výplně z kompozitních, kompomerových, ORMOCER®ových výplňových materiálů
Adhezivní upevňování kořenových čepů s duálně nebo samo tuhnoucími kompozitními cementy

Nepřímé výplně za použití duálně nebo samo tuhnoucích pryskyřičných cementů k upevnění inlejí, onlejí, korunek a můstků

Přednosti

- Chemická polymerace pro oblasti, do nichž lze těžko dosáhnout polymerační lampou
- Futurabond DC dosahuje stejných adhezivních vlastností jako preparáty total-etch bez samostatného leptání zubní hmoty
- Tolerantní vůči vlhkosti
- Pevný okrajový uzávěr
- Jednoduchá a rychlá aplikace – nanesení v jednom kroku, vytvrzení v jednom kroku
- Obsahuje fluoridy
- Bez nutnosti skladování v chladničce
- Ideální pro použití u dětských pacientů

REF 1163	Lahvička 2 × 4 ml (tekutina 1 / tekutina 2), příslušenství
REF 1164	SingleDose 50 ks, příslušenství
REF 1165	SingleDose 200 ks, příslušenství
REF 2246	Endo Tim, aplikační štětečky, k použití do kořenových kanálků, 50 ks
REF 2247	Single Tim, aplikační štětečky, 100 ks
REF 2315	Míchací paletky, 20 ks

Futurabond® NR

Světlem tuhnoucí samo-leptací bond posílený nanoplňivý



Indikace

Přímé výplně kavit všech tříd pomocí všech světlem tuhoucích výplňových materiálů

Přednosti

- Vynikající přilnavost k dentinu a sklovině
- Pevný okrajový uzávěr
- Tolerantní vůči vlhkosti
- Jednoduchá a rychlá aplikace – nanesení v jednom kroku, vytvrzení v jednom kroku
- Univerzální pro všechny světlem tuhnoucí výplňové materiály
- Ideální pro použití u dětských pacientů
- Obsahuje fluoridy
- Bez nutnosti skladování v chladničce

REF 1148	Lahvička 2 × 4 ml (tekutina A / tekutina B), příslušenství
REF 1152	SingleDose 50 ks, příslušenství
REF 1153	SingleDose 200 ks, příslušenství
REF 2247	Single Tim, aplikační štětečky, 100 ks
REF 2315	Míchací paletky, 20 ks

Solobond M

Světlem tuhnoucí jednosložkový bond na dentin a sklovinu

Indikace

Přímé výplně kavit všech tříd pomocí všech světlem tuhoucích výplňových materiálů

Přednosti

- Jedsložkový – jedna aplikace
- Vynikající adheze
- Vysoká elasticita materiálu a stálá těsnost okrajů
- Okamžitý „lepící efekt“ usnadňuje zhotovení výplně
- Univerzální pro všechny světlem tuhnoucí výplňové materiály



REF 1225	Sada lahvička 4 ml, Vococid gel stříkačka 5 ml, příslušenství
REF 1226	Lahvička 2 x 4 ml
REF 2249	Micro Tim, jemné aplikační štětečky, 100 ks
REF 2315	Míchací paletky, 20 ks
REF 2338	Držák na jednorázové dentální štětečky a Micro Tim, 5 ks

Podkládací materiály

Bondy

Solobond Plus

Světlem tuhnoucí bond na dentin a sklovinu

Indikace

Přímé výplně kompozitními materiály u kavit všech tříd

Adhezivní upevňování korunek, můstků, inlejí, onlejí a fazet pryskyřičnými cementy

Přednosti

- Rychlá aplikace
- Použití možné s i bez leptání
- Pro světlem, duálně i samo tuhnoucí kompozita
- Dvousložkový systém optimalizovaný pro sklovinu a dentin
- Okamžitý „lepící efekt“ usnadňuje zhotovení a modelaci výplně



REF 1044	Sada primeru / adheziva lahvička 2 x 4 ml, Vococid gel stříkačka 5 ml, příslušenství
REF 1048	Primeru lahvička 4 ml
REF 1049	Adhezivum lahvička 4 ml
REF 2309	Jednorázové štětečky do držáku, 100 ks
REF 2315	Míchací paletky, 20 ks
REF 2338	Držák na jednorázové dentální štětečky a Micro Tim, 5 ks

Výplňové materiály (ORIMOCER[®])

Výplňové materiály (Kompozita)

Výplňové materiály (Kompomery)

Vococid[®]

Leptadlo pro techniku leptání kyselinou

Indikace

Leptací tekutina / gel pro leptání sklovinu nebo techniku total-etch

Přednosti

- K dostání jako tekutina (36,1 % kyselina fosforečná) nebo gel (35 % kyselina fosforečná)
- Modré zbarvení pro vizuální kontrolu během nanášení
- Stabilní, neodkapávající gel
- 60 ml stříkačka pro zásobu materiálu



REF 1063	Stříkačka 5 ml, příslušenství
REF 1066	Lahvička 2 x 3 ml
REF 1224	Stříkačka 5 x 2 ml, příslušenství
REF 1256	Prázdná stříkačka 10 x 2 ml
REF 1257	Stříkačka 60 ml, prázdná stříkačka 2 x 2 ml, příslušenství
REF 2310	Aplikační kanyly typu 42, 30 ks
REF 2132	Aplikační kanyly typu 48, 50 ks

Výplňové materiály (Skloionomní materiály)

Výplňové materiály (Kompozita)

		třída kavit										odstíny					
Strana		I	II	III	IV	V	podložka / liner	pečetění físur	výplň v mléčném chrupu	korunková dostavba	nepřímé inleje, onleje, fazety	opákní	univerzální	translucentní	způsob nanášení	třída materiálu	obsah plniv (% hmot- nosti)
ORMOCER [®] y																	
25	Admira Fusion	univerzální / estetický / biokompatibilní	•	•	•	•	•		•	•	•	4	13	1	sfríkačka, Caps	nanohybridní	84
26	Admira Fusion Flow	univerzální / estetický / biokompatibilní		•	•	•	•	•				2	9	1	NDT [®] sfríkačka	nanohybridní	74
27	Admira Fusion x-tra	materiál typu bulk-fill / biokompatibilní	•	•		•			•	•			1		sfríkačka, Caps	nanohybridní	84
28	Admira Fusion x-base	materiál typu bulk-fill / biokompatibilní	• ¹	•	•	•	•	•		•			1		NDT [®] sfríkačka	nanohybridní	72
Kompozita																	
29	GrandioSO	univerzální / estetický	•	•	•	•	•		•	•	•	3	13	1	sfríkačka, Caps	nanohybridní	89
30	GrandioSO Flow (střední viskozita)	univerzální / estetický	•	•	•	•	•	•				2	10	1	NDT [®] sfríkačka, Caps	nanohybridní	81
31	GrandioSO Heavy Flow (vysoká viskozita)	univerzální / estetický	•	•	•	•	•	•		•		2	10	1	NDT [®] sfríkačka, Caps	nanohybridní	83
32	GrandioSO x-tra	materiál typu bulk-fill	•	•		•			•	•			4		sfríkačka, Caps	nanohybridní	86
34	Grandio	univerzální	•	•	•	•	•		•	•	•	2	13	1	sfríkačka, Caps	nanohybridní	87
35	Grandio Flow	univerzální	• ¹	•	•	•	•	•		•		2	10		NDT [®] sfríkačka, Caps	nanohybridní	80
36	Amaris / Amaris Flow	vysoce estetický / systém 2 vrstev	•	•	•	•	•				•	7		4	sfríkačka, Caps	mikrohybridní	80
37	Amaris Gingiva	vysoce estetický / v barvě dásní				•						3	1		sfríkačka	mikrohybridní	80
38	x-tra base	materiál typu bulk-fill	• ¹	•	•	•	•	•		•			2		NDT [®] sfríkačka, Caps	mikrohybridní	75
39	x-tra fil	materiál typu bulk-fill	•	•						•			1		sfríkačka, Caps	mikrohybridní	86
40	Arabesk		•	•	•	•	•				•		6	1	sfríkačka	mikrohybridní	77
40	Arabesk Flow			•	•	•	•	•		•			3		sfríkačka, Caps	mikrohybridní	64
41	Polofil Supra		•	•	•	•	•				•		6	1	sfríkačka	mikrohybridní	77
Komponenty																	
41	Twinky Star	barevný / třpytivý							•			8 ²			Caps	komponentní	78
41	Twinky Star Flow	barevný / třpytivý							•			2 ²			NDT [®] sfríkačka	komponentní	65

¹ malé ² barevný, s blýskavým efektem

Přehled našich skloionomerních výplňových materiálů naleznete na straně 42.

Admira® Fusion

Univerzální nanohybridní výplňový materiál typu ORMOCER®



Indikace

- Výplně I. až V. třídy kavit
- Podložky kavit I. a II. třídy
- Rekonstrukce frontálních zubů poškozených úrazem
- Fazetování diskolorovaných frontálních zubů
- Úpravy tvaru a odstínu z důvodu zlepšení estetiky
- Imobilizace, dlahování uvolněných frontálních zubů
- Opravy fazet, malých defektů ve sklovině a provizorních C&B materiálů
- Rozsáhlé pečetění fisur
- Výplně v mléčném chrupu
- Korunkové dostavby
- Kompozitní inleje

Přednosti

- Celosvětově první výplňový materiál čistě na bázi keramiky
 - technologie čistého oxidu křemičitého, tj. plniva a pryskyřičná matrix jsou založeny čistě na oxidu křemičitém
 - neobsahuje žádné klasické monomery
- Díky nejnovější technologii ORMOCER®
 - zdaleka nejnížší polymerační smršťování (1,25 % objemu) a obzvláště nízká míra smršťovacího napětí ve srovnání se všemi konvenčními výplňovými kompozity
 - inertní, takže výborně biokompatibilní a extrémně odolný vůči diskoloracím
- Naprosto univerzální – vyhovuje nejvyšším požadavkům ve frontálních i distálních úsecích
 - dokonalé sladění translucence s opacitou pro přirozené výsledky
 - optimální výběr odstínů umožňuje vysoce flexibilní práci za použití systému jednoho nebo více odstínů
- Výborné zpracování, jednoduché leštění do vysokého lesku spolu s vysokou povrchovou tvrdostí zaručuje prvotřídní dlouhodobé výsledky
- Kompatibilní se všemi konvenčními vazebnými prostředky

Klinický případ



Nevyhovující amalgámové výplně v zubech 46 a 47




Modelace materiálu, který je v této fázi dosud dobře tvarovatelný



Dokončené, vyleštěné výplně

Zdroj: Dr. Sanzio Marques, Passos / Brazílie

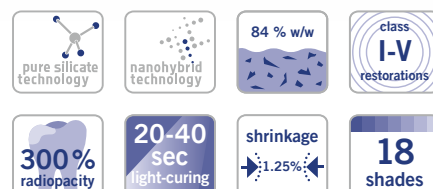

REF 2750	Sada + bond stříkačka 5 × 3 g (A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra), vzorník odstínů + Futurabond U SingleDose 20 ks, příslušenství	
REF 2778	Zkušební sada Caps 9 × 0,2 g (3 × A2, A3, A3.5), Admira Fusion Flow stříkačka 2 g A3, Admira Fusion x-tra Caps 3 × 0,2 g univerzální, příslušenství	
REF 2780	Sada + bond Caps 75 × 0,2 g (15 × A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra), vzorník odstínů + Futurabond U SingleDose 20 ks, příslušenství	
REF 2752	Vzorník odstínů	
REF 9301	Dispenser – Caps	
Odstín	Stříkačka 3 g	Caps 15 × 0,2 g
A1	REF 2754	REF 2782
A2	REF 2755	REF 2783
A3	REF 2756	REF 2784
A3.5	REF 2758	REF 2786
A4	REF 2759	REF 2787
B1	REF 2762	REF 2790
B2	REF 2763	REF 2791
B3	REF 2764	REF 2792
C2	REF 2766	REF 2794
D3	REF 2768	REF 2796
OA1	REF 2770	REF 2798
OA2	REF 2771	REF 2799
OA3	REF 2772	REF 2800
OA3.5	REF 2773	REF 2801
BL	REF 2775	REF 2803
Incizální	REF 2776	REF 2804
GA3.25	REF 2757	REF 2785
GA5	REF 2760	REF 2788
Mixed	–	REF 2806*

*(3 × B1, B3, D3, BL, incizální)

Admira® Fusion Flow

Zatékavý světlem tuhnoucí nanohybridní výplňový materiál typu ORMOCER®



Indikace

Výplně malých kavit a rozsáhlé pečetění fisur

Vykrývání podsekřivin

Podkládání nebo krytí kavit

Výplně kavit III. - V. třídy

Opravy výplní, fazet a provizorních náhrad

Upevňování translucenčních protetických prvků

Imobilizace, dlahování uvolněných zubů

Přednosti

- Celosvětově první zatékavý výplňový materiál čistě na bázi keramiky
 - technologie čistého oxidu křemičitého, tj. plniva a pryskyřičná matrix jsou založeny čistě na oxidu křemičitém
 - neobsahuje žádné klasické monomery
- Díky nejnovější technologii ORMOCER®
 - zdaleka nejnižší polymerační smršťování (2,75 % objemu) a obzvláště nízká míra smršťovacího napětí ve srovnání se všemi konvenčními zatékavými výplňovými kompozity
 - inertní, takže vysoce biokompatibilní a extrémně odolný vůči diskoloracím
- „Zatékavý, je-li to žádoucí“ – materiál se stává zatékavým pouze je-li pod tlakem nebo v pohybu. Po skončení nanášení je dostatečně stabilní, aby nevytékal z kavity.
- Vynikající povrchová afinita s úplným smáčením stěn kavity
- Patentovaná nevytékající a neodkapávající NDT® stříkačka VOCO zajišťuje spolehlivé a dokonale přesné nanášení. Nežádoucí ztráta materiálu je tak již věcí minulosti.
- 12 odstínů pro estetické výplně – perfektně odpovídajících řadě odstínů modelovatelné verze Admira Fusion
- Výborné zpracování, jednoduché leštění do vysokého lesku spolu s vysokou povrchovou tvrdostí zaručuje prvotřídní dlouhodobé výsledky
- Kompatibilní se všemi konvenčními vazebnými prostředky

Klinický případ




Meziální kaz na zubu 12, disto-palatinální kaz na zubu 11



Jednoduché nanášení a optimální schopnost smáčení Admira Fusion Flow



Vynikající výsledek vytvořený pomocí Admira Fusion Flow / Admira Fusion

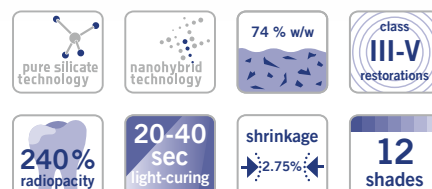

REF 2816 Sada stříkaček 5 x 2 g (A1, A2, A3, A3.5, WO), vzorník odstínů, příslušenství

REF 2146 Aplikační kanyly typu 41, 100 ks

Odstín	Stříkačky 2 x 2 g
A1	REF 2818
A2	REF 2819
A3	REF 2820
A3.5	REF 2821
A4	REF 2822
B1	REF 2824
B2	REF 2825
C2	REF 2826
Incizální	REF 2828
OA2	REF 2829
BL	REF 2831
WO	REF 2832

Zdroj: Dr. Walter Denner, Fulda / Německo

Admira® Fusion x-tra

Nanohybridní výplňový materiál typu ORMOCER®, 4 mm



Indikace

Výplně kavit I. a II. třídy
 Podložky kavit I. a II. třídy
 Výplně kavit V. třídy
 Imobilizace, dlahování uvolněných frontálních zubů
 Opravy fazet, malých defektů ve sklovině a provizorních C&B materiálů
 Rozsáhlé pečetění fisur
 Výplně v mléčném chrupu
 Korunkové dostavby

Přednosti

- Výplňový materiál čistě na bázi keramiky, typu bulk-fill
- Rychlé a vysoce kvalitní – spolehlivé vytvrzování 4 mm vrstev
- Díky nejnovější technologii ORMOCER®
 – zdaleka nejnižší polymerační smršťování (1,25 % objemu) a obzvláště nízká míra smršťovacího napětí poskytující optimální celistvost při okrajích
 – inertní, takže vysoce biokompatibilní a extrémně odolný vůči diskoloracím
- Výborné zpracování, jednoduché leštění do vysokého lesku spolu s vysokou povrchovou tvrdostí zaručuje prvotřídní dlouhodobé výsledky
- Univerzální odstín s chameleon efektem
- Kompatibilní se všemi konvenčními vazebnými prostředky

Klinický případ



Nevyhovující kompozitní výplň v zubu 45



Preparovaná kavita čekající na výplň



Nanášení Admira Fusion x-tra v 4 mm vrstvách



Funkční a estetický konečný výsledek

Zdroj: Dr. Walter Denner, Fulda / Německo



REF 2810	Stříkačka 3 g univerzální
REF 2811	Caps 15 × 0,2 g univerzální
REF 9301	Dispenser – Caps

Podkladací materiály

Bondy

Výplňové materiály (ORMOCER®)

Výplňové materiály (Kompozity)

Výplňové materiály (Kompozity)

Výplňové materiály (Skloionomerní materiály)

Admira® Fusion x-base

Zatékavý nanohybridní výplňový materiál na bázi ORMOCER®ů, 4 mm



Indikace

Podložky kavit I. a II. třídy

Podkládání kavit I. a II. třídy pod přímé výplňové materiály

Malé, okluzním tlakem nezatížené výplně kavit I. třídy odpovídající minimálně invazivnímu výplňovému ošetření

Výplně kavit III. a V. třídy

Rozsáhlé pečetění fisur

Vykrývání podsekřivin

Opravy malých defektů na sklovině

Opravy malých defektů u estetických nepřímých výplní

Opravy provizorních C&B materiálů

Korunkové dostavby



REF 2812	Stříkačky 2 x 2 g univerzální, příslušenství
REF 2148	Aplikační kanyly typu 46, 100 ks

Přednosti

- Čistě na bázi keramiky
- Rychlý a vysoce kvalitní 4 mm základ výplně v jednom jednoduchém kroku
- Díky nejnovější technologii ORMOCER®ů
 - extrémně nízké polymerační smrštění (2,5 % objemu) a obzvláště nízká úroveň smršťovacího napětí poskytují optimální celistvost okrajů
 - inertní, takže vysoce biokompatibilní a extrémně odolný vůči diskoloracím
- Perfektní povrchová afinita pro vynikající adaptaci
- Výborná manipulace, dokonce i ve špatně přístupných oblastech
- K dostání v neodkapávající NDT®-stříkačce
- Kompatibilní se všemi konvenčními vazebnými prostředky a kompozitními / ORMOCER®ovými výplňovými materiály

Admira® Bond

Jednosložkový vazebný prostředek na dentin i sklovinu na bázi ORMOCER®ů



Indikace

Přímé výplně ze všech typů světlem tuhnucích výplňových materiálů (ORMOCER®y, kompozita, kompomery)

Přednosti

- ORMOCER®ová báze
- Vysoká přilnavost a dlouhodobá těsnost okrajů
- Jedna složka – jedna vrstva
- Univerzální pro všechny světlem tuhnucí výplňové materiály



REF 2432	Lahvička 2 x 4 ml
REF 2479	Lahvička 4 ml



Grandio®SO

Univerzální nanohybridní výplňový materiál



Indikace

Výplně kavit I. - V. třídy

Rekonstrukce traumaticky poškozených frontálních zubů

Fazetování diskolorovaných frontálních zubů

Úpravy tvaru a odstínu za účelem zlepšení estetiky

Zpevňování, dlahování uvolněných zubů

Opravy fazet

Výplně v mléčném chrupu

Dostavby pahýlů pod korunky

Kompozitní inleje

Přednosti

- Výplňový materiál v barvě zubu pro spolehlivé výplně
- Vysoký obsah plniva, 89 % hmotnosti
- Všestranné pro vysoké požadavky ve frontálním i distálním úseku chrupu
- Vynikající odolnost vůči světlu
- Optimální vyváženost opacity a translucence pro výsledky, které pomocí jediného odstínu splývají s přirozeným zubem
- Hladká konzistence, nelepivá, perfektně tvarovatelná
- Snadno se leští do vysokého lesku – dlouhodobě hladký povrch
- Kompatibilní se všemi konvenčními vazebnými prostředky

Klinické případy



Výplně v zubech 14, 15 bylo nutné vzhledem k sekundárnímu kazu vyměnit



Zub 15 s domodelovaným distálním hrbolkem



Hotová výplň

Zdroj: Dr. Walter Denner, Fulda / Německo



Nevyhovující kompozitní výplně v zubech 11 a 21



Nanášení vrstev GrandioSO A3.5



Hotová výplň

Zdroj: Dr. Sanzio Marques, Passos / Brazílie



REF 2600	Sada stříkaček 5 x 4 g (A2, A3, A3.5, GA3.25, GA5), vzorník odstínů	
REF 2601	Sada + bond stříkačky 5 x 4 g (A2, A3, A3.5, GA3.25, GA5), vzorník odstínů + Futurabond NR SingleDose 50 ks, příslušenství	
REF 2640	Sada Caps 80 x 0,25 g (16 x A2, A3, A3.5, GA3.25, GA5), vzorník odstínů	
REF 2607	Vzorník odstínů	
REF 9301	Dispenser – Caps	
Odstín	Stříkačka 4 g	Caps 16 x 0,25 g
A1	REF 2610	REF 2650
A2	REF 2611	REF 2651
A3	REF 2612	REF 2652
A3.5	REF 2614	REF 2654
A4	REF 2615	REF 2655
B1	REF 2619	REF 2659
B2	REF 2620	REF 2660
B3	REF 2621	REF 2661
C2	REF 2624	REF 2664
D3	REF 2627	REF 2667
Incizální	REF 2629	REF 2669
OA1	REF 2630	REF 2670
OA2	REF 2631	REF 2671
OA3.5	REF 2633	REF 2673
BL	REF 2635	REF 2675
GA3.25	REF 2613	REF 2653
GA5	REF 2616	REF 2656

Podkladací materiály

Bondy

Výplňové materiály (Kompozita)

Výplňové materiály (Kompozita)

Výplňové materiály (Kompomery)

Výplňové materiály (Sklonomerní materiály)

Grandio®SO Flow

Viskozní univerzální nanohybridní výplňový materiál



Indikace

Výplně kavit I. - V. třídy

Minimálně invazivní výplňové ošetření

Rozsáhlé pečetění fisur

Vykrývání podsekřivin

Podkládání nebo potažení kavit

Opravy výplní a fazet


Upevňování translucenčních protetických prvků (např. celokeramických korunek apod.)

Blokování a dlahování zubů (např. pomocí výztuží se skleněnými vlákny)

Jako základový materiál v kombinaci se skleněnými vlákny nebo podobnými produkty k výrobě dočasně stálých korunek a můstků

Přednosti

- Středně viskózní zatékové kompozitum, tj. vynikající zatékavosti s úplným smáčením stěn kavit
- Univerzální použití – pro indikace pokrývající ošetření kavit všech tříd
- Výjimečné fyzikální vlastnosti, kterými se liší od jiných materiálů, např. tvrdost, stabilita, odolnost vůči abrazi
- Velice vysoký obsah plniva – více než 80 % hmotnosti
- Bezpečné a přesné použití
- 13 odstínů z estetických důvodů – perfektně sladěné s GrandioSO
- Vysoká stálost odstínů
- Velmi dobrá leštitelnost a trvalý lesk
- Extrémně vysoká RTG kontrastnost (500 %AI) u odstínu WO pro obzvláště dobrý kontrast s hmotou zubu a jinými výplňovými materiály
- K dostání v neodkapávajících NDT® stříkačkách a kompulích s ohebnou kovovou kanylou

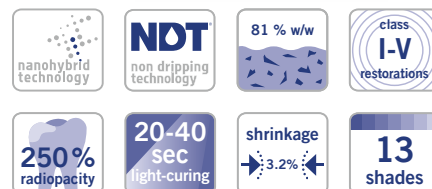

REF 2720	Sada stříkaček 5 × 2 g (A1, A2, A3, A3.5, WO), vzorník odstínů, příslušenství
REF 2607	Vzorník odstínů
REF 9301	Dispenser – Caps
REF 2146	Aplikační kanyly typu 41, 100 ks

Odstín	Stříkačky 2 × 2 g	Caps 16 × 0,25 g
A1	REF 2722	REF 2742
A2	REF 2723	REF 2743
A3	REF 2724	REF 2744
A3.5	REF 2725	REF 2745
A4	REF 2726	REF 2746
B1	REF 2729	REF 2749
B2	REF 2730	–
C2	REF 2732	–
Incizální	REF 2733	–
OA2	REF 2734	–
BL	REF 2736	–
WO	REF 2737	–
GA5	REF 2727	–

Grandio®SO Heavy Flow

Zatékavý univerzální nanohybridní výplňový materiál – vysoce viskózní



Indikace

Výplně kavit I. - V. třídy

Minimálně invazivní výplňové ošetření

Rozsáhlé pečetění fisur

Vykrývání podsekřivin

Podkládání nebo potažení kavit

Opravy výplní a fazet

Upevňování translucenčních protetických prvků (např. celokeramických korunek apod.)

Blokování a dlahování zubů (např. pomocí výztuží se skleněnými vlákny)

Jako základový materiál v kombinaci se skleněnými vlákny nebo podobnými produkty k výrobě dočasně stálých korunek a můstků

Přednosti

- Ve srovnání s konvenčními zatékavými kompozity větší stabilita, tj. bez nežádoucího odtékání
- Univerzální použití – pro indikace pokrývající ošetření kavit všech tříd
- Výjimečné fyzikální vlastnosti, kterými se liší od jiných materiálů, např. tvrdost, stabilita, odolnost vůči abrazi
- Velice vysoký obsah plniva – 83 % hmotnosti
- Přesné použití s úplným smáčením stěn kavity
- Přesné dávkování bez přebytků, šetřící čas
- Lze snadno vyplnit take podsekřivé, aproximální oblasti a oblasti v blízkosti gingivy
- Ideální pro použití v kombinaci s GrandTEC
- 13 odstínů z estetických důvodů – perfektně sladěné s GrandioSO
- Vysoká stálost odstínů
- Velmi dobrá leštitelnost a trvalý lesk
- K dostání v neodkapávajících NDT® stříkačkách a kompulích s ohebnou kovovou kanylou

Klinický případ



Typický „V“ defekt v krčkové oblasti zubu 13



Nanášení GrandioSO Heavy Flow po úpravě povrchu a nanesení bondu



Výplň bezprostředně po vyleštění

Zdroj: Dr. Walter Denner, Fulda / Německo



REF 2680	Sada stříkaček 5 x 2 g (A2, A3, A3.5, WO, GA5), vzorník odstínů, příslušenství
REF 2607	Vzorník odstínů
REF 9301	Dispenser – Caps
REF 2148	Aplikační kanyly typu 46, 100 ks

Odstín	Stříkačky 2 x 2 g	Caps 16 x 0,25 g
A1	REF 2684	REF 2704
A2	REF 2685	REF 2705
A3	REF 2686	REF 2706
A3.5	REF 2687	REF 2707
A4	REF 2688	REF 2708
B1	REF 2690	REF 2712
B2	REF 2691	–
C2	REF 2692	–
OA2	REF 2693	–
Incizální	REF 2694	–
BL	REF 2695	–
WO	REF 2696	–
GA5	REF 2689	–

Grandio®SO x-tra

Estetický nanohybridní výplňový materiál typu bulk-fill

NOVINKA

Indikace

Distální výplně kavit I. a II. třídy

Podložky kavit I. a II. třídy

Výplně kavit V. třídy

Imobilizace, dlahování uvolněných zubů

Opravy fazet, defektů ve sklovině a provizorních C&B materiálů

Rozsáhlé pečetění fisur

Výplně v mléčném chrupu

Korunkové dostavby

Přednosti

- Rychlé a estetické distální výplně
- Vyšší úroveň tvrdosti než u ostatních kompozitů typu bulk-fill – na povrchu i v hloubce 4 mm
- Velmi vysoký obsah plniv (86 % hmotnosti) a extrémně nízké polymerační smršťování (1,4 % objemu)
- V odstínech A1, A2, A3 a universal
- Vysoká odstínová stálost
- Vynikající manipulace a snadné leštění do vysokého lesku



REF 9301 Dispenser – Caps

Odstín	Stříkačky 4 g	Caps 16 × 0,25 g
Univerzální	REF 2595	REF 2714
A1	REF 2596	REF 2715
A2	REF 2597	REF 2716
A3	REF 2598	REF 2717
Odstín	Stříkačky 5 × 4 g	Caps 80 × 0,25 g
A3	REF 2599	REF 2719

Klinický případ



Stará amalgámová výplň k výměně



Preparovaná kavita II. třídy



GrandioSO x-tra kombinuje estetiku s efektivním zpracováním materiálu po velkých vrstvách

Zdroj: Dr. Walter Denner, Fulda / Německo

GrandTEC®

Pryskyřici impregnované výztuže se skleněnými vlákny polymerující světlem pro dentální adhezivní techniku



Indikace

Stabilizace zubů

- po ortodontickém ošetření
- po parodontologickém ošetření

Podpůrný prostředek při ošetření úrazů

- imobilizace a dlahování zlomených nebo uvolněných zubů
- fixace úlomků po zlomení

K vyztužení / výrobě provizorních můstků vyrobených z kompozitních a provizorních C&B materiálů

K provizornímu ošetření po extrakci a náhradě chybějícího zubu zubem umělým

K provizornímu nebo dlouhodobě provizornímu držení místa po extrakci přirozeným zubem

K provizornímu ošetření po zavedení implantátu v průběhu jeho osseointegrace

Přednosti

- Pomocný produkt k vyztužení kompozitních materiálů v traumatologii, parodontologii, ortodoncii, záchovné stomatologii a protetice

Klinický případ



GrandTEC skleněná vlákna se sejmutou ochrannou vrstvou

Zdroj: Dr. Walter Denner, držení místa po extrakci s využitím extrahovaného zubu a GrandTEC, Fulda / Německo

Grandio®

Univerzální nanohybridní výplňový materiál



Indikace

Výplně kavit I. - V. třídy

Rekonstrukce traumaticky poškozených frontálních zubů

Přímé fazetování frontálních zubů

Tvarové a odstínové korekce pro zlepšení estetiky

Dlahování, zajištění uvolněných zubů

Opravy fazet

Výplně mléčných zubů

Korunkové dostavby

Kompozitní inleje

Přednosti

- Výborné fyzikální vlastnosti pro dlouhodobé výplně
- Výrazně menší polymerační smrštění než u konvenčních kompozit
- Vysoký obsah plniva, 87 % hmotnosti
- Extrémně odolný vůči abrazi
- Vysoká pevnost v ohybu
- Hladká konzistence umožňující pohodlné zpracování
- Výborná estetika
- Použitelný se všemi bondy (dentin / sklovina)
- Vyrábí se v 16 odstínech
- Vzorník odstínů vyroben ze stejného materiálu



REF 1800	Sada stříkaček 5 x 4 g (A1, A2, A3, A3.5, B2), vzorník odstínů	
REF 1801	Sada + bond stříkačky 5 x 4 g (A1, A2, A3, A3.5, B2), vzorník odstínů + Futurabond NR SingleDose 50 ks, příslušenství	
REF 1805	Stříkačky 10 x 4 g A3	
REF 1830	Sada Caps 50 x 0,25 g (10 x A1, A2, A3, A3.5, B2), vzorník odstínů	
REF 1899	Vzorník odstínů	
REF 9301	Dispenser – Caps	
Odstín	Stříkačka 4 g	Caps 20 x 0,25 g
A1	REF 1810	REF 1840
A2	REF 1811	REF 1841
A3	REF 1812	REF 1842
A3.5	REF 1813	REF 1843
A4	REF 1814	REF 1844
B1	REF 1824	REF 1854
B2	REF 1815	REF 1845
B3	REF 1816	REF 1846
C2	REF 1817	REF 1847
C3	REF 1818	REF 1848
D2	REF 1825	REF 1855
D3	REF 1819	REF 1849
Incizální	REF 1820	REF 1850
OA2	REF 1821	REF 1851
OA3.5	REF 1822	REF 1852
BL	REF 1823	REF 1853

Grandio® Flow

Zatékavý univerzální nanohybridní výplňový materiál



Indikace

Výplně kavit všech tříd po minimálně invazivních kazech

Výplně malých kavit I. třídy a rozsáhlé pečetění fisur

Výplně kavit II. - V. třídy včetně klínovitých defektů a krčkového kazu

Vykrývání podsekřivin

Izolace nebo potažení kavit

Opravy výplní a fazet

Upevnění translucenčních protetických náhrad (např.: celokeramických korunek)

Přednosti

- Optimální zatékavost
- Vysoký obsah plniva, 80 % hmotnosti
- Odstíny odpovídají Grandio
- Vynikající smáčivost
- Mikrohybridní kompozitum – svými fyzikálními vlastnostmi
- Výrazně menší polymerační smrštění než u konvenčních zatékavých materiálů
- Velmi dobrá odolnost vůči abrazi
- Vysoká pevnost v ohybu
- Použitelný se všemi konvenčními bondy
- Odstíny BL (bleach light) a WO (white opaque) určené pro zvláštní indikace: bleach light je vhodný pro bělené zuby, ale také pro dětské pacienty. White opaque nabízí vynikající základ náhrad např. u diskolorované oblasti dentinu nebo u dostaveb

Grandio® Flow v NDT® stříkačce

- NDT® je technologie neodkapávajících stříkaček
- Určená pouze pro výborně zatékavé materiály
- Umožňuje přesné dávkování i nanášení
- Bez zbytečných ztrát materiálu



REF 1860	Sada stříkaček 8 x 2 g (A1, 2 x A2, 2 x A3, A3.5, B2, OA2), vzorník odstínů, příslušenství
REF 1899	Vzorník odstínů
REF 9301	Dispenser – Caps
REF 2146	Aplikační kanyly typu 41, 100 ks

Odstín	Stříkačky 2 x 2 g	Caps 20 x 0,25 g
A1	REF 1863	REF 1880
A2	REF 1864	REF 1881
A3	REF 1865	REF 1882
A3.5	REF 1866	REF 1883
A4	REF 1868	REF 1884
B1	REF 1869	REF 1885
B2	REF 1867	REF 1886
C2	REF 1873	REF 1887
D2	REF 1874	–
OA2	REF 1870	REF 1889
BL	REF 1871	–
WO	REF 1872	REF 1891

Podkladací materiály

Bondy

Výplňové materiály (Kompozita)

Výplňové materiály (Kompozita)

Výplňové materiály (Kompozity)

Výplňové materiály (Skloionomerní materiály)

Amaris® · Amaris® Flow

Vysoce estetický světlem tuhnoucí výplňový materiál



Indikace

Estetické výplně III., IV., a V. třídy kavit u předních zubů

Estetické výplně I., II. a V. třídy kavit u zadních zubů

Rekonstrukce předních zubů poškozených úrazem

Přímé a nepřímé kompozitní fazety a povrchové opravy diskolorovaných předních zubů

Tvarová a odstínová korekce ke zlepšení estetiky

Opravy vysoce estetických keramik, např. fazet

Dlahování předních zubů

Přednosti

- Dva jednoduché kroky, perfektní výsledky
- Přirozené vrstvení: odstíny se vytváří z vnitřní struktury zubu
- Jednoduché a přesné napodobení odstínu
- Automatický přirozený přechod mezi odstíny
- Přirozeného vzhledu docílíte s pouhými 11 odstíny jednoduchou technikou vrstvení
- Snadno se jej naučíte používat a budete rychle dosahovat estetických výsledků
- Intuitivní přístup, žádné předem určené odstíny
- Nelepivá konzistence je ideální pro modelaci a tvarování
- Dlouho odolný vůči okolnímu světlu i světlu soupravy
- Optimálně leštitelný
- Přirozeně fluorescentní a vysoce barevně stálý
- Výborný chameleon efekt pro nerozpoznatelné náhrady

Přednosti Amaris® Flow

- Ideální doplněk k Amaris
- Jednoduchá modelace incizních hran
- Snadné navlhčení
- Jemná kanyla umožňuje nanášet malé množství materiálu

REF 1930	Sada stříkaček 8 × 4 g (01, 02, 03, 04, 05, TL, TN, TD), Amaris Flow stříkačky 2 × 1,8 g (HT, HO), vzorník odstínů, příslušenství
REF 1931	Sada + bond stříkačky 8 × 4 g (01, 02, 03, 04, 05, TL, TN, TD), Amaris Flow stříkačky 2 × 1,8 g (HT, HO), vzorník odstínů + Futurabond NR SingleDose 50 ks, příslušenství
REF 1932	Sada stříkaček 5 × 4 g (01, 02, TL, TN, TD), vzorník odstínů
REF 1949	Úvodní sada Caps 32 × 0,25 g (4 × 01, 02, 03, 04, 05, TL, TN, TD), Amaris Flow stříkačky 2 × 1,8 g (HT, HO), vzorník odstínů, příslušenství
REF 1950	Sada Caps 128 × 0,25 g (16 × 01, 02, 03, 04, 05, TL, TN, TD), Amaris Flow stříkačky 2 × 1,8 g (HT, HO), vzorník odstínů, příslušenství
REF 1969	Vzorník odstínů
REF 9301	Dispenser – Caps
REF 2144	Aplikační kanyly typu 44, 100 ks

Základní odstíny

Opaque	Stříkačka 4 g	Caps 16 × 0,25 g
01	REF 1933	REF 1953
02	REF 1934	REF 1954
03	REF 1935	REF 1955
04	REF 1936	REF 1956
05	REF 1937	REF 1957
0 Bleach	REF 1938	REF 1958

Sklovinné odstíny

Translucent	Stříkačka 4 g	Caps 16 × 0,25 g
Light, TL	REF 1940	REF 1960
Neutral, TN	REF 1941	REF 1961
Dark, TD	REF 1942	REF 1962

Amaris® Flow

Speciální odstíny	Stříkačky 2 × 1,8 g
High translucent, HT	REF 1945
High opaque, HO	REF 1946

Amaris® Gingiva

Vysoce estetický světlem tuhnoucí výplňový materiál v barvě gingivy

Indikace

Výplně kavit V. třídy (kazy v oblasti krčku, eroze kořene, klínovité defekty) zejména u případů narušené gingivy, např. výsledek onemocnění parodontu

Zakrytí odhalených diskolorovaných hypersenzitivních zubních krčků, zvláště ve viditelném frontálním úseku chrupu

Vysoce estetická úprava nesprávné pozice zubů, pro přímé fazetování a úpravy vzhledu červeno-bílých oblastí

Přednosti

- Jedna základní barva, která se kombinuje se 3 míchatelnými opakery, je schopná napodobit téměř všechny barvy gingivy
- Estetické a funkční řešení kazů a klínovitých defektů v obnažených a tedy nechráněných oblastech krčku
- Nejnovější technologie kompozit – Amaris, know-how v barvách gingivy



REF 1970	Sada stříkačka 4 g základní odstín nature, stříkačka 3 × 1,2 g opakeru (white, light, dark), příslušenství
REF 1971	Stříkačka 4 g nature
REF 2147	Aplikační kanyly typu 45, 100 ks
REF 2309	Jednorázové štětečky do držáku, 100 ks
REF 2338	Držák na jednorázové dentální štětečky a Micro Tim, 5 ks

FinalTouch®

Světlem tuhnoucí individualizační materiál

Indikace

Individualizace přímých a nepřímých kompozitních výplní

Zakrývání diskolorací zubů

Individualizace CAD / CAM fazet vyrobených v ordinaci

Přednosti

- Reprodukce vlastností skloviny
- Perfektní rozsah řady VOCO kompozitních a ORMOCER®ových výplňových materiálů
- Vynikající manipulace pro vysoce estetické výsledky
- Jemná materiálová struktura a homogenní konzistence pro přesné nanášení
- V neodkapávající NDT®-stříkačce
- 5 barev s opacitou odpovídající oblasti použití



REF 2321	Sada stříkačky 5 × 1,5 g (bílá, modrá, žlutá, oranžová, hnědá), příslušenství
REF 2323	Stříkačka 1,5 g bílá, příslušenství
REF 2324	Stříkačka 1,5 g modrá, příslušenství
REF 2325	Stříkačka 1,5 g žlutá, příslušenství
REF 2326	Stříkačka 1,5 g oranžová, příslušenství
REF 2327	Stříkačka 1,5 g hnědá, příslušenství
REF 2147	Aplikační kanyly typu 45, 100 ks

x-tra base®

Zatékavé světlem tuhnoucí podkládací kompozitum



Indikace

Podložky kavit I. a II. třídy

Podkládání kavit I. a II. třídy pod přímé výplňové materiály

Malé, okluzním tlakem nezatížené výplně kavit I. třídy odpovídající minimálně invazivnímu výplňovému ošetření

Výplně kavit III. a V. třídy

Rozsáhlé pečetění fisur

Vykrývání podsekřivin

Opravy malých defektů na sklovině

Opravy malých defektů u estetických nepřímých výplní

Opravy provizorních C&B materiálů

Korunkové dostavby



REF 1790	Stříkačky 2 × 2 g univerzální, příslušenství
REF 1791	Stříkačky 2 × 2 g A2, příslušenství
REF 1794	Caps 16 × 0,25 g univerzální
REF 1795	Caps 16 × 0,25 g A2
REF 9301	Dispenser – Caps
REF 2148	Aplikační kanyly typu 46, 100 ks

Přednosti

- 4 mm základ výplně v jednom jednoduchém kroku
- Spolehlivě tuhne během pouhých 10 sekund (odstín univerzální)
- Dokonalá povrchová afinita pro vynikající adaptaci
- Nízké smršťovací napětí
- Vysoká rentgen kontrastnost (350 %AI)
- Samo-nivelační
- Lze jej kombinovat s jakýmkoli vazebným prostředkem nebo kompozitem na bázi metakrylátů
- Neodkapávající NDT® stříkačka nebo pohodlné kompule s ohybatelnou kanylou zajišťují spolehlivou a přesnou aplikaci

Použití



Hotová preparace kavity



Potažení stěn kavity Futurabond DC



Začíná se v nejhlubším místě kavity ...



... a z x-tra base se zhotovuje až 4 mm výplně



Nanášení 2 mm okluzální vrstvy z GrandioSO



Dokončená výplň

x-tra fil®

Světlem tuhnoucí výplňový materiál pro distální úsek



Indikace

Výplně kavit I. a II. třídy
Dostavby pahýlů pod korunky

Přednosti

- Hloubka vytvrzení 4 mm
- Doba vytvrzování pouhých 10 sekund
- Univerzální odstín
- Dlouhodobý a ekonomický
- Zkracuje délku ošetření, obzvláště v kombinaci s adhezivem Futurabond *SingleDose*
- Jednoduché použití
- Vynikající fyzikální vlastnosti



REF 1739	Stříkačky 10 × 5 g
REF 1740	Stříkačka 5 g
REF 1741	Caps 20 × 0,25 g
REF 9301	Dispenser – Caps

Podkládací materiály

Bondy

Výplňové materiály (Kompozita)

Výplňové materiály
(Kompozita)

Výplňové materiály (Kompomery)

Výplňové materiály
(Skloionomerní materiály)

Alfacomp LC


Světlem tuhnoucí dostavbový a výplňový materiál pro laterální zuby

Indikace

Zhotovování výplní kavit I. a II. třídy v laterálním úseku
Dostavby pahýlů pod fixní náhrady

Přednosti

- Viditelný rozdíl mezi výplněmi a tvrdými zubními tkáněmi díky šedému zbarvení
- Jednoduché použití a přesto vynikající fyzikální vlastnosti
- Vysoká rentgen kontrastnost
- Použití možné s jakýmkoli světlem tuhnoucím dentinovým / sklovinným vazebným prostředkem

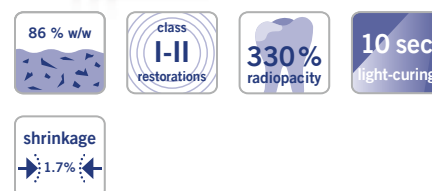

REF 1058	Stříkačka 4 g
REF 1059	Caps 16 × 0,25 g

Arabesk

Světlem tuhnoucí mikrohybridní výplňový materiál VOCO Sintraglas® na bázi pryskyřice se systémem různých plniv



Indikace

Výplně kavit I. až V. třídy
Rekonstrukce traumaticky poškozených frontálních zubů
Úpravy tvaru a odstínu za účelem zlepšení estetiky
Imobilizace a dlahování uvolněných frontálních zubů
Rozšířené pečetění fisur u molárů a premolárů
Opravy fazet
Dostavby pahýlů pod korunky
Zvláště vhodné pro kompozitní inleje

Přednosti

- Vysoká odolnost vůči abrazi a stálost výplně
- Výborně se nanáší a tvaruje
- Vynikající estetika a odstín odpovídající zubu
- Výborná leštitelnost
- Univerzální pro kavity všech tříd



REF 1338 Sada stříkaček 7 x 4 g (A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, incizální), Vococid gel stříkačka 5 ml, Solobond M lahvička 4 ml, vzorník odstínů, příslušenství

REF 2105 Vzorník odstínů

Odstín	Stříkačka 4 g	Odstín	Stříkačka 4 g
A1	REF 1339	B2	REF 1343
A2	REF 1340	B3	REF 1344
A3	REF 1341	Incizální	REF 1346
A3.5	REF 1342		

Arabesk Flow

Zatékavý světlem tuhnoucí sklo-keramický mikrohybridní výplňový materiál na bázi pryskyřice



Indikace

Výplně malých kavit
Rozsáhlé pečetění fisur
Výplně kavit III. - V. třídy
Podkládání, potahování kavit
Opravy kompozitních výplní a fazet
Upevňování prvků celokeramických náhrad

Přednosti

- Jemně zatékavý materiál s vynikající smáčivostí
- Velmi dobrá estetika (chameleon efekt)
- Tixotropní vlastnosti
- Vysoká adheze se Solobond M
- Přesná aplikace
- Úsporné použití



REF 9301	Dispenser – Caps	
REF 2144	Aplikační kanyly typu 44, 100 ks	
Odstín	Stříkačka 3 g	Caps 25 x 0,25 g
A2	REF 1563	REF 1560
A3	REF 1564	REF 1561
A3.5	REF 1565	REF 1562

Polofil® Supra

Světlem tuhnoucí mikrohybridní výplňový materiál

Indikace

Výplně kavit I. - V. třídy
Rekonstrukce traumaticky poškozených frontálních zubů
Fazetování diskolorovaných frontálních zubů
Dlahování, imobilizace uvolněných zubů

Přednosti

- Kombinuje přednosti kompozit s makro- a mikro-plnidly
- Nelepivý a dobře se nanáší
- Odolný vůči abrazi a barevně stálý
- Nízké smrštění
- Trvanlivé a odolné náhrady
- Nízká absorpce vody



- REF 1360 Sada stříkaček 7 × 4 g (A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, incizální), Vococid gel stříkačka 5 ml, Solobond M lahvička 4 ml, příslušenství
- REF 1373 Sada stříkaček 3 × 4 g (A2, A3, A3.5), Vococid lahvička 3 ml, Solobond M lahvička 4 ml, příslušenství
- REF 2107 Vzorník odstínů

Odstín	Stříkačka 4 g	Odstín	Stříkačka 4 g
A1	REF 1361	B2	REF 1365
A2	REF 1362	B3	REF 1366
A3	REF 1363	Incizální	REF 1368
A3.5	REF 1364		

Twinky Star® · Twinky Star® Flow

Barevný, světlem tuhnoucí, kompomer – výplňový materiál s třpytivým efektem



Indikace

Výplně v mléčných zubech

Přednosti

- Osm atraktivních barev s třpytivým efektem
- Rychlá a jednoduchá aplikace z kompulí
- Výborná leštitelnost
- VOCO kompomerová báze
- Vzorník barev ze stejného materiálu
- Rodiče mohou motivovat děti k návštěvě zubního lékaře
- Děti ztrácejí strach z ošetření
- Možná cílená reklama



Barevné výplně Twinky Star v mléčném chrupu



- REF 1680 Sada Caps 40 × 0,25 g (5 od každého odstínu), vzorník odstínů
- REF 1689 Vzorník odstínů
- REF 9301 Dispenser – Caps
- REF 2144 Aplikační kanyly typu 44, 100 ks

Odstín	Caps 25 × 0,25 g
Zlatý	REF 1681
Stříbrný	REF 1682
Modrý	REF 1683
Růžový	REF 1684
Zelený	REF 1685
Oranžový	REF 1686
Citronový	REF 1687
Ostružinový	REF 1688

Twinky Star® Flow

Odstín	Stříkačka 2 g
Modrý	REF 1693
Růžový	REF 1694

Výplňové materiály (Skloionomerní materiály)

Strana			I. třída	II. třída	III. třída	V. třída / krčkové defekty	podložka / liner / korunková dostavba	rozsáhlé pečetění fisur	výplně v mělném chrupu	provizorní ošetření	doba zpracování [min.]	doba tuhnutí [min.]
Skloionomerní výplňové materiály												
44	IonoStar Plus capsule	Rychle tuhnoucí skloionomerní výplňový materiál	• ^{1, 2}	• ²	•	•	•	•	•	•	1	2
44	IonoStar Molar capsule	skloionomerní výplňový materiál	• ^{1, 2}	• ²	•	•	•		•	•	1,5	3 - 4
45	VOCO Ionofil Molar AC capsule	skloionomerní výplňový materiál	• ²	• ^{1, 2}		•	•		•	•	2	4
45	VOCO Ionofil Molar AC Quick capsule	Rychle tuhnoucí skloionomerní výplňový materiál	• ²	• ^{1, 2}		•	•		•	•	1,5	2,5
45	VOCO Ionofil Molar handmix	skloionomerní výplňový materiál	• ²	• ^{1, 2}		•	•		•	•	2 - 3	4 - 5
46	Aqua Ionofil Plus handmix	skloionomerní výplňový materiál mísitelný s vodou	• ³		•	•	•	•	•		2,5 - 3,5	5 - 6
Světlem tuhnoucí skloionomerní výplňové materiály												
19	IonoSeal syringe, tube	skloionomerní kompozitní cement					•	•				světelné vytvrzování: 20 s / 1 mm
43	IonoLux capsule	skloionomerní výplňový materiál	• ³		•	•	•		•	•	> 2,5	světelné vytvrzování: 20 s / 2 mm
43	IonoLux handmix	skloionomerní výplňový materiál	• ³		•	•	•		•	•	> 3	světelné vytvrzování: 20 s / 2 mm

¹ nezatížené žvýkacím tlakem

² částečně definitivní

³ malé výplně

Přehled našich kompozitních výplňových materiálů naleznete na straně 24.

Ionolux®

Světlem tuhnoucí skloionomerní výplňový materiál



Indikace

Výplně kavit III. a V. třídy, především krčkových a kořenových kazů

Výplně v mléčném chrupu

Malé výplně kavit I. třídy

Provizorní výplně

Dostavby korunek

Podložky

Přednosti

- Vynikající doba zpracování – doba tuhnutí individuálně upravitelná světelným vytvrzením
- Není nutné kondicionování tvrdých zubních tkání
- Vhodný také pro velké kavity
- Modelace možná ihned po nanesení do kavity
- Nelepí se na nástroje, snadno se modeluje
- Naneste, zpolymerujete a dokončete – není třeba lak
- Uvolňování fluoridu
- Biokompatibilní
- Rentgen kontrastní
- V hlubokých kavitách vhodná alternativa k technice kompozita bondovaného na zatěkávy materiál



REF 2115	Sada aplikačních kapslí 50 ks (10 × A1, 10 × A2, 30 × A3)
REF 2117	Aplikační kapsle 20 ks A1
REF 2118	Aplikační kapsle 20 ks A2
REF 2119	Aplikační kapsle 20 ks A3
REF 2120	Aplikační kapsle 20 ks A3.5
REF 2121	Aplikační kapsle 20 ks B1
REF 2122	Aplikační kapsle 150 ks A2
REF 2123	Aplikační kapsle 150 ks A3
REF 1990	Prášek / tekutina (12 g / 5 ml) A1, příslušenství
REF 1991	Prášek / tekutina (12 g / 5 ml) A2, příslušenství
REF 1992	Prášek / tekutina (12 g / 5 ml) A3, příslušenství
REF 2331	Applicator – AC typu 1
REF 2303	Míchací podložky 70 × 80 mm, zesponu lepidlo, 4 ks
REF 2169	VOCO trifill nástroj, 10 ks

Klinické případy

Případ 1



Zub 35 s krčkovým defektem



Zub 35 bezprostředně po ošetření

Zdroj: Dr. Isma Goltz, Brémy / Německo

Případ 2



Zuby 16, 15 po exkavaci



Po ošetření materiálem Ionolux

Zdroj: Prof. Hervé Tassery, PU-PH, Marseille / Francie

IonoStar® Plus

Rychle tuhnoucí skloionomerní výplňový materiál



Indikace

Výplně kavit I. třídy nezatížené žvýkacím tlakem
Částečně definitivní výplně kavit I. a II. třídy
Výplně krčkových lézí, kavit V. třídy, kořenového kazu
Výplně kavit III. třídy
Výplně v mléčném chrupu
Podkládání výplní / liner
Korunkové dostavby
Provizorní výplně
Rozsáhlé pečetění fisur

Přednosti

- Dokonalá adaptace při okrajích a nanášení v jednom výrobku, a to díky změně viskozity během nanášení
- Rychlá doba tuhnutí, pouze 2 minuty od zhotovení výplně
- První skloionomerní materiál s fluorescencí podobnou zubu
- Vysoká míra uvolňování fluoridu
- Nový design kapsle dosáhne i do menších kavit a obtížně přístupných oblastí úst
- Vysoká pevnost v tlaku a odolnost vůči abrazi



REF 2540	Sada aplikačních kapslí 50 ks (10 × A2, 30 × A3, 10 × A3.5)
REF 2548	Aplikační kapsle 20 ks A1
REF 2543	Aplikační kapsle 20 ks A2
REF 2544	Aplikační kapsle 20 ks A3
REF 2545	Aplikační kapsle 20 ks A3.5
REF 2546	Aplikační kapsle 150 ks A2
REF 2547	Aplikační kapsle 150 ks A3
REF 2331	Applicator – AC typu 1
REF 2169	VOCO trifill nástroj, 10 ks

IonoStar® Molar

Skloionomerní výplňový materiál

Indikace

Výplně kavit I. třídy nezatížené žvýkacím tlakem
Částečně definitivní výplně kavit I. a II. třídy
Výplně krčkových lézí, kavit V. třídy, kořenového kazu
Výplně kavit III. třídy
Výplně v mléčném chrupu
Podkládání výplní / liner
Korunkové dostavby
Provizorní výplně

Přednosti

- Variabilní doba míchání za účelem úpravy konzistence
- Dokonalá přilnavost při okrajích a snadné nanášení
- Modelace možná ihned po nanesení, aniž by se materiál lepil k nástroji
- V nových aplikačních kapslích VOCO pro snadné použití bez aktivátoru
- Nový design kapsle dosáhne i do menších kavit a obtížně přístupných oblastí dutiny ústní
- Vysoká pevnost v tlaku a odolnost vůči abrazi



REF 2520	Sada aplikačních kapslí 50 ks (10 × A1, 10 × A2, 30 × A3)
REF 2522	Sada aplikačních kapslí 150 ks A2, AC Applicator typu 1
REF 2523	Sada aplikačních kapslí 150 ks A3, AC Applicator typu 1
REF 2524	Aplikační kapsle 20 ks A1
REF 2525	Aplikační kapsle 20 ks A2
REF 2526	Aplikační kapsle 20 ks A3
REF 2532	Aplikační kapsle 150 ks A2
REF 2533	Aplikační kapsle 150 ks A3
REF 2331	Applicator – AC typu 1
REF 2169	VOCO trifill nástroj, 10 ks

VOCO Ionofil® Molar AC · Quick

Skoionomerní výplňový materiál

Indikace

Výplně kavit II. třídy (nezatížených okluzním tlakem)
 Dlouhodobější provizorní ošetření kavit I. a II. třídy
 Dostavby a podložky
 Čepové návstavy
 Výplně v mléčných zubech
 Výplně klínovitých defektů v krčkové oblasti nebo eroze kořene, včetně kavit V. třídy

Přednosti

- Použitelný okamžitě
- Nelepivá konzistence
- Vysoce odolný vůči abrazi, vysoká pevnost v tlaku a ohybu
- Odolné výplně bez okrajových netěsností
- Postupné uvolňování fluoridů
- Biokompatibilní
- Translucence podobná přirozenému zubu
- Doba vytvrzování, pouhé 2,5 minuty, dělá z VOCO Ionofil Molar AC Quick perfektní materiál k ošetření dětí a netrpělivých pacientů
- Dobrá estetika ve třech odstínech



VOCO Ionofil® Molar AC

REF 1463 Sada aplikačních kapslí 48 ks (8 × A1, 8 × A2, 32 × A3), Final Varnish LC lahvička 3 ml

REF 1464 Aplikační kapsle 48 ks A1

REF 1460 Aplikační kapsle 48 ks A2

REF 1465 Aplikační kapsle 48 ks A3

VOCO Ionofil® Molar AC Quick

REF 1630 Sada aplikačních kapslí 48 ks (8 × A1, 8 × A2, 32 × A3), Final Varnish LC lahvička 3 ml

REF 1469 Sada aplikačních kapslí 20 ks A3, AC Activator, AC Applicator typu 1

REF 1631 Aplikační kapsle 48 ks A1

REF 1634 Aplikační kapsle 48 ks A2

REF 1632 Aplikační kapsle 48 ks A3

REF 1241 Final Varnish LC lahvička 2 × 3 ml

REF 2331 Applicator – AC typu 1

REF 9300 Activator – AC

REF 2169 VOCO trifill nástroj, 10 ks

VOCO Ionofil® Molar

Skoionomerní výplňový materiál

Indikace

Výplně kavit II. třídy (nezatížených okluzním tlakem)
 Dlouhodobější provizorní ošetření kavit I. a II. třídy
 Dostavby a podložky
 Čepové návstavy
 Výplně v mléčných zubech
 Výplně klínovitých defektů v krčkové oblasti nebo eroze kořene, včetně kavit V. třídy

Přednosti

- Použitelný okamžitě
- Nelepivá konzistence
- Vysoce odolný vůči abrazi, vysoká pevnost v tlaku a ohybu
- Spolehlivá přilnavost k dentinu a sklovině
- Odolné výplně bez okrajových netěsností
- Postupné uvolňování fluoridů
- Rentgen kontrastní
- Biokompatibilní
- Translucence podobná přirozenému zubu



REF 1441 Prášek / tekutina, 3 × 15 g prášek (A1, A2, A3), tekutiny lahvička 10 ml, Final Varnish LC lahvička 3 ml

REF 1447 Prášek 15 g A1

REF 1442 Prášek 15 g A2

REF 1443 Prášek 15 g A3

REF 1448 Tekutina 10 ml

REF 2168 VOCO míchací špachtle na cementy, 20 ks

REF 2169 VOCO trifill nástroj, 10 ks

Aqua Ionofil Plus

Skleionomerní výplňový materiál mísitelný s vodou



Indikace

Výplně v mléčných zubech

Výplně klínovitých defektů v krčkové oblasti nebo eroze kořene, včetně kavit V. třídy

Výplně kavit způsobených kariézními lézemi

Výplně kavit III. třídy a malých kavit I. třídy

Rozsáhlé pečetění fisur

Dostavby a podložky

Přednosti

- Vylepšená skleionomerní technologie
- Dobrá estetika k dispozici ve třech odstínech
- Jednoduché míchání s vodou
- Bez rizika překyselení
- Vyhovující konzistence pro nanášení
- Dobrá okrajová adaptace



REF 1509	Prášek 3 × 15 g (A1, A2, A3), Final Varnish LC lahvička 3 ml, příslušenství
REF 1510	Prášek 15 g A1
REF 1513	Prášek 15 g A2
REF 1511	Prášek 15 g A3
REF 2110	Vzorník odstínů
REF 2168	VOCO míchací špachtle na cementy, 20 ks
REF 2169	VOCO trifill nástroj, 10 ks

Easy Glaze®

Světlem tuhnoucí lak s nanoplnivý pro povrchové pečetění



Indikace

Povrchové pečetění provizorních korunek a můstků, skleionomerních výplní a definitivních kompozitních výplní

Ochrana povrchu skleionomerů před účinky vlhkosti a dehydratací bezprostředně po jejich nanesení

Pečetění skleionomerních linerů / dostaveb před otiskováním

Pečetění a ochrana adhezivních rozhraní mezi výplní a strukturou zubu

Přednosti

- Lesklý a estetický povrch
- Snadné použití
- Chrání před diskoloracemi



REF 1016	Lahvička 5 ml, příslušenství
REF 2245	Easy Brush, aplikační štětečky, 50 ks
REF 2315	Míchací paletky, 20 ks

V kombinaci s VOCO Ionofil® Molar a IonoStar®

- Chrání před vlhkostí a vysušením právě zhotovenou výplň
- Přirozenému zubu podobná fluorescence
- Přirozený lesk




Nepřímé materiály

Spolehlivost. Praktičnost. Metodičnost.

Naše portfolio vám přirozeně nabízí i celou řadu materiálů pro nepřímé výplně: skloionomerní cementy vyztužené pryskyřicí, upevňovací systémy na bázi kompozit, vysoce estetický materiál pro výrobu provizorních korunek a můstků, kompozitní čepy vyztužené skleněným vláknem a materiál na opravy keramických náhrad.

Uživatelé CAD / CAM, kteří si přejí vytvářet korunky a můstky v zubní ordinaci také najdou ideální materiálovou základnu v kompozitních bločcích a diskách VOCO.

Pro 3D tisk doporučujeme naše perfektně uzpůsobené materiály pro tisk pomocných objektů.

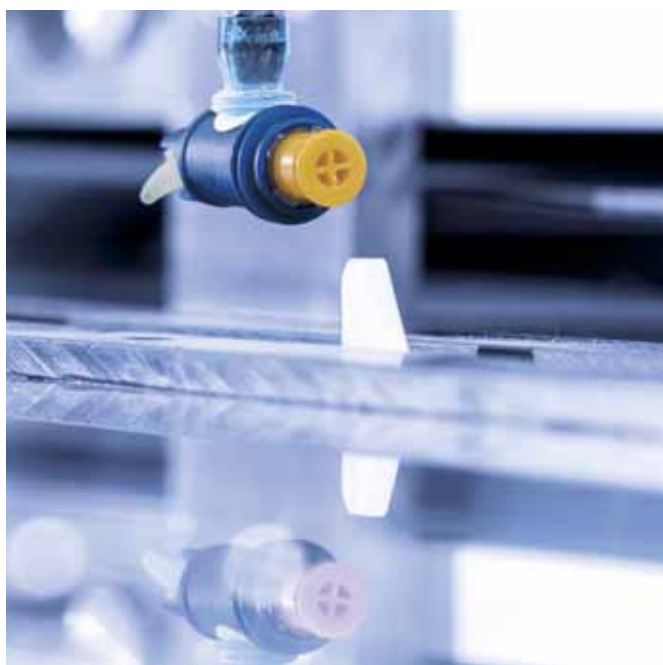

Grandio® blocs · Grandio® disc

Nanohybridní kompozitní CAD / CAM bloček · disk

NOVINKA


Indikace

Korunky, inleje, onleje, fazety
Korunky nesené implantátem

Přednosti


- Nejvyšší obsah plniv (86 % hmotnosti)
- Dokonale se podobá přirozeným zubům
- Vynikající fyzikální hodnoty pokud jde o pevnost v ohybu a abrazi
- Není nutné vypalování
- Kompatibilní se všemi běžně prodávanými frézovacími zařízeními
- Je jej možné optimálně leštit a opravovat
- Ideální pro frézování dokonce i v případech s tenkými okraji
- Založeno na nanohybridní technologii

Velikost disk

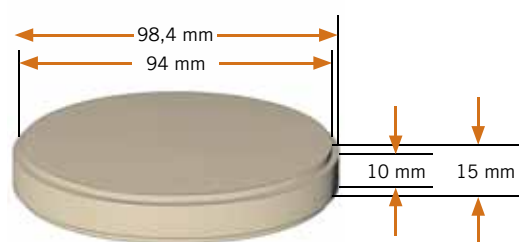


Velikosti bločků

Č. 14L

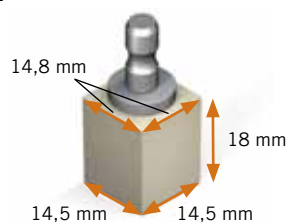

Č. 12

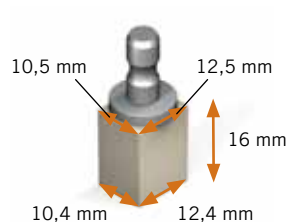

REF 6000 Sada bločků
2 × č. 12 (A2 LT, A3 HT),
3 × č. 14L (A3 LT, A3 HT,
A3.5 LT), Bifix QM QuickMix
stříkačka 10 g univerzální,
Futurabond U SingleDose 5 ks,
Ceramic Bond lahvička 5 ml,
Dimanto sada, příslušenství

Low translucent (LT)	5 × č. 12	5 × č. 14L
A1 LT	REF 6003	REF 6018
A2 LT	REF 6004	REF 6019
A3 LT	REF 6005	REF 6020
A3.5 LT	REF 6006	REF 6021
B1 LT	REF 6007	REF 6022
C2 LT	REF 6008	REF 6023
BL LT	REF 6009	REF 6024

High translucent (HT)	5 × č. 12	5 × č. 14L
A1 HT	REF 6012	REF 6027
A2 HT	REF 6013	REF 6028
A3 HT	REF 6014	REF 6029
A3.5 HT	REF 6015	REF 6030

Odstín	5 × č. 12	5 × č. 14L
Mixed*	REF 6033	REF 6034

*(1 × A1 LT, B1 LT, C2 LT, BL LT, A1 HT)

Grandio® disc

Low translucent (LT)	1 × 15 mm, ø 98,4 mm
A1 LT	REF 6050
A2 LT	REF 6051
A3 LT	REF 6052
A3.5 LT	REF 6053
High translucent (HT)	1 × 15 mm, ø 98,4 mm
A1 HT	REF 6057
A2 HT	REF 6058
A3 HT	REF 6059
A3.5 HT	REF 6060

V-Print ortho

Materiál pro 3D tisk

Indikace

Pro základní ortodontické prvky, dlahy a šablony

Přednosti

- Vysoce estetický díky průhledné barvě
- Vysoká barevná stálost a odolnost vůči lomu
- Biologicky kompatibilní
- Chuťově neutrální
- Zdravotnický prostředek třídy IIa



REF 6040 Lahvička 1000 g clear

NOVINKA

V-Print SG

Materiál pro 3D tisk

Indikace

Dentální chirurgické šablony

Přednosti

- Sterilizovatelné v autoklávu při 134 °C
- Optimální tokové vlastnosti
- Vysoká přesnost pro optimální dosednutí
- Dobrá stabilita
- Dobrá ohybová stálost
- Biologicky kompatibilní
- Neutrální příchutí
- Zdravotnický prostředek třídy IIa



REF 6043 Lahvička 1000 g clear

NOVINKA

V-Print model

Materiál pro 3D tisk

Indikace

Dentální pracovní a dokumentační modely

Přednosti

- Nedochází k sedimentaci
- Optimální vlastnosti pro broušení
- Dobrá stálost
- Dobrý hmatová kvalita
- Povrch bez škábanců
- Vysoká přesnost
- Dobrý kontrast zajištěný optimální opacitou
- Vhodný také pro hluboké dokreslování



REF 6042 Lahvička 1000 g beige

NOVINKA

Upevňovací materiály

Strana		typu	balení	inleje / onleje			korunky			můstky			Marylandské můstky			fazety	čepy							
				keramika ²	kompozitum	kov	keramika ²	kompozitum	kov	keramika ²	kompozitum	kov	keramika ²	kompozitum	kov	keramika ²	keramika ²	kov	uhlíková vlákna	skleněná vlákna	křemenná vlákna	attachmenty ⁴	ortodontické pásky	ocelové korunky
Upevňovací materiály																								
51	Bifix SE	kompozitum	QuickMix stříkačka	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•
51	Bifix QM	kompozitum	QuickMix stříkačka	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
54	Aqua Meron	GIC ¹	Ruční míchání	•		•	•		•	•		•			•								•	•
52	Meron Plus / Meron Plus AC	GIC vyztužený pryskyřicí ¹	Ruční míchání / kapsle	•		•	•	•	•	•		•			•			•	•	•	•		•	•
52	Meron Plus QM	GIC vyztužený pryskyřicí ¹	QuickMix stříkačka	•		•	•	•	•	•		•			•			•	•	•	•		•	•
53	Meron	GIC ¹	Kapsle	•		•	• ³		•	•		•			•			•					•	•
53	Meron	GIC ¹	Ruční míchání	•		•	•		•	•		•			•			•					•	•
55	Quick Up	kompozitum	QuickMix stříkačka																			•		
59	Rebilda DC	kompozitum	QuickMix / kartuše																		•			
60	Grandio Core Dual Cure	kompozitum	QuickMix stříkačka																		•			

¹ skloionomerí upevňovací cement

² keramiky křemičité / na bázi oxidu zirkoničitého / oxidu hlinitého

³ také na abutmentech implantátů

⁴ kuličkové, Locator®, teleskopické retenční prvky, i další kotevní prvky

Bifix® SE

Duálně tuhnoucí samo-adhezivní upevňovací systém na bázi kompozit

Indikace

Definitivní upevňování inlejí, onlejí, korunek a můstků z keramiky (ne Marylandských můstků), oxidu zirkoničitého, kompozit a / nebo kovu

Definitivní upevňování kovových, keramických, zirkonových (oxid zirkoničitý) a sklem vyztužených čepů

Přednosti

- Spolehlivě drží na zubu a náhradě
- Rychlé zpracování: bez leptání nebo bondování
- Neutrální zápach
- Snadná manipulace
- Dlouhodobá odolnost
- Snadné odstraňování přebytečného materiálu
- Minimální tloušťka vrstvy 10 µm pro přesné nasazení náhrady bez navýšení skusu
- Vhodný také pro keramiku na bázi oxidu zirkoničitého
- Endodontické míchací hroty v každém balení – pro co nejpřesnější nanášení i do kořenových kanálků



REF 1784	Sada QuickMix stříkaček 3 x 5 g (univerzální, transparentní, bílý-opákní), příslušenství
REF 1785	QuickMix stříkačka 5 g univerzální, příslušenství
REF 1786	QuickMix stříkačka 5 g transparentní, příslušenství
REF 1787	QuickMix stříkačka 5 g bílý-opákní, příslušenství
REF 2195	Míchací hroty typu 15 (intraorální hroty typu 1), 50 ks
REF 2194	Míchací hroty typu 14, 50 ks



Bifix® QM

Univerzální světlem a chemicky tuhnoucí upevňovací systém na bázi kompozit

Indikace


Adhezivní upevňování inlejí, onlejí, fazet, korunek, částečných korunek, můstků, kořenových čepů a adhezivních můstků (Marylandských můstků)

Přednosti

- Vhodný pro všechny materiály (keramiku i na bázi oxidu zirkoničitého, kovy, kompozitní inleje)
- Perfektní míchání bez bublinek
- Přímé nanášení
- Vynikající adheze k dentinu, sklovině a kovům
- Speciální Ceramic Bond v jednom kroku vytvoří optimální adhezi ke keramice
- Rentgen kontrastní
- K dostání ve třech odstínech
- K dispozici jako sada vše v jednom



REF 1217	Sada QuickMix stříkaček 10 g U (univerzální), Futurabond DC lahvička 4 ml tekutina 1 a 2, Ceramic Bond lahvička 5 ml, příslušenství
REF 1218	QuickMix stříkačka 10 g univerzální, příslušenství
REF 1219	QuickMix stříkačka 10 g transparentní, příslušenství
REF 1759	QuickMix stříkačka 10 g bílý-opákní, příslušenství
REF 2261	Dispenser – QuickMix
REF 2191	Míchací hroty typu 11, 50 ks
REF 2139	Intraorální hroty typu 1, 50 ks, k použití do kořenových kanálků
REF 2142	Intraorální hroty typu 4, 50 ks

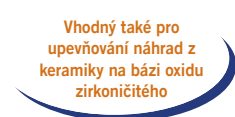

Meron Plus · Meron Plus AC

Pryskyřicí posílený skloionomerní upevňovací cement



Indikace

Upevňování

- metalo-keramických korunek, můstků na pahýly přirozených zubů a na pahýly zhotovené z amalgámu, kompozit nebo skloionomerních cementů
- kovových inlejí, onlejí, korunek a můstků
- kořenových čepů
- celokeramických korunek na pahýly z keramiky na bázi oxidu zirkoničitého nebo oxidu hlinitého
- ortodontických aparátů

Přednosti

- Vysoká úroveň adheze ve srovnání s konvenčními upevňovacími skloionomerními cementy
- Přesný okrajový uzávěr
- Tixotropní: velmi dobrá smáčivost bez nežádoucího stékání
- Malá tloušťka vrstvy
- Odolný vůči vlhkosti a kyselinám
- Snadné odstraňování přebytků materiálu díky dlouhé elastické fázi
- Samo-adhezivní: jisté a rychlé vytvoření vazby
- Vhodný také pro vysoce pevnou zirkonovou keramiku



Meron Plus

- REF 1731 Prášek 15 g
REF 1732 Tekutina 10 ml

Meron Plus AC

- REF 1736 Aplikační kapsle 50 ks
REF 1737 Aplikační kapsle 150 ks
REF 2331 Applicator – AC typu 1

Meron Plus QM

Pryskyřicí posílený skloionomerní upevňovací cement



Indikace

Upevňování

- metalokeramických inlejí, onlejí, korunek a můstků
- vysoce pevných (např. z keramiky na bázi oxidu zirkoničitého nebo lithium disilikátu) celokeramických inlejí, onlejí, korunek a můstků
- kovových, keramických a skleněným vláknem vyztužených čepů
- ortodontických pásků a pomůcek

Přednosti

- Vynikající přilnavost k zubní struktuře
- Přesný okrajový uzávěr
- Odolný vůči vlhkosti a kyselinám
- Samo-adhezivní: jisté a rychlé vytvoření vazby bez primeru nebo kondicionéru
- Přebytečný materiál je možné odstranit bez čekání díky možnosti krátké polymerace světlem
- Stříkačka QuickMix zajišťuje optimální nanášení a spolehlivý míchací poměr



- REF 1727 QuickMix stříkačka 8,5 g, příslušenství
REF 1728 QuickMix stříkačka 3 x 8,5 g, příslušenství
REF 2261 Dispenser – QuickMix
REF 2189 Míchací hroty typu 10, 50 ks

Meron (Aplikační kapsle)

Rentgen kontrastní skloionomerní upevňovací cement

Indikace

Upevňování

- kovových korunek, můstků, inlejí a onlejí
- vysoce pevných celokeramických korunek a můstků (např. z oxidu hlinitého, lithium disilikátu a zirkonu)
- kovových a vysoce pevných celokeramických korunek a můstků na implantologické abutmenty
- kovových kořenových čepů nebo nepřímých dostaveb s kovovým čepem
- prefabrikovaných ocelových korunek
- ortodontických pásků

V nové aplikační kapsli

- Rychlá a snadná aktivace bez aktivátoru
- Pomocí aplikátoru snadno promícháte, otevřete kanylu a můžete materiál ihned použít
- Kompatibilní se všemi konvenčními aplikátory

Přednosti

- V každé kapsli je k dispozici velké množství materiálu – vhodný také na velké náhrady
- Velmi dobrá smáčivost
- Stabilní
- Malá tloušťka vrstvy
- Vysoká míra translucence pro estetické výsledky
- Snadné odstraňování přebytků materiálu
- Průběžné uvolňování fluoridu
- Bez příznaků citlivosti po ošetření



REF 1242	Aplikační kapsle 50 ks
REF 1243	Aplikační kapsle 150 ks
REF 2331	Applicator – AC typu 1

Meron

Skloionomerní upevňovací cement

Indikace

Upevňování korunek, můstků, inlejí, onlejí, čepů a ortodontických pásků

Přednosti

- Minimální rozpustnost v ústech
- Nízká koncentrace kyselin
- Biokompatibilní
- Snadné použití



REF 1086	Sada prášku / tekutiny (35 g / 15 ml)
REF 1090	Sada mini prášku / tekutiny (15 g / 7 ml)

Aqua Meron

S vodou mísitelný skloionomerní upevňovací cement



Indikace

Upevňování korunek, můstků, inlejí, onlejí, čepů a ortodontických pásků

Přednosti

- Dobrá zatékavost
- Minimální rozpustnost v ústech
- Nízká koncentrace kyselin
- Biokompatibilní



REF 1172 Prášek 35 g a odměrka na vodu

Ceramic Bond

Prostředek k vytvoření vazby mezi keramikou (včetně keramiky na bázi oxidu zirkoničitého) a kompozitem

Vhodný také pro
upevňování náhrad z
keramiky na bázi oxidu
zirkoničitého



Indikace

Jednosložkový silanizační prostředek pro vytvoření odolné adhezivní vazby mezi keramikou, i na bázi oxidu zirkoničitého, a kompozity, a také k úpravě skleněným vláknem vyztužených kompozitních čepů

Přednosti

- Silanizuje povrch celokeramických náhrad a vytváří ideální podmínky pro vznik pevné vazby mezi keramikou, i na bázi oxidu zirkoničitého, a kompozitem



REF 1106 Lahvička 5 ml

Quick Up®

Samo-tuhnoucí upevňovací materiál na attachmenty a sekundární prvky snímatelných náhrad



Indikace

Kompozitum v barvě gingivy k upevňování attachmentů, jako jsou kuličkové, Locator® a teleskopické retenční prvky, do snímatelných náhrad s plastovou bazí

Opětovné upevňování sekundárních prvků do protéz s plastovou bazí, např. spojovacích mřížek

Přednosti

- Poměrně snadné použití přímo v zubní ordinaci
- Vysoce pevné
- Kompletní sada pro okamžité použití, včetně kontrolního materiálu a materiálu k vykrytí primárních struktur, které je třeba chránit, např. implantátů
- Ideální kombinace samo-tuhnoucího upevňovacího materiálu a světlem tuhnoucího korekčního materiálu

Locator® není registrovanou obchodní značkou firmy VOCO GmbH.

Použití



Implantát s nasazenými attachmenty



Baze snímatelné náhrady s přebytky pro připravené attachmenty



Kontrola přesnosti dosednutí pomocí Fit Test C & B



Kontrola přesnosti attachmentů pomocí Fit Test C & B



Vykrytí, zakrytí primárních prvků / gingivy materiálem Fit Test C & B



Nanášení Quick Up ze stříkačky QuickMix



Nanášení Quick Up LC za účelem oprav nedokonalostí a povrchových defektů



Attachment upevněný ve snímatelné náhradě



REF 1625	Sada QuickMix stříkačka 7,5 g, Quick Up LC stříkačka 2 g, adhezivum lahvička 4 ml, Fit Test C & B QuickMix stříkačka 5 ml, příslušenství
REF 1626	QuickMix stříkačka 7,5 g, příslušenství
REF 1627	Quick Up LC stříkačka 2 g, příslušenství
REF 1628	Adhezivum lahvička 4 ml, příslušenství
REF 2261	Dispenser – QuickMix
REF 2189	Míchací hroty typu 10, 50 ks
REF 2144	Aplikační kanyly typu 44, 100 ks
REF 2247	Single Tim, aplikační štětečky, 100 ks
REF 2315	Míchací paletky, 20 ks

BrackFix®

Světlem tuhnoucí systém na upevňování ortodontických zámků

NOVINKA

Fluorescentní

Indikace

Přímé upevňování ortodontických kovových a keramických zámků

Přednosti

- Optimální konzistence adheziva: stabilní umístění zámků na povrchu zubu
- Zajišťuje pevné držení kovových a keramických zámků
- Světlem tuhnoucí: dlouhá doba zpracování
- Možné vystavení zátěži ihned po polymeraci
- Fluorescentní: umožňuje rychlé a šetrné odstranění zbytků adheziva po odstranění zámků

20 sec
light-curing



REF 1205	Sada adhezivum stříkačka 2 x 4 g, Primer lahvička 6 ml, příslušenství
REF 1206	Sada SE adhezivum stříkačka 2 x 4 g, Primer SE <i>SingleDose</i> 40 ks, příslušenství
REF 1207	Adhezivum stříkačka 2 x 4 g
REF 1208	Primer lahvička 6 ml
REF 1209	Primer SE <i>SingleDose</i> 50 ks, příslušenství
REF 2247	Single Tim, aplikační štětečky, 100 ks
REF 2315	Míchací paletky, 20 ks

Klinický případ



Leptání povrchu skloviny



Nanášení BrackFix Primer




Jednoduché nanášení BrackFix Adhesive na zámek



Jednoduché a pevné umístění na zubu



Zub 11 (horní pravý střední řezák) před polymerací a odstraněním přebytků adheziva

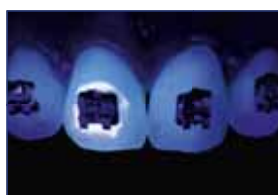

Pod UVA světlem (za účelem ukázky)



Ozáření UVA světlem po odstranění zámků



Kontrolované odstranění zbytků BrackFix



Poslední kontrola pod UVA světlem: Na zubech nezůstaly žádné zbytky adheziva

Zdroj: Dr. Felipe Moura / Brazílie

Rebilda® Post GT

Kompozitní čep vyztužený svazkem skleněných vláken



Indikace





Korunkové dostavby s kořenovými čepy pro endodonticky ošetřené zuby

Přednosti

- Optimální výplň mechanicky preparovaných kořenových kanálků
- Jednoduché nanášení
- Šetří čas a redukuje rozsah odstraněné zubní hmoty, protože není nutná preparace prostoru pro čep, díky čemuž dojde k menšímu oslabení zubů než u konvenčních čepů
- Optimální uzpůsobení všem morfologiím a tvarům kanálku
- Všechny materiály v sadě jsou vzájemně perfektně kompatibilní
- **Futurabond® U**
 - bezpečně samo-tuhnoucí
 - silná adheze bez dalšího leptání
- **Rebilda® DC**
 - vhodná k upevnění čepu
 - opracování jako dentin, velmi dobré fyzikální vlastnosti
 - nízká teplota při tuhnutí

REF 1972	Sada 5 čepů každého průměru (~ Ø 0,8 mm, ~ Ø 1,0 mm, ~ Ø 1,2 mm, ~ Ø 1,4 mm), Ceramic Bond lahvička 5 ml, Futurabond U <i>SingleDose</i> 20 ks, Rebilda DC QuickMix stříkačka 10 g dentinu, příslušenství
REF 1973	Čep 4 (~ Ø 0,8 mm), 5 ks
REF 1974	Čep 6 (~ Ø 1,0 mm), 5 ks
REF 1975	Čep 9 (~ Ø 1,2 mm), 5 ks
REF 1976	Čep 12 (~ Ø 1,4 mm), 5 ks

Použití

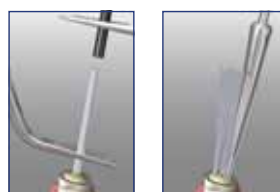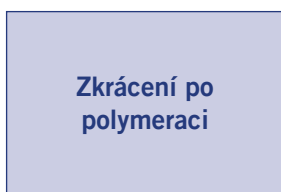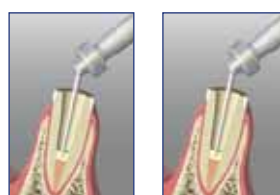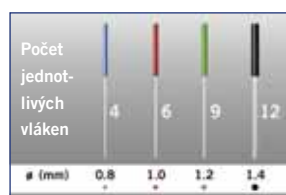

Zkrácení po
polymeraci

Rebilda® Post · Rebilda® Post System

Skleněným vláknem vyztužené kompozitní čepy · Adhezivní dostavbový systém




Indikace

Endodontické čepové návstavy k vyztužení a upevnění korunky v případech nedostatku zubní hmoty


Přednosti

- Elasticita podobná dentinu, vysoká pevnost v ohybu
- Vysoká rentgen kontrastnost (350 %AI)
- Anatomický tvar
- Adhezivní upevnění
- Vyjímatelé
- Všechny materiály v sadě jsou vzájemně kompatibilní
- Vložení čepu a vytvoření korunky v jednom kroku
- **Futurabond® U**
 - bezpečně samo-tuhnoucí
 - silná adheze bez dalšího leptání
- **Rebilda® DC**
 - vhodná k upevnění čepu
 - opracování jako dentin, velmi dobré fyzikální vlastnosti
 - nízká teplota při tuhnutí


REF 1770	Sada 5 čepů každého průměru (ø 1,2 mm, ø 1,5 mm, ø 2,0 mm), 1 vrták každého průměru (ø 1,2 mm, ø 1,5 mm, ø 2,0 mm)
REF 1782	Sada II 5 čepů každého průměru (ø 1,0 mm, ø 1,2 mm, ø 1,5 mm, ø 2,0 mm), 1 vrták každého průměru (ø 1,0 mm, ø 1,2 mm, ø 1,5 mm, ø 2,0 mm), 2 rozšiřovače (ø 0,7 mm), Ceramic Bond lahvička 5 ml, Futurabond U SingleDose 20 ks, Rebilda DC QuickMix stříkačka 10 g dentinu, příslušenství
REF 1775	Čep 10 (ø 1,0 mm), 5 ks
REF 1772	Čep 12 (ø 1,2 mm), 5 ks
REF 1773	Čep 15 (ø 1,5 mm), 5 ks
REF 1774	Čep 20 (ø 2,0 mm), 5 ks
REF 1780	Vrták 10 (ø 1,0 mm), 1 ks
REF 1777	Vrták 12 (ø 1,2 mm), 1 ks
REF 1778	Vrták 15 (ø 1,5 mm), 1 ks
REF 1779	Vrták 20 (ø 2,0 mm), 1 ks
REF 1769	Rozšiřovač (ø 0,7 mm), 3 ks

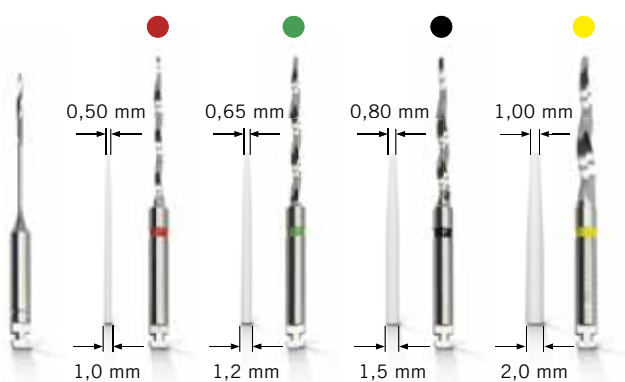

Vyobrazení čepů nejsou odpovídající velikosti.

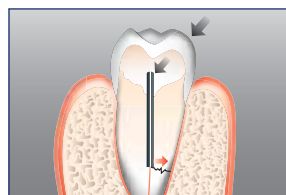

Kovový čep – zlomenina v kořeni

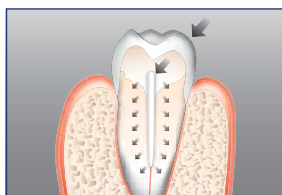

Čep Rebilda Post – E-modul podobný dentinu

Rebilda® DC

Duálně tuhnoucí zatékový upevňovací systém korunkových dostaveb a čepů



Indikace

Adhezivní dostavby vitálních a nevitálních zubů

Upevňování skleněným vláknem vyztužených pryskyřičných čepů

Přednosti

- Rychlé zpracování díky vytvrzování světlem
- Dodatečná chemická polymerace pro spolehlivé zpracování
- K dostání v 10 g QuickMix stříkačkách nebo 50 g kartuších
- Tři barvy: *modrá* pro snadné rozpoznání okrajů preparace, *dentinová* z estetických důvodů a *bílá* jako estetický kontrast oproti dentinu
- I při nanášení jedné větší vrstvy uvolňuje minimum tepla
- Zatékový – bez vzniku netěsností
- Spolehlivá adheze díky bondovacímu systému
- Optimalizované malé míchací hroty šetří materiál
- Snadný přístup do distálních oblastí díky intraorálním hrotům



REF 1395	Sada kartuše 50 g dentinu, Futurabond DC lahvička tekutiny 4 ml 1 a 2, dávkovač typu 3, příslušenství
REF 1396	Kartuše 50 g dentinu, příslušenství
REF 1397	Kartuše 50 g modrá, příslušenství
REF 1398	Kartuše 50 g bílá, příslušenství
REF 1402	Sada QuickMix stříkačka 10 g dentinu, Futurabond DC lahvička tekutiny 4 ml 1 a 2, příslušenství
REF 1403	QuickMix stříkačka 10 g dentinu, příslušenství
REF 1404	QuickMix stříkačka 10 g modrá, příslušenství
REF 1405	QuickMix stříkačka 10 g bílá, příslušenství
REF 2259	Dávkovač – typu 3
REF 2261	Dispenser – QuickMix
REF 2191	Míchací hroty typu 11 ve QuickMix stříkačka, 50 ks
REF 2139	Intraorální hroty typu 1 ve QuickMix stříkačka, 50 ks, k použití do kořenových kanálků
REF 2142	Intraorální hroty typu 4 ve QuickMix stříkačka, 50 ks
REF 2192	Míchací hroty typu 12 v kartuších, 50 ks
REF 2141	Intraorální hroty typu 3 v kartuších, 50 ks
REF 2199	Míchací hroty typu 19 v kartuších, ohybatelné, 30 ks

Rebilda® LC

Světlem tuhnoucí adhezivní dostavbový systém

Indikace

Dostavba zubních pahýlů u vitálních i nevitálních zubů a vykrývání podsekřivin

Přednosti

- Šetří čas – nemíchá se
- Světlem tuhnoucí



REF 1505	Stříkačky 2 x 5 g modrá
REF 1506	Stříkačky 2 x 5 g dentinu

Grandio® Core Dual Cure


Zatékavý, duálně tuhnoucí nanohybridní dostavbový materiál

Indikace

Dostavby vitálních i nevitálních zubů
Upevňování kořenových čepů

Přednosti

- Vynikající fyzikální vlastnosti pro odolné pahýly
- Obsah plniva 77 % hmotnosti
- Nanohybridní technologie
- Ve třech barvách: dentinová, modrá a bílá
- Stříkačka QuickMix pro zajištění optimálního nanášení a konzistentního míchacího poměru
- Zatékavý
- S intraorálními hroty typu 4 pro pohodlnou aplikaci

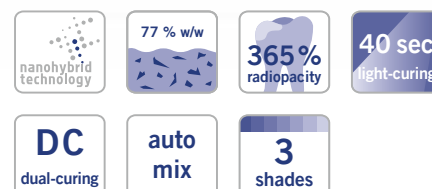

REF 1910	QuickMix stříkačka 10 g dentinu, příslušenství
REF 1911	QuickMix stříkačka 10 g modrá, příslušenství
REF 1912	QuickMix stříkačka 10 g bílá, příslušenství
REF 2261	Dispenser – QuickMix
REF 2191	Míchací hroty typu 11 ve QuickMix stříkačka, 50 ks
REF 2142	Intraorální hroty typu 4 ve QuickMix stříkačka, 50 ks

Rebilda® Form

Formy na adhezivní kořenové dostavby

Indikace

Formy na adhezivní kořenové dostavby v případech s vážně narušenými zuby s nebo bez použití endodontického čepu

Přednosti

- Jednoduché použití se všemi kompozitními dostavbovými materiály
- Tři situací dané velikosti
- Translucentní, umožňují polymeraci světlem
- Speciální tvar umožňuje rychlé uzpůsobení zubu
- Neváže se se standardními kompozitními materiály



REF 1407	20 ks small
REF 1408	20 ks medium
REF 1409	20 ks large

Structur 3

Samo-tuhnoucí kompozitní materiál na zhotovování provizorních korunek a můstků

**ZÁŘIVÝ LESK
BEZ LEŠTĚNÍ!**



Indikace

Výroba provizorních korunek, můstků, inlejí, onlejí, částečných korunek, fazet a provizorních čepů

Výroba dlouhodobějších provizorních náhrad

Podkládání prefabrikovaných provizorních korunek vyrobených z kompozitních, polykarbonátových materiálů nebo z kovu

Přednosti

- **Zpracování**
 - rychlé, jednoduché a spolehlivé díky systému kartuší 1:1
 - krátká doba tuhnutí
 - elastická fáze umožňuje snadné odstranění z preparovaného zubu
 - lesk bez leštění – vyžaduje pouze odstranění inhibiční vrstvy
- **Estetika**
 - přirozený lesk a fluorescence
 - k dostání v osmi odstínech
- **Odolnost**
 - vysoká pevnost v tlaku
 - výborná odolnost vůči zlomení

Klinický případ



Počáteční stav



Preparované pahýly



Dokončený provizorní můstek



Zajímavý výsledek

Zdroj: Dr. Walter Denner, Fulda / Německo

REF 2500	Sada kartuše 50 ml A2, dávkovač typu 2, příslušenství
REF 2501	Sada kartuše 50 ml A3, dávkovač typu 2, příslušenství
REF 2158	Dávkovač – typu 2
REF 2261	Dispenser – QuickMix
REF 2185	Míchací hroty typu 6 v kartuších, 50 ks
REF 2189	Míchací hroty typu 10 ve QuickMix stříkačka, 50 ks

Odstín	Kartuše 50 ml, míchací hroty typu 6	
		Kartuše 5 × 50 ml, míchací hroty typu 6
A1	REF 2503	–
A2	REF 2504	REF 2512
A3	REF 2505	REF 2513
A3.5	REF 2506	–
B1	REF 2507	–
B3	REF 2508	–
C2	REF 2509	–
BL	REF 2510	–
Odstín	QuickMix stříkačka 5 ml, míchací hroty typu 10	
	A1	REF 2515
	A2	REF 2516
	A3	REF 2517
B1	REF 2518	

Structur 2

Samo-tuhnoucí kompozitní materiál na zhotovování provizorních korunek a můstků



Indikace

Zhotovování estetických provizorních můstků, korunek, inlejí a onlejí

Přednosti

- Jednoduchý a rychlý pracovní postup
- Vytvrzení v ústech za méně než 1 minutu
- Jednoduché tvarování a leštitelnost
- Přirozená estetika díky 8 odstínům
- Možné delší používání provizorní náhrady
- Vysoká stálost tvaru i odstínu
- Velice úsporný díky minimálním ztrátám materiálu
- Přirozená fluorescence



REF 1478	Sada kartuše 75 g A3, dávkovač typu 2, příslušenství
REF 1499	Sada kartuše 75 g A2, dávkovač typu 2, příslušenství
REF 2158	Dávkovač – typu 2
REF 2261	Dispenser – QuickMix
REF 2185	Míchací hroty typu 6 v kartuších, 50 ks
REF 2189	Míchací hroty typu 10 ve QuickMix stříkačka, 50 ks

Odstín	Kartuše 75 g, míchací hroty typu 6	Kartuše 5 × 75 g, míchací hroty typu 6
A1	REF 1479	–
A2	REF 1480	REF 1492
A3	REF 1481	REF 1491
A3.5	REF 1490	–
B1	REF 1482	–
B3	REF 1483	–
C2	REF 1486	–
BL	REF 1485	–

Odstín	QuickMix stříkačka 8 g, míchací hroty typu 10
A1	REF 1309
A2	REF 1310
A3	REF 1311
B1	REF 1312

Provizorní sada

Materiál pro výrobu provizorních dentálních protetických prvků, výplňový materiál na provizorní výplně a provizorní upevňovací cement

Indikace

Více informací k indikacím naleznete na stránkách produktů Structur 3, Provicol QM a Clip Flow

Přednosti

- Provizorní dentální protetické prvky s leskem, které nevyžadují leštění
- Světlem tuhnuce provizorní výplňový materiál do kavit pro inleje a onleje, odolný a těsný vůči slinám
- Provizorní upevňovací materiál bez eugenolu s hydroxidem vápenatým a bakteriostatickým účinkem



REF 2502	Structur 3 kartuše 50 ml A3, Provicol QM QuickMix stříkačka 5 ml, Clip Flow stříkačka 2 × 1,8 g
----------	---

NOVINKA

Structur Premium

Vysoce estetický kompozitní materiál na zhotovování provizorních korunek a můstků



Indikace

Výroba vysoce estetických korunek, můstků, inlejí a onlejí

Přednosti

- Estetika podobná keramice
- Vysoká stálost tvaru a odstínu
- Přirozená fluorescence
- Brilantní lesk
- Tvrdost podobná přirozené sklovině
- Extremně vysoká odolnost vůči zlomení
- Perfektní zpracovatelnost
- Pohodlný pracovní postup díky perfektní broušitelnosti a leštitelnosti
- Možné delší používání provizorní náhrady
- Velice úsporný díky minimálním ztrátám materiálu



REF 1710	Sada kartuše 75 g A3, dávkovač typu 2, příslušenství	
REF 2158	Dávkovač – typu 2	
REF 2185	Míchací hroty typu 6 v kartuších, 50 ks	
Odstín	Kartuše 75 g, míchací hroty typu 6	Kartuše 5 x 75 g, míchací hroty typu 6
A1	REF 1712	–
A2	REF 1713	–
A3	REF 1714	REF 1719
A3.5	REF 1717	–
B1	REF 1718	–
B3	REF 1715	–
BL	REF 1716	–

Bifix® Temp

Duálně tuhnoucí provizorní upevňovací materiál na bázi kompozit

Indikace

Nedefinitivní upevňování provizorních náhrad



Přednosti

- Translucentní odstín podobný zubu pro estetické výplně
- Duálně tuhnoucí – flexibilní doba vytvrzování při použití polymerační lampy
- Snadné odstraňování přebytečného materiálu – po krátkém vytvrzení světlem je možné jej odstraňovat v jednom kuse



REF 1055	QuickMix stříkačka 5 ml univerzální, příslušenství
REF 2261	Dispenser – QuickMix
REF 2188	Míchací hroty typu 9, 50 ks

Provicol® QM · Provicol® QM Plus

Provizorní upevňovací cement bez eugenolu s hydroxidem vápenatým



Indikace

Provizorní upevňování inlejí, onlejí, korunek, částečných korunek, můstků, attachmentů a čepů

Provizorní výplně malých jednoploškových kavit

Přednosti

- Rychlé použití bez míchání
- Bezchybné míchání bez bublin
- Přímá aplikace
- Další přednosti – viz Provicol C

Přednosti Provicol® QM Plus

- Větší pevnost pro větší retenci a jistou adhezi
- Vysoká úroveň rentgen kontrastnosti

SC
self-curing

auto
mix

temporary

contains
Ca(OH)₂

Provicol® QM

REF 1074 QuickMix stříkaček 5 ml, příslušenství

Provicol® QM Plus

REF 1098 QuickMix stříkačka 5 ml, příslušenství

REF 1099 Sada QuickMix stříkačky 3 × 5 ml (2 × Provicol QM, 1 × Provicol QM Plus), příslušenství

REF 2261 Dispenser – QuickMix

REF 2189 Míchací hroty typu 10, 50 ks

Provicol® C

Osvědčený Provicol v kartuších



Indikace

Viz Provicol QM

Přednosti

- Poloelastický pro spolehlivou adhezi provizorní náhrady
- Hydroxid vápenatý
 - podporuje tvorbu terciárního dentinu
 - účinkuje bakteriostaticky
- Nízký potenciál alergií díky bázi bez obsahu eugenolu
- Ideální před adhezivním upevňováním s kompozitními cementy, protože nenarušuje polymeraci pryskyřičných výplňových či upevňovacích materiálů

SC
self-curing

auto
mix

temporary

contains
Ca(OH)₂

REF 1076 Kartuše 2 × 65 g, příslušenství

REF 2158 Dávkoč – typu 2

REF 2185 Míchací hroty typu 6, 50 ks

Provicol®

Osvědčený Provicol ve verzi pro ruční míchání



Indikace

Viz Provicol QM

Přednosti

Viz Provicol C

SC
self-curing

temporary

contains
Ca(OH)₂

REF 1075 Tuby 2 × 25 g (báze / katalyzátoru)

REF 1078 Tuby 10 × 25 g (báze / katalyzátoru)

Clip Flow

Zatékavý, světlem tuhnoucí výplňový materiál na provizorní výplně

Indikace

Provizorní ošetření kavity v podobě inleje a onleje

Pečetění otvorů pro šroubky k implantátům

Podkládací materiál pro provizorní korunky a můstky

Vykrývací materiál pro retenční zóny v zubním oblouku, např. před otiskováním

Zakrývání gingiválních okrajů

Fixace pryskyřičné matrix během zhotovování výplně

Provizorní výplně kavit a pečetění ústí kořenových kanálků

Přednosti

- Snadno se nanáší – snadno se odstraňuje v jednom kuse
- Nedochozí k poškození hranic preparace
- Odolný a těsný vůči slinám
- Nelepivý
- Časově úsporný díky vytvrzení světlem
- Elastický
- Zatékavý



NDT
non dripping
technology

temporary

10-40
sec
light-curing

Odolný vůči
slinám

REF 1282 Stříkačky 2 × 1,8 g
REF 2148 Aplikační kanyly typu 46, 100 ks

Clip

Světlem tuhnoucí výplňový materiál na provizorní výplně

Indikace

Provizorní výplně

Teplotní ochrana kavit, zejm. při inleje / onleje technice

Přednosti

- Snadno se nanáší – snadno se odstraňuje v jednom kuse
- Nedochozí k poškození hranic preparace
- Šetří čas i peníze
- Odolný a těsný vůči slinám
- Obzvláště užitečný pro inleje / onleje techniku



temporary

20-40
sec
light-curing

Odolný vůči
slinám

REF 1284 Stříkačky 2 × 4 g
REF 1285 Stříkačky 3 × 4 g
REF 1287 Caps 25 × 0,25 g
REF 9301 Dispenser – Caps

Clip F

Světlem tuhnoucí výplňový materiál s fluoridem na provizorní výplně

Indikace

Viz Clip

Přednosti

Viz Clip



temporary

contains
fluoride

20-40
sec
light-curing

Odolný vůči
slinám

REF 1289 Stříkačky 2 × 4 g
REF 1283 Stříkačky 3 × 4 g

Ufi Gel® hard C · Ufi Gel® hard

Tvrdý materiál k přímému podkládání protéz



Indikace

Pevné, dlouhodobé celkové nebo částečné podkládání za účelem obnovení funkcí částečných nebo celkových snímatelných náhrad

Odlehčení okrajů snímatelných náhrad

Přednosti

- Celkové, tvrdé podkládání v zubní ordinaci během jediné návštěvy
- Neobsahuje metylmetakryláty
- Neutrální příchutě a vůně
- Nezáhřívá se v ústech
- Barevně stálý
- Tak jednoduchý jako otiskování
- Estetický, pro pacienta příjemnější a pohodlnější
- Hladký povrch
- Kdykoli je možné přidat další vrstvy

SC
self-curing

auto
mix

Ufi Gel® hard C

- | | |
|----------|--|
| REF 2215 | Sada kartuše 80 g, adheziva lahvička 10 ml, příslušenství |
| REF 2218 | Sada + dávkovač kartuše 80 g, adheziva lahvička 10 ml, příslušenství |
| REF 2216 | Kartuše 80 g, příslušenství |
| REF 2217 | Adheziva lahvička 10 ml |
| REF 2158 | Dávkovač – typu 2 |
| REF 2187 | Míchací hroty typu 8, 50 ks |

Ufi Gel® hard

- | | |
|----------|--|
| REF 2210 | Sada prášku 60 g, tekutiny lahvička 40 ml, kondicioner lahvička 20 ml, příslušenství |
| REF 2211 | Prášek 60 g |
| REF 2212 | Tekutina lahvička 40 ml |
| REF 2213 | Kondicioner lahvička 20 ml |

Klinický případ



ODBROUŠENÍ
PŘEBYTKŮ



Ufi Gel® SC · Ufi Gel® P

Trvale měkký, za studena tuhnoucí podkládací materiál na bázi silikonu



Indikace

Trvale měkké podkládání celkových a částečných snímatelných náhrad

- k odstranění tlakových zón
- k potlačení palatinální vibrační linie
- v případech ochablých hřebenů a / nebo nedostatečné adheze
- ke zmírnění tlaku ostrých hran na alveolární výběžky
- k podpoře hojení v implantologii

Přednosti

- Silikon k podkládání špičkové kvality
- Celý postup podkládání během jedné návštěvy ordinace
- Zůstává trvale měkký
- Speciální adhezivum pro extrémně pevnou vazbu mezi silikonem a protézou
- Biokompatibilní (bez obsahu metakrylátu)
- Neutrální příchutí a vůně
- Stálý, estetické barvy díky chameleon efektu
- V laboratoři: jednodušší pracovní postup než u jiných za studena tuhoucích materiálů
- Pro všechny protézy z PMMA pryskyřic
- Snadná a rychlá aplikace při přímém i nepřímém podkládání
- Výborná adaptace do nejmenších detailů, díky níž bude protéza přesně „sedět“
- Odolný vůči běžným čistícím prostředkům na protézy



SC
self-curing

auto
mix

Ufi Gel® SC

- REF 2041 Sada kartuše 50 ml, adhezivum lahvička 10 ml, glazura báze 10 ml, glazura katalyzátor 10 ml, příslušenství
- REF 2040 Kartuše 50 ml, příslušenství
- REF 2029 Adhezivum lahvička 10 ml
- REF 2047 Glazura lahvička 2 × 10 ml (báze / katalyzátor)
- REF 2049 Leštící disky, 10 ks
- REF 2158 Dávkovač – typu 2
- REF 2187 Míchací hroty typu 8, 50 ks

Ufi Gel® P

- REF 2070 Sada tuba báze 50 ml, katalyzátor 50 ml, glazura báze 10 ml, glazura katalyzátor 10 ml, adhezivum lahvička 10 ml, příslušenství
- REF 2071 Tuba 2 × 50 ml (báze / katalyzátor)
- REF 2076 Adhezivum lahvička 10 ml
- REF 2077 Glazura lahvička 2 × 10 ml (báze / katalyzátor)
- REF 2309 Jednorázové štětečky do držáku, 100 ks
- REF 2315 Míchací paletky, 20 ks
- REF 2338 Držák na jednorázové dentální štětečky a Micro Tim, 5 ks

Klinický případ



NASAZENÍ
SNÍMATELNÉ
NÁHRADY A POHYBY
DOLNÍ ČELISTI



CAD / CAM materiál

Upevňovací materiály

Dostavby korunek

Provizoria

Podkládání protéz

Otisky

Opravy

V-Posil Putty Fast · Heavy Soft Fast · Mono Fast

Přesný otiskovací materiál, VPS

NOVINKA



Indikace

V-Posil Putty Fast se používá jako předběžný materiál při

- Dvoufázové otiskovací technice putty-wash
- Jednofázové otiskovací technice putty-wash
- Dvoufázové otiskovací technice putty-wash za použití fólie (pružný držič prostoru pro materiál typu putty)
- Jednofázové otiskovací technice za použití tmelu typu putty k vytvoření funkčních okrajů otisků

V-Posil Heavy Soft Fast se používá jako materiál typu heavy-body při

- Jednofázové otiskovací technice (technika dvojího míchání) za použití dvou viskozit
- Dvoufázové otiskovací technice za použití dvou viskozit
- Zhotovování funkčních otisků

V-Posil Mono Fast je určen k použití jako středně hustý (medium body) materiál do otiskovacích lžic nebo otiskovací materiál pro injektážní techniku při

- Otiskování kombinovaných fixních / snímatelných náhrad a implantátů (tj. s přenosovými otiskovacími krytkami a komponentami můstků)
- Zhotovování funkčních otisků
- Výrobě korunek a můstků nebo inlejí
- Výrobě celkových nebo částečných snímatelných náhrad
- Podkládání otisků
- Otiskování kořenových čepů při nepřímé výrobě čepů a kořenových nástaveb
- Technice použití několika otiskovacích lžic
- Při použití techniky dvojího míchání, sendvičové techniky a korekční techniky s použitím distanční fólie

Přednosti

- Vysoce hydrofilní A-silikon pro maximální přesnost
- Vysoká rozměrová přesnost
- Dlouhá doba zpracování kombinovaná s krátkou intraorální dobou tuhnutí
- Vysoká míra zotavení po deformaci
- Dobrá hydrofilnost, dokonce i po ztuhnutí, pomáhá při odlévání, a tedy zhotovování dokonalé náhrady

V-Posil Putty Fast

- REF 2561 Sklenice 2 × 450 ml, příslušenství
REF 2562 Sklenice 8 × 450 ml, příslušenství

V-Posil Heavy Soft Fast

- REF 2565 Kartuše 380 ml, příslušenství
REF 2566 Kartuše 2 × 380 ml
REF 2567 Kartuše 2 × 50 ml, příslušenství
REF 2568 Kartuše 10 × 50 ml
REF 2196 Míchací hroty typu 16, 50 ks
REF 2203 Míchací hroty typu 30, 50 ks

V-Posil Mono Fast

- REF 2569 Kartuše 380 ml, příslušenství
REF 2570 Kartuše 2 × 380 ml
REF 2571 Kartuše 2 × 50 ml, příslušenství
REF 2572 Kartuše 10 × 50 ml
REF 2196 Míchací hroty typu 16, 50 ks
REF 2203 Míchací hroty typu 30, 50 ks
REF 2133 Intraorální hroty typu 6, 50 ks

V-Posil Light Fast · V-Posil X-Light Fast

Přesný otiskovací materiál, VPS

Indikace

V-Posil Light Fast a V-Posil X-Light Fast se používají jako otiskovací materiály pro injektáž při

- Dvoufázové otiskovací technice putty-wash
- Jednofázové otiskovací technice putty-wash
- Dvoufázové otiskovací technice putty-wash za použití fólie (pružný držič prostoru pro materiál typu putty)
- Jednofázové otiskovací technice (technika dvojího míchání) za použití dvou viskozit
- Podkládání otisků
- Výrobě celkových nebo částečných snímatelných náhrad

Přednosti

- Vysoce hydrofilní A-silikon pro maximální přesnost
- Dlouhá doba zpracování kombinovaná s krátkou intraorální dobou tuhnutí
- Výjimečná tuhost a zotavení po deformaci zajišťují jistotu při a po vyjímání otisku
- Dobrá hydrofilnost, dokonce i po ztuhnutí, pomáhá při odlévání, a tedy zhotovování dokonalé náhrady

V-Posil Adhesive

Adhezivum na lžice pro VPS otiskovací hmoty

Indikace

Adhezivum pro VOCO adičně tuhnoucí otiskovací materiály

Drží na kovech a akrylové pryskyřici

Přednosti

- Dobrá adhezivní vazba otiskovací lžice a otiskovacího materiálu
- Pozoruhodný barevný kontrast pro dobrou vizuální kontrolu



V-Posil Light Fast

REF 2573 Kartuše 2 × 50 ml, příslušenství
REF 2574 Kartuše 10 × 50 ml

V-Posil X-Light Fast

REF 2575 Kartuše 2 × 50 ml, příslušenství
REF 2576 Kartuše 10 × 50 ml
REF 2186 Míchací hroty typu 7, 50 ks
REF 2141 Intraorální hroty typu 3, 50 ks



REF 2578 Lahvička 10 ml

Registrado® X-tra

Adičně tuhnoucí silikon na skusové registráty, extra tvrdý, rychle tuhnoucí

Indikace

Okluzální skusové registráty

Upevňování registrátů obličejového oblouku

Materiál k určení polohy intraorálních podpurných registračních čepů



Přednosti

- Optimalizovaná konečná tvrdost
- Aplikace bez časové tísně
- Vysoce tixotropní
- Dobře brousitelný
- Velmi přesné otisky
- S úspornými mísícími hroty



SC
self-curing

auto
mix

Shore-A
90

REF 2035	Kartuše 2 × 50 ml, příslušenství
REF 2036	Kartuše 8 × 50 ml, příslušenství
REF 2158	Dávkovač – typu 2
REF 2196	Míchací hroty typu 16, 50 ks
REF 2140	Intraorální hroty typu 2, 50 ks

Registrado® Clear

Transparentní adičně tuhnoucí silikon na skusové registráty, rychle tuhnoucí

Indikace

Registrace skusu

Klíč pro intraorální registraci žvýkacích sil

Fixace RTG kuliček

Záznam frontální i distální okluze

Silikonový klíč pro kompozitní náhrady

Přednosti

- Vysoká konečná tvrdost v kombinaci s vysokou transparentností
- Přesvědčivá konzistence materiálu zajišťuje přilnutí k celé řadě zubů
- Práce bez tlaku času díky tepelně řízenému procesu tuhnutí (akcelerované tuhnutí začíná až při zavřených ústech)
- Vysoká rozměrová a tvarová stálost (> 99 %)
- Možné dokonalé světelné vytvrzení pomocí vrstvy Registrado Clear



SC
self-curing

auto
mix

Shore-A
80

REF 2037	Kartuše 50 ml, příslušenství
REF 2158	Dávkovač – typu 2
REF 2196	Míchací hroty typu 16, 50 ks
REF 2140	Intraorální hroty typu 2, 50 ks

Registrado® Scan

Skenovatelný adičně tuhnoucí silikon na skusové registráty, tvrdý, rychle tuhnoucí

Indikace

Okluzální skusové registráty

Upevňování registrátů obličejového oblouku

Materiál k určení polohy intraorálních podpurných registračních čepů

Přednosti

- Skenování bez prášku
- Přesná reprodukce skusu
- Vysoká tvrdost podle Shore A
- Krátká intraorální doba tuhnutí
- Dobré řezné vlastnosti
- Pro analogové nebo digitální postupy



SC
self-curing

auto
mix

Shore-A
90

REF 2038	Kartuše 50 ml, příslušenství
REF 2158	Dávkovač – typu 2
REF 2196	Míchací hroty typu 16, 50 ks
REF 2140	Intraorální hroty typu 2, 50 ks

Fit Test® C & B

Adičně tuhnoucí silikonový materiál ke kontrole protetických náhrad

Indikace

Kontrola přesnosti nasazení, adaptace okrajů a okrajových spár:

- korunky
- můstky
- inleje, onleje
- lité čepové návstavy, korunky
- kovové baze snímatelných náhrad
- attachmenty a jiné sekundární prvky snímatelných náhrad

Přednosti

- Rychlá diagnostická pomůcka pro všechny prvky náhrad
- Snadné použití díky stříkačkám QuickMix – automatické míchání bez bublin
- Přímá aplikace
- Optimální barva pro kovové a keramické práce
- Rychlý výsledek díky krátké době zpracování i tuhnutí

auto
mix



REF 2095	QuickMix stříkačka 5 ml, příslušenství
REF 2261	Dispenser – QuickMix
REF 2188	Míchací hroty typu 9, 50 ks
REF 2191	Míchací hroty typu 11, pouze s intraorálními hroty typu 1, 50 ks
REF 2139	Intraorální hroty typu 1, 50 ks

Individuo® Lux

Světlem tuhnoucí materiál na výrobu individuálních otkovacích lžic

Indikace

Výroba individuálních lžic z destiček předem vytvarovaných pro horní a dolní čelist

Přednosti

- V transparentní modré a modré opákní barvě
- Umožňuje přesnou a úspornou práci
- Pevné individuální lžice
- Příjemná mentolová příchut'
- Nelepivá konzistence
- Vytvrzuje se klasickou halogenovou lampou nebo UVA lampou

3-5 min
light-curing



REF 2402	Desky pro horní čelist 50 ks modré opákní
REF 2403	Desky pro dolní čelist 50 ks modré opákní
REF 2408	Desky pro horní čelist 50 ks transparentní modré
REF 2409	Desky pro dolní čelist 50 ks transparentní modré

Profibase

Předem vytvarované transparentní růžové otkovací lžice / destičky na baze, světlem tuhnoucí

Indikace

Výroba bazí v barvě gingivy pro voskovou modelaci celkových a částečných protéz
Výroba individuálních lžic z destiček předem vytvarovaných pro horní a dolní čelist

Přednosti

- Barva dásní
- Jednoduše a rychle tvarovatelné v ruce
- Dlouhodobá stálost a pevnost v tlaku
- Příjemná mentolová příchut'
- Nelepivá konzistence
- Vytvrzuje se klasickou halogenovou lampou nebo UVA lampou

3-5 min
light-curing



REF 2111	Desky pro horní čelist / desky pro dolní čelist 2 x 25 ks
REF 2112	Desky pro horní čelist 50 ks
REF 2113	Desky pro dolní čelist 50 ks

Cimara®

Materiál na opravy keramiky se světlem tuhnoucím kompozitem

PRO OPRAVY KERAMIKY
PŘÍMO V ÚSTECH, BEZ
OBSAHU KYSELIN



Indikace

Intraorální opravy defektů v keramických nebo kompozitních fazetách, fixních protetických pracích s kovovou konstrukcí

Přednosti

- Pouze jedna návštěva zubní ordinace
- Bez nutnosti snímání a opětovného cementování opravovaných prvků
- Jednoduchý pracovní postup
- Nejsou potřeba další přístroje
- Dlouhodobá pevnost vazby mezi keramikou a kompozitem
- Vysoká jistota pevnosti vazby



REF 1196	Sada silanu 8 × 0,3 ml, adheziva lahvička 4 ml, Opaquer LC stříkačka 1,2 g, GrandioSO Caps 8 × 0,25 g (A1, 2 × A2, 2 × A3, A3.5, B2, GA3.25), příslušenství
REF 1197	Silan 4 × 0,3 ml, příslušenství
REF 1198	Adheziva lahvička 4 ml
REF 1575	Opaker LC stříkačka 1,2 g, příslušenství
REF 1201	SiC (karborundové) brousky, 4 ks
REF 2147	Aplikační kanyly typu 45, 100 ks
REF 2309	Jednorázové štětečky do držáku, 100 ks
REF 2315	Míchací paletky, 20 ks
REF 2338	Držák na jednorázové dentální štětečky a Micro Tim, 5 ks



Přístroje · Další produkty

Pokrok. Efektivita. Orientace na praktičnost.

Budoucnost stomatologie je digitální. 3D tiskárny hrají v digitálním pracovním procesu zubních ordinací i laboratoří stále větší roli. Série VOCO SolFlex obsahuje sofistikovaná zařízení v různých velikostech nabízející zpracování nové rozměry.

Téměř nic ale v ordinaci nefunguje bez praktických malých pomocníků, jako jsou aplikační kanyly v různých velikostech, velká nebo malá zařízení pro použití nebo následnou práci s produkty, stejně jako čisticí prostředky, devitalizační pasty, modelové nebo vykrývací materiály.

SolFlex 350 · 650

Doplňková výroba pro digitální stomatologii



Přednosti

- DLP technologie s dlouhodobě funkčním UV-LED světelným zdrojem umožňuje tisk čirých průhledných prvků, jako jsou dlahy
- Maximální rychlost zpracování s vysokou procesní spolehlivostí díky technologii SMP
- Patentovaná technologie Flex-Vat – vyšší rychlost tisku za současné minimalizace pomocných struktur, šetří čas a materiál
- Vysoký objem nádrže umožňuje výrobu přes noc
- Zpracování běžně používaného STL formátu

Technické údaje SolFlex 350

Základna	400 × 400 mm
Vnitřní plocha	64 × 120 mm (3 plochy pro expozici)
Max. vnitřní výška	130 mm
Tloušťka vrstvy	25 - 200 µm
Pracovní kapacita	až 18 dlah
Pracovní rychlost	až 138 mm/hod, v závislosti na tloušťce vrstvy, materiálu atd.
Velikost pixelů	50 µm*
Přesnost	± 25 µm

Technické údaje SolFlex 650

Základna	400 × 400 mm
Vnitřní plocha	128 × 120 mm (6 plochy pro expozici)
Max. vnitřní výška	130 mm
Tloušťka vrstvy	25 - 200 µm
Pracovní kapacita	až 36 dlah
Pracovní rychlost	až 138 mm/hod, v závislosti na tloušťce vrstvy, materiálu atd.
Velikost pixelů	50 µm*
Přesnost	± 25 µm

* Velikost pixelů a objem tisku se mohou lišit.

SolFlex 350

REF 9102	3D tisk
REF 9103	SMP – 3D tisk (vč. Sensor Technology)
REF 9109	SMP retrosada
REF 9111	Flex-Vat – pružná vana na materiál
REF 9115	Přední rukojeť 350 / 650 – Přední rukojeť Flex-Vat
REF 9121	Pracovní platforma

SolFlex 650

REF 9104	3D tisk
REF 9105	SMP – 3D tisk (vč. Sensor Technology)
REF 9109	SMP retrosada
REF 9112	Flex-Vat – pružná vana na materiál
REF 9115	Přední rukojeť 350 / 650 – Přední rukojeť Flex-Vat
REF 9122	Pracovní platforma

Příslušenství

REF 9106	Úvodní balení
REF 9107	Úvodní balení Premium
REF 9130	Otoflash G171 – Polymerační přístroj s připojením na inertní plyn
REF 9133	Otoflash G171 – Polymerační přístroj
REF 9132	Otoflash G171 – Podložka
REF 9135	Netfabb Basis – Software pro 3D tisk
REF 9136	Netfabb Pro – Software pro 3D tisk

SolFlex 170

Doplňková výroba pro digitální stomatologii

Přednosti

Viz SolFlex 350 · 650

Technické údaje

Základna	296 × 318 mm
Vnitřní plocha	56 × 89 mm (1 plocha pro expozici)
Max. vnitřní výška	120 mm
Tloušťka vrstvy	25 - 200 µm
Pracovní kapacita	až 6 dlah
Pracovní rychlost	až 138 mm/hod, v závislosti na tloušťce vrstvy, materiálu atd.
Velikost pixelů	70 µm*
Přesnost	± 35 µm

* Velikost pixelů a objem tisku se mohou lišit.



REF 9100	3D tisk
REF 9101	SMP – 3D tisk (vč. Sensor Technology)
REF 9108	SMP retrosada
REF 9110	Flex-Vat – pružná vana na materiál
REF 9120	Pracovní platforma
REF 9119	Vyměnitelná deska pro pracovní platformu

Příslušenství

Viz SolFlex 350 · 650

OtoFlash

Polymerační přístroj pro světlem tuhnoucí pryskyřičné materiály

Přednosti

- Krátká doba vytvrzování díky 2 žárovkám na spodní straně
- Spolehlivé vytvrzení díky intenzivnímu světelnému výstupu o vlnové délce 280 - 580 nm
- Zařízení je volitelně možné dodat s ochranným plynem

Technické údaje

Rozměry polymerační komory	120 × 120 × 50 mm
Jmenovité napětí	100, 117, 230 V AC, nastavitelné spínačem
Příkon	250 W
Spektrální rozklad	280 - 700 nm, maximum mezi 400 a 500 nm
Frekvence záblesků	10 záblesků za sekundu
Digitální časovač	nastavitelný od 1 po 9999 záblesků
Rozměry	310 × 310 × 140 mm
Hmotnost	6 kg



REF 9133	Polymerační přístroj
REF 9130	Polymerační přístroj s připojením na inertní plyn
REF 9132	Podložka

VOCO Dynamic Dispenser

Dynamická míchačka



REF 9140 Míchačka 230 V

Indikace

Zařízení pro automatické dávkování a míchání otiskovacích materiálů VOCO v poměru 5:1 v kartuši

Přednosti

- Homogenní, dynamické promíchání složek produktu zajišťující konzistentně vysokou kvalitu materiálu
- Dávkování bez bublin
- Viditelné množství náplně
- 2 rychlosti dávkování
- Elektronická detekce zbytků

Caps Warmer

Zařízení pro předehřívání kompozit v kompulích Caps



REF 9001 Předehřívací zařízení

NOVINKA

Indikace

Zařízení pro ohřev kompozitních kompulí Caps

Přednosti

- Umožňuje krátký ohřev kompozitních kompulí Caps
- Speciálně navržený držák optimálně uchytí kompuli s kompozitem VOCO Caps, takže se rovnoměrně prohřeje
- Zvýšení zatékavosti a úprava vlastností kompozitu při zpracování
- Současný ohřev jednoho dávkovače s kompulí a až čtyř jednotlivých kompulí – ideální pro práci s několika odstíny
- Výběr ze 3 nastavení teploty – v závislosti na klinické situaci a požadované konzistenci

Celalux® 3

Vysoce výkonná LED polymerační lampa

Indikace

Vytvrzování všech světlem tuhneoucích dentálních materiálů, jejichž polymerace je aktivována v rozsahu vlnové délky 450 - 480 nm

Přednosti

- Nejmodernější LED technologie se světlem vysoké intenzity (zhruba 1.300 mW / cm²)
- Rozsah vlnové délky 450 - 480 nm
- Uhlazený a elegantní design (ve tvaru pera), hmotnost násadce včetně baterie a světlovodu pouhých 70 g
- Informuje o tom, kolik času uplynulo vibracemi na začátku a znovu po 10 s a 20 s
- Snadná manipulace, bezdrátové zařízení
- 8 mm světlovod sterilizovatelný v autoklávu
- Trvalá připravenost k použití díky náhradní baterii dodávané s přístrojem
- Baterie se snadno vyměňuje



REF 9090 Celalux 3 (násadec, nabíječka baterií, napájecí kabel s univerzálními adaptéry, 2 lithium polymerové baterie, 8 mm světlovod, antireflexní zařízení, návod k obsluze)

Příslušenství

REF 9091 Světlovod 8 mm, sterilizovatelný v autoklávu
REF 9092 Základna pro zařízení
REF 9093 Gumový štít, 5 ks

GIC Mixer

Míchačka kapslí

NOVINKA

Indikace

Zařízení pro míchání prášku a tekutiny v aplikačních kapslích

Přednosti

- Vysoká frekvence oscilace 4600 otáček za minutu vytváří obzvláště homogenní směs prášku a tekutiny
- Moderní design
- Držák kapslí umožňuje snadné vložení a vyjmutí kapslí
- Uživatelsky přívětivá
- Tichá a prakticky bez vibrací
- Doba míchání lze volně nastavit mezi 1 a 99 sekundami



REF 9050 Míchačka kapslí

3D tisk

Přístroje

Jiné

Čištění

Malé přístroje

Jednorázové pomůcky

Curvy®

Anatomicky tvarované mezizubní klínky k použití při zhotovování výplní



Indikace

Pomůcka pro zhotovování výplní s pomocí matric všech typů

Oddělení zubů z důvodu zajištění aproximálních kontaktů

Přednosti

- Utěsnění, upevnění a oddělení zvláštních tvarů
- Zahnutý klínek odpovídá anatomii zubu
- Kombinovatelné s kroužkem a částečnou matricí
- Čtyři velikosti: malé, střední, velké a extra velké
- Snadnější použití díky jemné špičce a trojrozměrnému tvaru
- Zahnutá základna působící na papilu menším tlakem
- Vyrobeno z plastu: nedochází k expanzi vlivem vlhka, odštípnutí nebo zabarvení

REF 2060	Sada 6 × 52 ks mixed
REF 2061	6 × 52 ks small
REF 2062	6 × 52 ks medium
REF 2063	6 × 52 ks large
REF 2064	6 × 52 ks extra large

Caries Marker

Barevný indikátor zubního kazu



Indikace

Zbarvení kariézního dentinu usnadňující preparaci kavity, důkaz přítomnosti zubního kazu

Přednosti

- Přesné určení hranic mezi zdravým a kariézním dentinem
- Podporuje minimálně invazivní výplňovou techniku
- Využitelný při výuce na extrahovaných zubech

REF 1005	Lahvička 2 × 3 ml, příslušenství
REF 2252	Pele Tím, No. 1, 3.000 × ø 4 mm

Pele Tim

Molitanové peletky k nanášení tekutých a pastovitých přípravků



Indikace

Nanášení na infikované dásně

Endodreny

Testování vitality

Odstraňování přebytků materiálu při cementování nebo pečetění

Snadné nanášení, např. fluoridových přípravků

Přednosti

- 5 praktických velikostí
- Bezbolestné nanášení bez tlaku
- Úsporné nanášení
- Hygienické použití bez chloupků

REF 2250	No. 0	3.000 × ø 3 mm
REF 2252	No. 1	3.000 × ø 4 mm
REF 2253	No. 2	1.000 × ø 5 mm
REF 2254	No. 3	500 × ø 8 mm
REF 2255	No. 4	500 × 6 × 8 mm

3D tisk

Přístroje

Jiné

Block Out Gel LC

Světlem tuhnoucí vykrývací materiál



Indikace

Vykrývání sádrových modelů

Přednosti

- Modrá barva usnadňuje přehled o aplikaci
- Jednoduchá aplikace přímo ze stříkačky

10-30
sec
light-curing

REF 1661	Stříkačky 4 × 1,2 ml, příslušenství
REF 2144	Aplikační kanyly typu 44, 100 ks

Čištění

Malé přístroje

Jednorázové pomůcky

Dimanto®

Jednofázové diamantové leštítko pro předleštění a leštění kompozit do vysokého lesku



for
NHT
Composites

Indikace

Předleštění a leštění dokončených kompozitních výplní do vysokého lesku

Přednosti

- Vynikající výsledky leštění
- Vhodné pro všechna kompozita – také pro kompozita poslední generace
- S rozptýleným diamantem pro účinné leštění
- Minimální náklady na nástroje – předleštění a leštění do vysokého lesku zajistí jediné leštítko
- Sterilizovatelné v autoklávu a tedy použitelné opakovaně
- K dostání v pěti různých tvarech pro přesné a individualizované leštění
- Použití možné s i bez chlazení vodou

REF 2380	Sada 5 ks mixed (jeden malý hrot, velký hrot, malý kalíšek, velký kalíšek, čočka)
REF 2381	Malý hrot, 10 ks
REF 2382	Velký hrot, 10 ks
REF 2383	Malý kalíšek, 10 ks
REF 2384	Velký kalíšek, 10 ks
REF 2385	Čočka, 10 ks

SiC (karborundové) brousky

Na opravy keramiky



Indikace

Opracování vazebného povrchu křemičité a oxidové keramiky pro intraorální opravy defektů v keramických fazetách a celokeramických náhradách

Přednosti

- Homogenní zrnitost
- Vysoce pevný, nerezový dřík
- Optimální pevnost pojiva

REF 1201	4 ks
----------	------

Traypurol® tabs

Aktivní tablety pro čištění otiskovacích lžic a nástrojů



REF 2355 50 ks

Indikace

Samočinné čištění otiskovacích lžic a nástrojů

Přednosti

- Rychle odstraňuje algináty a cementy
- Zvlášť snadno se dávákuje
- Bez nutnosti usilovného míchání – tablety se po vložení do vody automaticky rozpouští
- Šetrné k materiálům – vhodné pro všechny nerezové kovy (včetně hliníku) a plastů
- Biologicky odbouratelný a pH neutrální
- Možné použití v ultrazvukových lázních

Traypurol®

Koncentrovaný čisticí prostředek na nástroje a otiskovací lžice



REF 2289 Lahvička 1 l
REF 2290 Kanistr 5 l
REF 2304 Pumpa pro kanistr 5 l

Indikace

Samočinné čištění otiskovacích lžic a nástrojů

Přednosti

- Jednoduše ředitelný vodou
- Odstraňuje zbytky alginátů, zinkoxideugenolů, skloionomerů, karboxylátů a fosfátových cementů
- Otiskovací lžice a nástroje spolehlivě vyčistí přes noc
- Možné použití v ultrazvukové čističce
- Vhodný také pro neoxidující kovy a plasty
- Biologicky odbouratelný a jemný

3D tisk

Přístroje

Jiné

Čištění

Malé přístroje

Jednorázové pomůcky

Caps Dispenser

Dávkoř pro římou aplikaci
vřplňovř materiřř v Caps



REF 9301 Dispenser – Caps

Dispenser typu 2

Dřvkovř dentřlnř materiřřř
vřtlřčovřnř z kartinřř



Pro kartinře v pomřru 1:1 nebo 1:2 (50 ml)

REF 2158 Dřvkovř – typu 2

Dispenser typu 3

Dřvkovř dentřlnř materiřřř
vřtlřčovřnř z kartinřř



Pro kartinře v pomřru 1:1 nebo 1:2 (25 ml)

REF 2259 Dřvkovř – typu 3

QuickMix Dispenser

Dřvkovř pro vřtlřčovřnř dentřlnř
materiřřř ze střřřkřek QuickMix



Pro QuickMix střřřkřky 1:1

REF 2261 Dispenser – QuickMix

AC Applicator typu 1

Kleřřř – typ aplikřtoru pro řřřmř
nanřřenř obsahu VOCO aplikřnřnř
kapslřř (AC) do kavit



REF 2331 Applicator – AC typu 1

AC Applicator typu 2

Kleřřř – typ aplikřtoru pro řřřmř
nanřřenř obsahu VOCO aplikřnřnř
kapslřř (AC) do kavit



REF 2334 Applicator – AC typu 2

AC Activator

Kleřřř k aktivaci aplikřnřnř kapslřř
VOCO (AC)




REF 9300 Activator – AC


Zřsobnřř na aplikřnřř řřřřřřřřř

Zřsobnřř pro hygienickř snřmřnř aplikřnřnř řřřřřřřřř – lze jej opakovanř
plnit dvřma typy řřřřřřřřř



REF 2244 Zřsobnřř – aplikřnřř řřřřřřřřř

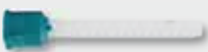Míchací hroty					
REF 2185	Míchací hroty typu 6 pro Provicol C, Structur Premium, Structur 2 v kartuších, Structur 3 v kartuších, 50 ks		REF 2194	Míchací hroty typu 14 pro Bifix SE, Perfect Bleach Office+, 50 ks	
REF 2186	Míchací hroty typu 7 pro V-Posil Light Fast, V-Posil X-Light Fast, 50 ks		REF 2195	Míchací hroty typu 15 (intraorální hroty typu 1) pro Bifix SE, Perfect Bleach Office+, 50 ks	
REF 2187	Míchací hroty typu 8 pro Ufi Gel hard C, Ufi Gel SC, 50 ks		REF 2196	Míchací hroty typu 16 (intraorální hroty typu 2) pro Registrado Clear, Registrado Scan, Registrado X-tra, V-Posil Heavy Soft Fast v kartuších, V-Posil Mono Fast v kartuších, 50 ks	
REF 2188	Míchací hroty typu 9 pro Bifix Temp, Fit Test C & B, 50 ks		REF 2199	Míchací hroty typu 19 pro Rebuilda DC v kartuších, ohybatelné, 30 ks	
REF 2189	Míchací hroty typu 10 pro Meron Plus QM, Provicol QM, Provicol QM Plus, Quick Up, Structur 2 ve QuickMix stříkačka, Structur 3 ve QuickMix stříkačka, 50 ks		REF 2202	Míchací hroty typu 20 pro modelový silikon, 50 ks	
REF 2191	Míchací hroty typu 11 pro Bifix QM, Fit Test C & B pouze s intraorálními hroty typu 1, Grandio Core Dual Cure ve QuickMix stříkačka, Rebuilda DC ve QuickMix stříkačka, 50 ks		REF 2203	Míchací hroty typu 30 pro V-Posil Heavy Soft Fast ve velké kartuších, V-Posil Mono Fast ve velké kartuších, 50 ks	
REF 2192	Míchací hroty typu 12 pro Rebuilda DC v kartuších, 50 ks				

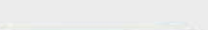Aplikační pomůcky					
REF 2169	VOCO trifill nástroj, 10 ks		REF 2247	Single Tim, aplikační štětečky, 100 ks	
REF 2249	Micro Tim, jemné aplikační štětečky, 100 ks		REF 2246	Endo Tim, aplikační štětečky, k použití do kořenových kanálků, 50 ks	
REF 2309	Jednorázové štětečky do držáku, 100 ks		REF 2245	Easy Brush, aplikační štětečky, 50 ks	
REF 2338	Držák na jednorázové dentální štětečky a Micro Tim, 5 ks				

3D tisk

Přístroje

Jiné

Čištění

Malé přístroje

Jednorázové pomůcky



Aplikační kanyly

REF 2145	Aplikační kanyly typu 40 pro Fissurit F / FX, 100 ks		REF 2147	Aplikační kanyly typu 45 pro Amaris Gingiva, Cimara Opaker LC, FinalTouch, Grandio Seal, 100 ks	
REF 2146	Aplikační kanyly typu 41 pro Admira Fusion Flow, Calcimol LC, Grandio / SO Flow, Ionoseal, LC Dam, 100 ks		REF 2148	Aplikační kanyly typu 46 pro Admira Fusion x-base, Clip Flow, GrandioSO Heavy Flow, x-tra base, 100 ks	
REF 2310	Aplikační kanyly typu 42 pro Vococid, 30 ks		REF 2131	Aplikační kanyly typu 47 pro Calcicur, 30 ks	
REF 2167	Aplikační kanyly typu 43 pro VOCO Profluorid Varnish kartuše, 100 ks		REF 2132	Aplikační kanyly typu 48 pro Vococid, 50 ks	
REF 2144	Aplikační kanyly typu 44 pro Admira Flow, Amaris Flow, Arabesk Flow, Block Out Gel LC, Quick Up LC, Twinky Star Flow, 100 ks				

Intraorální hroty

REF 2133	Intraorální hroty typu 6 pro V-Posil Mono Fast, 50 ks		REF 2141	Intraorální hroty typu 3 pro Rebilda DC v kartuších, V-Posil Light Fast, V-Posil X-Light Fast, 50 ks	
REF 2139	Intraorální hroty typu 1 pro Bifix QM, Bifix SE, Perfect Bleach Office+, k použití do kořenových kanálků s Rebilda DC ve QuickMix stříkačka, 50 ks		REF 2142	Intraorální hroty typu 4 pro Bifix QM, Grandio Core Dual Cure ve QuickMix stříkačka, Rebilda DC ve QuickMix stříkačka, 50 ks	
REF 2140	Intraorální hroty typu 2 pro Registrado Clear, Registrado Scan, Registrado X-tra, 50 ks				

Míchací špachtle · Míchací podložky · Míchací paletky

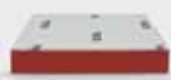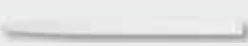REF 2303	Míchací podložky 70 × 80 mm, zesponu lepidlo, 4 ks		REF 2168	VOCO míchací špachtle na cementy, 20 ks	
REF 2315	Míchací paletky, 20 ks				

A	AC Activator	82	F	Futurabond M+	21	R	Rebilda DC	59						
	AC Applicator	82		Futurabond NR	22		Rebilda Form	60						
	Admira Bond	28		Futurabond U	20		Rebilda LC	59						
	Admira Fusion	25	G	GIC Mixer	77		Rebilda Post	58						
	Admira Fusion Flow	26		Grandio	34		Rebilda Post GT	57						
	Admira Fusion x-base	28		Grandio blocs	48		Rebilda Post System	58						
	Admira Fusion x-tra	27		Grandio Core Dual Cure	60		Registrado Clear	70						
	Admira Protect	13		Grandio disc	48		Registrado Scan	70						
	Alfacomp LC	39		Grandio Flow	35		Registrado X-tra	70						
	Amalgam Liner	19		Grandio Seal	8		Remin Pro	11						
Amaris	36	GrandioSO		29	Remin Pro forte	11								
Amaris Flow	36	GrandioSO Flow		30	S	SiC (karborundové) brousky	80							
Amaris Gingiva	37	GrandioSO Heavy Flow		31		SolFlex 170	75							
Aqua Ionofil Plus	46	GrandioSO x-tra	32	SolFlex 350		74								
Aqua Meron	54	GrandTEC	33	SolFlex 650		74								
Arabesk	40	I	Individuo Lux	71		Solobond M	23							
Arabesk Flow	40			Ionofil Molar		45	Solobond Plus	23						
B	Bifix QM			51		Ionofil Molar AC	45	Structur 2	62					
	Bifix SE			51		Ionofil Molar AC Quick	45	Structur 3	61					
	Bifix Temp			63		Ionolux	43	Structur Premium	63					
	Bifluorid 10			10		Ionoseal	19	T	Traypurol	81				
	Block Out Gel LC			79	Ionostar Molar	44	Traypurol tabs		81					
	BrackFix			56	Ionostar Plus	44	Twinky Star		41					
	C			Calcicur	18	J	Jednorázové pomůcky		83	Twinky Star Flow	41			
				Calcimol	18		M		Meron (Aplikační kapsle)	53	U	Ufi Gel hard	66	
		Calcimol LC	18	Meron	53					Ufi Gel hard C		66		
		Caps Dispenser	82	Meron Plus	52					Ufi Gel P		67		
Caps Warmer		76	Meron Plus AC	52	Ufi Gel SC					67				
Caries Marker		78	Meron Plus QM	52	V					V-Posil Adhesive		69		
Celalux 3		77	O	OtoFlash						75		V-Posil Heavy Soft Fast	68	
Ceramic Bond		54		P				Pele Tim		79		V-Posil Light Fast	69	
Cimara		72								Perfect Bleach		14	V-Posil Mono Fast	68
CleanJoy		7								Perfect Bleach Office+		15	V-Posil Putty Fast	68
Clip	65	Polofil Supra				41				V-Posil X-Light Fast		69		
Clip F	65	Profibase				71	V-Print model		49					
Clip Flow	65	Profluorid Varnish				12	V-Print ortho		49					
Curvy	78	Profylaktická sada				16	V-Print SG		49					
D	Dimanto	80				Q	Quick Up		55	Vococid	23			
	Dávkovač	82			QuickMix Dispenser		82		VOCO Dynamic Dispenser	76				
	Dynamic Dispenser	76	X		x-tra base		38		VOCO Ionofil Molar	45				
	E	Easy Glaze		46	x-tra fil		39	VOCO Ionofil Molar AC	45					
		F		FinalTouch	37		F	Fissurit	9	VOCO Ionofil Molar AC Quick	45			
				Fissurit	9			Fissurit F	9	VOCO Profluorid Varnish	12			
				Fissurit FX	9			Fit Test C & B	71	G	GIC Mixer	77		
				Futurabond DC	22			Futurabond M	21		Grandio	34		
				Futurabond NR	22			Futurabond U	20		Grandio blocs	48		
				Futurabond M	21			Futurabond M+	21		Grandio Core Dual Cure	60		
Futurabond NR				22	Futurabond NR	22		Grandio disc	48					
Futurabond U				20	Futurabond U	20		Grandio Flow	35					
Futurabond M+			21	Futurabond M+	21	Grandio Seal		8						
Futurabond NR	22		Futurabond NR	22	GrandioSO	29								
Futurabond U	20	Futurabond U	20	GrandioSO Flow	30									
Futurabond M	21	Futurabond M	21	GrandioSO Heavy Flow	31									
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22	GrandioSO x-tra	32									
Futurabond U	20	Futurabond U	20	GrandTEC	33									
Futurabond M+	21	Futurabond M+	21	I	Individuo Lux	71								
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22		Ionofil Molar	45								
Futurabond U	20	Futurabond U	20		Ionofil Molar AC	45								
Futurabond M	21	Futurabond M	21		Ionofil Molar AC Quick	45								
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22		Ionolux	43								
Futurabond U	20	Futurabond U	20		Ionoseal	19								
Futurabond M+	21	Futurabond M+	21		Ionostar Molar	44								
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22		Ionostar Plus	44								
Futurabond U	20	Futurabond U	20		J	Jednorázové pomůcky	83							
Futurabond M	21	Futurabond M	21			M	Meron (Aplikační kapsle)	53						
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22	Meron				53						
Futurabond U	20	Futurabond U	20	Meron Plus				52						
Futurabond M+	21	Futurabond M+	21	Meron Plus AC				52						
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22	Meron Plus QM				52						
Futurabond U	20	Futurabond U	20	O				OtoFlash	75					
Futurabond M	21	Futurabond M	21					P	Pele Tim	79				
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22							Perfect Bleach	14			
Futurabond U	20	Futurabond U	20							Perfect Bleach Office+	15			
Futurabond M+	21	Futurabond M+	21		Polofil Supra					41				
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22		Profibase	71								
Futurabond U	20	Futurabond U	20		Profluorid Varnish	12								
Futurabond M	21	Futurabond M	21		Profylaktická sada	16								
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22		Provicol	64								
Futurabond U	20	Futurabond U	20		Provicol C	64								
Futurabond M+	21	Futurabond M+	21	Provicol QM	64									
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22	Provicol QM Plus	64									
Futurabond U	20	Futurabond U	20	Provizorní sada	62									
Futurabond M	21	Futurabond M	21	Q	Quick Up	55								
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22		QuickMix Dispenser	82								
Futurabond U	20	Futurabond U	20		R	Rebilda DC	59							
Futurabond M	21	Futurabond M	21				Rebilda Form	60						
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22				Rebilda LC	59						
Futurabond U	20	Futurabond U	20				Rebilda Post	58						
Futurabond M+	21	Futurabond M+	21				Rebilda Post GT	57						
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22				Rebilda Post System	58						
Futurabond U	20	Futurabond U	20				Registrado Clear	70						
Futurabond M	21	Futurabond M	21				Registrado Scan	70						
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22	Registrado X-tra			70							
Futurabond U	20	Futurabond U	20	Remin Pro			11							
Futurabond M	21	Futurabond M	21	Remin Pro forte	11									
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22	S	SiC (karborundové) brousky	80								
Futurabond U	20	Futurabond U	20		SolFlex 170	75								
Futurabond M	21	Futurabond M	21		SolFlex 350	74								
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22		SolFlex 650	74								
Futurabond U	20	Futurabond U	20		Solobond M	23								
Futurabond M+	21	Futurabond M+	21		Solobond Plus	23								
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22		Structur 2	62								
Futurabond U	20	Futurabond U	20		Structur 3	61								
Futurabond M	21	Futurabond M	21		Structur Premium	63								
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22		T	Traypurol	81							
Futurabond U	20	Futurabond U	20	Traypurol tabs		81								
Futurabond M	21	Futurabond M	21	Twinky Star		41								
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22	Twinky Star Flow		41								
Futurabond U	20	Futurabond U	20	U		Ufi Gel hard	66							
Futurabond M	21	Futurabond M	21			Ufi Gel hard C	66							
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22			Ufi Gel P	67							
Futurabond U	20	Futurabond U	20			Ufi Gel SC	67							
Futurabond M+	21	Futurabond M+	21			V	V-Posil Adhesive	69						
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22				V-Posil Heavy Soft Fast	68						
Futurabond U	20	Futurabond U	20		V-Posil Light Fast		69							
Futurabond M	21	Futurabond M	21		V-Posil Mono Fast		68							
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22		V-Posil Putty Fast		68							
Futurabond U	20	Futurabond U	20		V-Posil X-Light Fast		69							
Futurabond M	21	Futurabond M	21	V-Print model	49									
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22	V-Print ortho	49									
Futurabond U	20	Futurabond U	20	V-Print SG	49									
Futurabond M+	21	Futurabond M+	21	Vococid	23									
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22	VOCO Dynamic Dispenser	76									
Futurabond U	20	Futurabond U	20	VOCO Ionofil Molar	45									
Futurabond M	21	Futurabond M	21	VOCO Ionofil Molar AC	45									
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22	VOCO Ionofil Molar AC Quick	45									
Futurabond U	20	Futurabond U	20	VOCO Profluorid Varnish	12									
Futurabond M	21	Futurabond M	21	X	x-tra base	38								
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22		x-tra fil	39								
Futurabond U	20	Futurabond U	20		Y	Yfi Gel hard	66							
Futurabond M	21	Futurabond M	21				Yfi Gel hard C	66						
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22				Yfi Gel P	67						
Futurabond U	20	Futurabond U	20				Yfi Gel SC	67						
Futurabond M+	21	Futurabond M+	21				Z	Z-Posil Adhesive	69					
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22						Z-Posil Heavy Soft Fast	68				
Futurabond U	20	Futurabond U	20						Z-Posil Light Fast	69				
Futurabond M	21	Futurabond M	21						Z-Posil Mono Fast	68				
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22	Z-Posil Putty Fast					68					
Futurabond U	20	Futurabond U	20	Z-Posil X-Light Fast					69					
Futurabond M	21	Futurabond M	21	Z-Print model	49									
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22	Z-Print ortho	49									
Futurabond U	20	Futurabond U	20	Z-Print SG	49									
Futurabond M+	21	Futurabond M+	21	Zvocid	23									
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22	ZVOCO Dynamic Dispenser	76									
Futurabond U	20	Futurabond U	20	ZVOCO Ionofil Molar	45									
Futurabond M	21	Futurabond M	21	ZVOCO Ionofil Molar AC	45									
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22	ZVOCO Ionofil Molar AC Quick	45									
Futurabond U	20	Futurabond U	20	ZVOCO Profluorid Varnish	12									
Futurabond M	21	Futurabond M	21	X	x-tra base	38								
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22		x-tra fil	39								
Futurabond U	20	Futurabond U	20		Y	Yfi Gel hard	66							
Futurabond M	21	Futurabond M	21				Yfi Gel hard C	66						
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22				Yfi Gel P	67						
Futurabond U	20	Futurabond U	20				Yfi Gel SC	67						
Futurabond M+	21	Futurabond M+	21				Z	Z-Posil Adhesive	69					
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22						Z-Posil Heavy Soft Fast	68				
Futurabond U	20	Futurabond U	20						Z-Posil Light Fast	69				
Futurabond M	21	Futurabond M	21						Z-Posil Mono Fast	68				
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22	Z-Posil Putty Fast					68					
Futurabond U	20	Futurabond U	20	Z-Posil X-Light Fast					69					
Futurabond M	21	Futurabond M	21	Z-Print model	49									
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22	Z-Print ortho	49									
Futurabond U	20	Futurabond U	20	Z-Print SG	49									
Futurabond M+	21	Futurabond M+	21	Zvocid	23									
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22	ZVOCO Dynamic Dispenser	76									
Futurabond U	20	Futurabond U	20	ZVOCO Ionofil Molar	45									
Futurabond M	21	Futurabond M	21	ZVOCO Ionofil Molar AC	45									
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22	ZVOCO Ionofil Molar AC Quick	45									
Futurabond U	20	Futurabond U	20	ZVOCO Profluorid Varnish	12									
Futurabond M	21	Futurabond M	21	X	x-tra base	38								
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22		x-tra fil	39								
Futurabond U	20	Futurabond U	20		Y	Yfi Gel hard	66							
Futurabond M	21	Futurabond M	21				Yfi Gel hard C	66						
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22				Yfi Gel P	67						
Futurabond U	20	Futurabond U	20				Yfi Gel SC	67						
Futurabond M+	21	Futurabond M+	21				Z	Z-Posil Adhesive	69					
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22						Z-Posil Heavy Soft Fast	68				
Futurabond U	20	Futurabond U	20						Z-Posil Light Fast	69				
Futurabond M	21	Futurabond M	21						Z-Posil Mono Fast	68				
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22	Z-Posil Putty Fast					68					
Futurabond U	20	Futurabond U	20	Z-Posil X-Light Fast					69					
Futurabond M	21	Futurabond M	21	Z-Print model	49									
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22	Z-Print ortho	49									
Futurabond U	20	Futurabond U	20	Z-Print SG	49									
Futurabond M+	21	Futurabond M+	21	Zvocid	23									
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22	ZVOCO Dynamic Dispenser	76									
Futurabond U	20	Futurabond U	20	ZVOCO Ionofil Molar	45									
Futurabond M	21	Futurabond M	21	ZVOCO Ionofil Molar AC	45									
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22	ZVOCO Ionofil Molar AC Quick	45									
Futurabond U	20	Futurabond U	20	ZVOCO Profluorid Varnish	12									
Futurabond M	21	Futurabond M	21	X	x-tra base	38								
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22		x-tra fil	39								
Futurabond U	20	Futurabond U	20		Y	Yfi Gel hard	66							
Futurabond M	21	Futurabond M	21				Yfi Gel hard C	66						
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22				Yfi Gel P	67						
Futurabond U	20	Futurabond U	20				Yfi Gel SC	67						
Futurabond M+	21	Futurabond M+	21				Z	Z-Posil Adhesive	69					
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22						Z-Posil Heavy Soft Fast	68				
Futurabond U	20	Futurabond U	20						Z-Posil Light Fast	69				
Futurabond M	21	Futurabond M	21						Z-Posil Mono Fast	68				
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22	Z-Posil Putty Fast					68					
Futurabond U	20	Futurabond U	20	Z-Posil X-Light Fast					69					
Futurabond M	21	Futurabond M	21	Z-Print model	49									
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22	Z-Print ortho	49									
Futurabond U	20	Futurabond U	20	Z-Print SG	49									
Futurabond M+	21	Futurabond M+	21	Zvocid	23									
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22	ZVOCO Dynamic Dispenser	76									
Futurabond U	20	Futurabond U	20	ZVOCO Ionofil Molar	45									
Futurabond M	21	Futurabond M	21	ZVOCO Ionofil Molar AC	45									
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22	ZVOCO Ionofil Molar AC Quick	45									
Futurabond U	20	Futurabond U	20	ZVOCO Profluorid Varnish	12									
Futurabond M	21	Futurabond M	21	X	x-tra base	38								
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22		x-tra fil	39								
Futurabond U	20	Futurabond U	20		Y	Yfi Gel hard	66							
Futurabond M	21	Futurabond M	21				Yfi Gel hard C	66						
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22				Yfi Gel P	67						
Futurabond U	20	Futurabond U	20				Yfi Gel SC	67						
Futurabond M+	21	Futurabond M+	21				Z	Z-Posil Adhesive	69					
Futurabond NR	22	Futurabond NR	22						Z-Posil Heavy Soft Fast	68				
Futurabond U	20	Futurabond U												



VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Německo

Tel.: +49 (0)4721-719-0
Fax: +49 (0)4721-719-140

info@voco.com
www.voco.dental