



DEZINFEKČNÍ PLÁN

DEZINFEKCE STOMATOLOGICKÝCH NÁSTROJŮ

DENTASEPT TRI-ENZYMATIC

DOBA KONTAKTU: 7 MINUT
ŘEDĚNÍ: 5 ml na 1 litr vody (0,5%)
VYMĚŇUJTE KAŽDÝ DEN

MICRO 10+

DOBA KONTAKTU: 15 MINUT
ŘEDĚNÍ: 20 ml na 1 litr vody (2%)
VYMĚŇUJTE KAŽDÝ DEN

DENTASEPT 3H RAPID

DOBA KONTAKTU: 5 MINUT
ŘEDĚNÍ: 20 ml na 1 litr vody (2%)
VYMĚŇUJTE KAŽDÝ DEN

DEZINFEKCE PLOCH - UBROUSKY

DENTASEPT SH PRO WIPES

DOBA KONTAKTU: 2 min
UBROUSKY PŘÍMO K POUŽITÍ

DEZINFEKCE PLOCH - POSTŘIKEM

DENTASEPT SH PRO (bez alkoholu)

DOBA KONTAKTU: 2 min
ROZTOK: PŘÍMO K POUŽITÍ

DENTASEPT SPRAY 60 PRO

DOBA KONTAKTU: 30 sec.
ROZTOK: PŘÍMO K POUŽITÍ

DEZINFEKCE SACÍHO SYSTÉMU

DENTASEPT ASPIRATION AF+

ŘEDĚNÍ: 20 ml na 1 litr vody (2%)
na konci dne nasátí a proplach zubní soupravy, lze nechat přes noc nebo víkend (až 72 hodin) proplach vodou

DEZINFEKCE ROTAČNÍHO INSTRUMENTÁRIA

DENTASEPT SPECIAL ROTATIVE

DOBA KONTAKTU: 15 MINUT
ROZTOK: PŘÍMO K POUŽITÍ
VYMĚŇUJTE KAŽDÝ DEN