

Informační brožura

unica anterior




powered by:
STYLE ITALIANO™

matricové
systémy



polydentia
swiss manufacture 

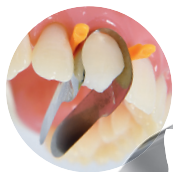

„V dnešní záchovné stomatologii musí být výběr produktů a techniky, které používáme každý den, předvídatelný a efektivní z hlediska nákladů a musí zahrnovat jasné výhody pro naše každodenní postupy. Unica je řešením každodenních předních výplní, ať už se jedná o třídu III, IV, V, modifikaci tvarů a / nebo kompozitních faze v přímé stratifikační technice. Jedna efektivní matrice pro každodenní přední estetické a funkční výsledky.“

Dr. Jordi Manauta, DDS
Vedoucí Styl Italiano Idea, Sestri
Levante, Itálie

Obsah

Výplně třídy III	3
Výplně třídy IV	4
Výplně třídy V	5
Kompozitní fazety	6
Tvarové modifikace	7
Výplně	8

Výplně III. třídy



Se svolením
Dr. Dan Lazar
Rumunsko



pro více
informací



1. Předoperační stav



2. Kavita po preparaci (čištění,
odstranění zubního kazu a
dezinfekce)



3. Umístění Unica anterior



4. Kavita vyplněná kompozitem



5. Pooperační pohled na výplň



*Unica může být vyříznuta
tak, aby zahrnoval pouze
jeden proximální povrch*

Výplně IV. třídy



Se svolením
Dr. Dan Lazar
Rumunsko



pro více
informací



1. Předoperační stav



2. Preparace povrchu a čištění



3. Umístění Unica Anterior



4. Aplikace výplně



5. Pooperační pohled na výplň



*Unica může být seříznuta
tak, aby zahrnovala pouze
jeden proximální povrch*

Výplně V. třídy



Se svolením
Dr. Giuseppe Chiodera
Itálie



pro více
informací



1. Předoperační stav



2. Kavita po preparaci (čištění,
odstranění zubního kazu a
dezinfekce)



3. Umístění Unica Anterior



4. Kavita vyplněná kompozitem



5. Okamžitý pooperační
pohled na výplň

Kompozitní fazety



Se svolením
Dr. Monaldo Saracinelli &
Dr. Antonino Nicolò
Itálie



1. Předoperační stav



2. Preparace povrchu a
umístění Unica anterior



3. Aplikace výplně



4. Klinická situace před
leštěním a dokončením



5. Pooperační pohled na výplň



pro více
informací

Tvarové modifikace



Se svolením
Dr. Carlos Fernández Villares
Madrid, Španělsko



pro více
informací



1. Předoperační stav



2. Aplikace výplně



3. Umístění Unica anterior



4. Dostavba povrchu zubu



5. Pooperační pohled na výplň

Unica Introkit anterior

REF 6900

- 35 pcs Unica anterior matrices
- 40 pcs myWedge XS
- 40 pcs myWedge S
- 40 pcs myWedge M
- 1 pc myCustom Resin, 3 ml syringe
- 7 pcs needle tips gauge 18 for myCustom Resin
- 1 pc myQuickmatrix Forceps



Doplňkové balení

		Množství	REF
	Unica anterior matrice	12	6912
	Unica anterior matrice	50	6950
	myWedge, extra malé (XS)	100	7101
	myWedge, malé (S)	100	7102
	myWedge, střední (M)	100	7103
	myCustom Resin, 3ml stříkačka & 10 ks jehel průměru 18		6811
	myQuickmatrix kleště		5703

 Vyrobeno ve Švýcarsku
Polydentia SA
via Cantonale 47
6805 Mezzovico-Vira
Switzerland

Tel: +41 91 946 29 48
Fax: +41 91 946 32 03

info@polydentia.ch
www.polydentia.ch



Navštivte "Unica Community", kde můžete sdílet klinické případy Unica anterior

Sledujte nás
#thinkunica



 polydentia
swiss manufacture 