

7 otázek & odpovědí



Na co jste se vždycky chtěli zeptat ... o bělení

Mohu si bělit zuby během spánku?

Pomocí individuálního nosiče zhotoveného pro Vás na míru si můžete bělit zuby i během spánku! Univerzitní studie prokázala, že bělicí gel Opalescence™ 10 % zůstává během nočního bělení aktivní po dobu 8-10 hodin.

Mohu si vybělit zuby s rovnátky?

Ano! Zuby s rovnátky můžete bělit pomocí předplněných nosičů s bělicím gelem Opalescence Go™, které lze nasadit na zámečky s dráty. Protože bělení funguje tak, že peroxid proniká do zubu, šíří se po celém jeho povrchu a také uvnitř zubu v celém dentinu a sklovině, vybělí se i ta část zubu, kterou zakrývá zámeček.

Pomáhají při bělení UV nebo LED světla?

Studie opakovaně prokázaly, že UV nebo LED lampy nezlepšují účinnost bělení. Některé výzkumy dokonce ukazují, že použití světla k bělení může být pro rty, dásně i zuby škodlivé. Navíc jsou nechvalně známé tím, že se u nich až příliš rychle vrací odstín.

Proto je doporučováno velmi časté přebělování, v případě světýlek pro domácí použití v řádu několika dnů.

Jak dlouho vydrží mé výsledky?

To závisí na řadě faktorů. Na to, jak dlouho zůstanou Vaše zuby bílé, může mít vliv cokoli od Vašich biologických predispozic až po skladbu Vaší stravy. Bělení Opalescence však ve srovnání s konkurenčními bělicími produkty účinně pomáhá snižovat návrat původního odstínu. Také skvělá bělicí zubní pasta (například Opalescence™ Whitening Toothpaste) může prodloužit dobu mezi ošetřeními.

Je bělení nepříjemné? Neublíží mým zubům či dásním?

Zcela jistě neublíží! Opalescence PF je bělicí gel, který naopak posiluje zubní sklovinu a přispívá ke zdraví zubu. Lepkavé, viskózní složení bělicího gelu Opalescence se nevyplavuje z nosiče jako jiné bělicí prostředky. Je velmi důležité, aby se gel v ústech příliš nevymýval. Pokud by ulpěl na dásních, mohl by způsobit podráždění nebo bolest. Abyste se vyhnuli nepříjemným pocitům, dodržujte pokyny, jak správně aplikovat předplněné zásobníky a gely v injekční stříkačce - neplýtvejte gelem a aplikujte do jednoho nosiče 1/3 - 1/2 stříkačky. Před bělením a během něj používejte zubní pastu Opalescence pro zmírnění citlivosti, která vám pomůže s případným nepohodlím zubů.

Je bělení zubů drahé?

Náklady na bělení zubů se mohou značně lišit v závislosti na tom, co používáte a kde si ho pořídíte. Volně prodejná bělítka jsou sice nejlevnější, ale nemusí být nejúčinnější, či poskytovat dlouhodobý účinek. Některá při dlouhodobém používání mohou zubům i dásním škodit. Také mohou zvyšovat riziko, že budete mít citlivé zuby. Jiná bělení zubů prováděná zubním lékařem mohou být dražší kvůli nákladným světlům nebo laserům používaným při bělení zubů, ale tyto doplňky obvykle nepřinášejí žádný další přínos. Bělení zubů Opalescence nabízí výhody bělení předepsaného zubním lékařem bez jakýchkoli nákladných vychytávek, což z něj činí nejvýhodnější variantu. O konkrétních nákladech se poradte se svým zubním lékařem, abyste zjistili, jaká možnost bělení je pro vás nejlepší.

Chci začít, co mám nyní udělat?

Vaše zubní ordinace či dentální hygienistka vám poradí, jak začít se bělením. Hygienistka a zubní lékař jsou fantastickými zdroji informací pro stanovení režimu, časového harmonogramu, sledování odstínu, pochopení Vašich konkrétních potřeb a přání a (v případě potřeby) zmírnění citlivosti.

Přípravky pro bělení zubů Opalescence™ byly vyvinuty a podrobeny více studiím, než jakákoli jiná značka na světě. Díky výsledkům těchto studií máte jistotu, že je bělení zubů bezpečné a spolehlivé.

Svěřte se do rukou odborníka