



AlignerFlow LC

KOMPOZIT NA ATTACHMENTY PRO ALIGNERY
FLUORESCENTNÍ – PEVNÝ – ODOLNÝ VŮČI ABRAZI

AlignerFlow LC

OPTIMALIZOVANÝ PRACOVNÍ POSTUP OD ZHOTOVENÍ PO ODSTRANĚNÍ DÍKY FLUORESCENCI

Moderní léčba alignery otvírá nové možnosti ošetření v zubních a ortodontických ordinacích. Spektrum korekcí dysgnácie a jejich úspěšnost dále zvyšuje použití attachmentů. Základem úspěchu je přesnost umístění a tvar attachmentů.

S novým materiálem AlignerFlow LC společnost VOCO nabízí speciálně vyvinutý kompozit, který je fluorescenční pod UV-A světlem a optimalizuje proces práce s attachmenty od zhotovení po odstranění.

Díky speciálně uzpůsobené tekutosti lze materiál AlignerFlow LC přesně nanést do provizorní dlahy a zabránit tak nedostatku nebo přebytku použitého materiálu. Zabráni se tak uvolnění a chybnému umístění attachmentů.

Fluorescence, která je viditelná pouze pod UV-A světlem umožňuje přesnou kontrolu nad veškerými přebytky nebo artefakty.

Na konci léčby pak jsou vidět i ty nejmenší zbytky materiálu AlignerFlow LC. To umožňuje rychlé a nekomplikované odstranění attachmentů, přičemž sklovina zůstane nedotčená.

Attachmenty zhotovené z materiálu AlignerFlow LC jsou typické vysokou stabilitou a odolností vůči abrazi, které je dosaženo díky vysokému obsahu plniv 83 % hmotnosti. Výsledkem je to, že je síla vytvářená alignery kompletně přenášena z attachmentu na zuby po celou dobu léčby.

Kromě zhotovování attachmentů pro alignery je materiál AlignerFlow LC také možné použít na okluzální dostavby – za použití injektážní techniky – nebo k cementování lingválních retainerů.

Materiál je k dostání v NDT® stříkačkách 2 × 2 g v odstínech A1, A2 a A3 včetně příslušenství. Příložené aplikační kanyly (průměr 0,9 mm a 1,2 mm) podporují osobní preference, pokud jde o manipulaci, a lze je použít na obzvláště drobné attachmenty nebo při nanášení většího množství materiálu u lingválních retainerů.



Použití



Příprava v podobě standardního leptání a nanesení vazebného prostředku



Nanášení AlignerFlow LC do šablony



Nasazení šablony



Přítlačení šablony na místo



10 sekundové vytvrzení světlem skrz průhlednou šablonu



Sejmutí šablony po světelné polymeraci



Dokončené attachmenty pod UV-A světlem



Skončení léčby: zbytky jsou viditelné pod UV-A světlem



Výsledná situace po odstranění všech zbytků



Názor odborníka

„Attachmenty pro alignery jsou pro nás rutinní záležitostí: pro úspěch léčby je rozhodující jejich přesnost a tvar. Zatékavý materiál, který poskytuje pod UV-A světlem kontrolu jak nad nanesením, tak nad následným odstraněním, znamená skutečný přínos a rovněž úsporu času.“

Zubní lékař Thomas Kober, Německo



AlignerFlow LC

FLUORESCENTNÍ KOMPOZIT NA ATTACHMENTY PRO ALIGNERY

Indikace

- Zhotovování attachmentů pro alignery
- Retence alignerů
- Upevňování lingválních retainerů
- Okluzální dostavby

Výhody

- Bezpečné obroušení a odstranění pod UV-A světlem
- Přesné nanášení s dokonalou tekutostí
- Vytvrzování světlem skrz průhlednou šablonu
- Stabilita a odolnost vůči abrazi po celou dobu léčby
- Estetický vzhled v odstínech zubů



Obsah balení

- REF 1526 Stříkačka 2 x 2 g A1, příslušenství
- REF 1527 Stříkačka 2 x 2 g A2, příslušenství
- REF 1528 Stříkačka 2 x 2 g A3, příslušenství
- REF 2144 Aplikační kanyla typu 44, 100 kusů.
- REF 2148 Aplikační kanyla typu 46, 100 kusů



VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Německo

Freecall: 00 800 44 444 555
Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com
www.voco.dental

K dostání u: