

Tabulka aplikací biomateriálů

Doporučená alternativa/volitelná možnost	Granule				Bez gelové injekční stříkačky		Bloky	Membrány 15 x 20 mm, 30 x 25 mm, 50 x 30 mm							
	Kortikální spongiózní 0,25–1 mm	Kortikální spongiózní 1–2 mm	Sponózní 0,25–1 mm	Spongiózní 1–2 mm	Kortikosp ongiízní 0,25–1 mm	Kortikosp ongiízní 1–2 mm	Sponózní 10 x 10 x 10 mm 10 x 10 x 20 mm	Pomalá resorpce				Rychlá resorpce			
								Tloušťka 0,2 mm	Tloušťka 0,4 mm	Tloušťka 0,8 mm	Tloušťka 1 mm	Tloušťka 0,2 mm	Tloušťka 0,4 mm	Tloušťka 0,8 mm	Tloušťka 1 mm
Parodontální defekty (malá velikost nebo obtížný přístup)	Doporu čeno		Alternativa / Volitelné									Doporu čeno	Alternativa / volitelná možnost		
Parodontální defekty (infraoseální 1–3 stěny nebo furkace třídy I/II)	Doporu čeno		Alternativní /volitelné		Doporu čeno			Alternativa / volitelná možnost				Doporu čeno	Alternativa / volitelné		
Periimplantární defekty (až 3 odkryté spirály)	Alternativní /volitelné		Doporu čeno		Alternativní /volitelné							Alternativní /volitelné	Doporu čeno		
Periimplantární defekt (více než 3 odkryté spirály)	Doporu čeno	Alternativní /volitelné			Doporu čeno							Alternativa / volitelné	Doporu čeno		
Alveolus po extrakci (konzervace)	Doporu čeno	Alternativní /volitelné			Alternativa / volitelná možnost			Alternativa / volitelná možnost					Doporu čeno		
Augmentace dna čelistní dutiny (hlavní techniky včetně velkého sinus liftu, Summersova, krestálního nebo laterálního přístupu atd.)	Doporu čeno	Alternativní /volitelné		Alternativní /volitelné	Doporu čeno	Alternativní /volitelná			Alternativa / Volitelné				Doporu čeno	Alternativní /Volitelné	Alternativa /Volitelné
Horizontální a vertikální augmentace hřebene (onlay, inlay, bloková technika)							Doporučeno	Doporu čeno	Alternativa / Volitelné	Alternativa / Volitelné				Alternativa / Volitelné	Alternativa /Volitelná
Horizontální augmentace (Rozdělený hřeben)	Doporu čeno		Alternativní /volitelná		Alternativní /volitelné			Doporu čeno	Alternativa / volitelné	Alternativa / Volitelné					

